

Checkliste

Herstellerempfehlungen zum Routinebetrieb von Siegelgeräten

Siegelgerät: _____ Seriennummer: _____

Tägliche Kontrolle vor Praxisbeginn:

Seal Check			Visuelle Prüfung		Mechanische Prüfung				Monat / Jahr
Der in eine Folie eingelegte Seal Check ist erfolgreich, wenn die gesamte Siegelnaht einen gleichmäßigen Kontrast auf dem Indikatorbereich und scharfe Konturen aufweist.			Erstellen Sie eine Probe-Siegelnaht und überprüfen Sie, ob sie farblich identisch mit der werkseitigen Siegelnaht, gleichmäßig ausgeprägt ist und keine Falten oder Fehlstellen aufweist.		Peeltest: Sterilisieren Sie eine Folienverpackung und öffnen Sie diese anschließend. Die Papierseite muss sich nahezu rückstandslos von der Folienseite lösen.		Überprüfung der Zugfestigkeit Die aufgewendete Kraft beim Öffnen der Siegelnaht muss ebenso groß sein wie die, die zum Öffnen der werkseitigen Siegelnaht erforderlich ist.		
Tag	OK	nicht OK	OK	nicht OK	OK	nicht OK	OK	nicht OK	Unterschrift:
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Wöchentliche Kontrolle:

MELAcontrol Ink Test prüft Siegelnähte zuverlässig an allen vier Seiten der Verpackung auf Unregelmäßigkeiten, Fehlstellen oder Kanäle.

KW		KW		KW		KW		KW	
OK	nicht OK	OK	nicht OK	OK	nicht OK	OK	nicht OK	OK	nicht OK
Unterschrift:		Unterschrift:		Unterschrift:		Unterschrift:		Unterschrift:	



Als jährliche Routinekontrolle empfiehlt MELAG die Prüfung der Siegelnaht auf Zugfestigkeit, den sogenannten Siegelnahtfestigkeitstest gemäß EN 868-5, Anhang D. Das Auftragsformular kann von der MELAG Webseite geladen werden.

Monatliche Endkontrolle: _____
Unterschrift Hygienebeauftragte(r)