

Spirotrac IV Benutzerhandbuch

 **Vitalograph**[®] CE
0086

Vitalograph Ltd., Maids Moreton, Buckingham, MK18 1SW, England
Phone: (01280) 827110 Fax: (01280) 823302
e-mail: sales@vitalograph.co.uk Internet: www.vitalograph.co.uk

Vitalograph GmbH, Jacobsenweg 12, 22525 Hamburg, Germany
Phone: (040) 54 73 91-0 Fax: (040) 547 391 40
e-mail: info@vitalograph.de Internet: www.vitalograph.de

Vitalograph Inc., 13310 West 99th Street, Lenexa, Kansas 66215, U.S.A.
Phone: (913) 888-4221 Fax: (913) 888-4259
e-mail: vitcs@vitalograph.com Internet: www.vitalograph.com

Vitalograph (Ireland) Ltd., Gort Road Business Park, Gort Road, Ennis, Co. Clare, Ireland
Phone: (065) 6864100 Fax: (065) 6829289
e-mail: sales@vitalograph.ie Internet: www.vitalograph.ie

© Copyright Vitalograph 2005

Letzte Ausgabe (Nr. 3)

Kat. No. 07155


 **Vitalograph**® ist eine eingetragene Marke.

TABLE OF CONTENTS

Table of Contents	3
Hardware- und Software-Anforderungen	6
Einführung in Spirotrac IV	7
Beschreibung von Spirotrac IV	7
Qualitätsmerkmale von Spirotrac IV	7
In Spirotrac IV verwendete Schaltflächen und Symbole	8
So installieren Sie das Spirotrac IV-System	10
So schließen Sie den Vitalograph Pneumotrac an Ihren Computer an	10
So schließen Sie den Vitalograph Pneumotrac an Ihren Computer an	11
So schließen Sie den Vitalograph Gold Standard Plus an Ihren Computer an.....	11
So schließen Sie die Spirometer 68000 bzw. 69000 an Ihren Computer an	11
Software Installation	15
Den Gerätetyp ändern.....	19
Genauigkeitsüberprüfung in Spirotrac IV	20
Beschreibung der Genauigkeitsüberprüfung für den Vitalograph Pneumotrac.....	20
Das Genauigkeitsüberprüfungsprotokoll.....	22
Beschreibung der Genauigkeitsüberprüfung für die Spirometer 68000 und 69000	23
Patientendaten Auswählen und Verwalten	25
Neue Patienten eingeben	25
Informationen über einen bestehenden Patienten auswählen oder ändern.....	28
Einen Patienten löschen.....	30
Tests Durchführen	31
Vorbereitungen zur Durchführung von Tests.....	31
Den Vitalograph 2120 oder Gold Standard Plus vor der Durchführung von Tests einrichten.....	31
Vor der Durchführung von SVC-, FVC-, CCS-, IVC-, IV- und MVV-Tests vorzunehmende Überprüfungen.....	31
Allgemeine Schritte bei der Durchführung von SVC-, FVC-, CCS-, IVC-, IV- und MVV-Tests.....	32
SVC-Tests durchführen	33
FVC-Tests durchführen (einschließlich Anreiztests).....	35
CCS-Tests durchführen.....	37
IVC-Tests durchführen	39
IV-Tests durchführen	41
MVV-Tests durchführen.....	43
ATS-Wellenformen anzeigen.....	44
Post-Tests	45
Schnellspeichern	46
Belastungstests	48
Einen Vergleichstest für Belastungstests abrufen	57
Zuvor gespeicherte Belastungstests anzeigen	57
Massentests	57
Berichte Drucken	58

Berichte Drucken	58
Einen aktiven oder abgerufenen Bericht drucken.....	58
Trenderstellungsergebnisse	62
Aktive oder abgerufene Testergebnisse anzeigen	65
Gebläsebetrieb (nur Vitalograph Pneumotrac).....	66
Gebläseatterie	66
Kommunikation mit dem Vitalograph 2120 und Gold Standard Plus	67
Den Vitalograph 2120 und Gold Standard Plus in den Remote-Modus setzen	67
Tests durchführen.....	67
Patientendaten vom Computer an den 2120 bzw. Gold Standard Plus senden.....	67
Tests vom Vitalograph 2120 bzw. Gold Standard Plus auf den Computer herunterladen	68
Mehrere 2120-Geräte verwenden.....	68
Einrichten der Optionen	69
Berichtsoptionen.....	69
Anzeige des CCS-Tests	71
Testdauer	71
Gerät	71
Genauigkeitsprüfung	72
Tests speichern	73
%Vor/Nach-Gleichung	74
Standardwerte	75
Parameter.....	76
Anreizeanzeige.....	78
Datenbank	79
Interpretation	79
Extraktionsgebläse	80
SVC-Balkendiagramm	80
Passwörter	81
Datenbankverwaltung	83
Eine neue Datenbank erstellen	83
Eine Datenbank auswählen.....	84
Eine Datenbank löschen.....	85
Patientendatensätze sichern	86
Patientendatensätze von der Sicherungskopie wiederherstellen	88
Daten exportieren.....	89
Die Datenbank auswählen, die die Daten enthält.....	89
Die zu exportierenden Daten definieren	90
Daten exportieren	95
Manuelle Eingabe von Spirotrac IV-Daten	99
Daten zu einem neuen Patienten eingeben.....	99
Daten zu einem bestehenden Patienten eingeben	105
Einen Patienten löschen.....	107
Testergebnisse hinzufügen, löschen und anzeigen.....	108
Anweisungen zum Reinigen und Desinfizieren.....	110

Vitalograph Pneumotrac	110
Vitalograph 2120 und Vitalograph Gold Standard Plus	112
Fleisch-Messkopf.....	112
Anweisungen zum Reinigen und Desinfizieren - Volumetrisches S-Modell-Spirometer	114
Mundstücke und andere Zubehörteile, allgemein.....	114
Ersatzteile für Vitalograph Pneumotrac	114
Ersatzteile für 68000.....	114
Fehlerbeseitigung bei Software-Problemen	115
Fehlerbeseitigung bei Hardware-Problemen – Vitalograph Pneumotrac.....	116
Fehlerbeseitigung bei Hardware-Problemen der Spirometer 68000/69000.....	117
Technische Daten	119
Kundendienst	121
GARANTIE	122

HARDWARE- UND SOFTWARE-ANFORDERUNGEN

Um Spirotrac IV ausführen zu können, müssen die folgenden minimalen Hardware- und Software-Anforderungen erfüllt sein:

- Mindestens Pentium 166 mit CD-ROM Laufwerk
- Mindestens 32 Megabyte erweiterter RAM
- Mindestens 12 MB freier Festplattenspeicher.
- Microsoft® Windows 2000 und XP
- CD-ROM
- Maus
- COM-Anschluss

Wenn Sie sicher sind, dass Ihre Hardware und Software diese Anforderungen erfüllt, können Sie die Installationsanweisungen in diesem Benutzerhandbuch befolgen und anschließend mit Spirotrac arbeiten.

Außerdem empfehlen wir noch folgendes:

- Zur verbesserten grafischen Darstellung während der Tests ist die Auflösung der Bildschirmarbeitsfläche auf mindestens 800 x 600 Pixel eingestellt.
- Sämtliche akustischen Signale Ihres Computers sollten deaktiviert werden. Manche Computer können nicht korrekt auf den seriellen Anschluss (COM) zugreifen, wenn die akustischen Signale aktiviert sind. Ein Symptom hierfür ist, dass beim Testen mit einem seriellen Gerät (z.B. mit dem Vitalograph 2120) keine Echtzeitkurven auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Dasselbe gilt für sämtliche Windows-Nachrichtenübermittlungsanwendungen (WinPopup, MS Exchange etc.): sie sollten nicht ausgeführt werden, während mit Spirotrac Tests durchgeführt oder Daten auf einen Computer herauf- bzw. davon heruntergeladen werden.
- Wenn Sie einen Bildschirmschoner verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass er während Tests nicht aktiviert wird - stellen Sie das Aktivierungsintervall auf mindestens 10 Minuten ein.

Wenn Spirotrac IV mit dem Vitalograph 2120 oder Gold Standard Plus verwendet wird,

- Vergewissern Sie sich, dass die Software auf dem Vitalograph 2120 mindestens Version 2.00 ist. Sie können auf diese Information zugreifen, indem Sie die Option **Info** im Menü **Setup** des Vitalograph 2120 auswählen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Software auf dem Vitalograph Gold Standard Plus mindestens Version 2.00 ist. Sie können auf diese Information zugreifen, indem Sie die Option **Info** im Menü **Setup** des Vitalograph Gold Standard Plus auswählen.

EINFÜHRUNG IN SPIROTRAC IV

Beschreibung von Spirotrac IV

Spirotrac IV ist ein auf Microsoft Windows basierendes, computergestütztes Spirometrie-System, das zum Testen der Lungenfunktion in einer Vielzahl von Umgebungen entwickelt wurde, darunter arbeitsmedizinische Zentren, Krankenhäuser, pharmazeutische Forschungszentren, Arztpraxen und andere Zentren, die fortgeschrittene computergestützte Spirometrie benötigen.

Spirotrac IV ist zusammen mit einem der folgenden Vitalograph-Geräte zu benutzen, die über den seriellen Anschluss an Ihren Computer angeschlossen werden:

- Vitalograph Pneumotrac
- Vitalograph 2120
- Vitalograph Gold Standard Plus

Die Software ist mit früheren Versionen von Spirotrac kompatibel und kann mit Hilfe der Spirotrac A/D-Karte mit vorhandenen Hardware-Eingabegeräten zusammen benutzt werden, unter anderem mit dem S-Modell-Spirometer und dem Fleisch-Messkopf.


Qualitätsmerkmale von Spirotrac IV

Spirotrac IV weist folgende Qualitätsmerkmale auf:

- Intuitiv und leicht zu verwendende Windows-Schnittstelle
- Integrierte Datenbank zum Speichern von Patienten- und Testausgangsdaten
- Leistungsstarke Trendfunktionen
- Integrierte ATS-Qualitätskriterien für Tests
- Verfahren für Belastungstests
- Datenexport in gebräuchliche Tabellenkalkulationsprogramme und Datenbanken
- Manuelle Dateneingabe von Ergebnissen in die Spirotrac-Datenbank
- Anreizeanzeige.

In Spirotrac IV verwendete Schaltflächen und Symbole

Auf dem Spirotrac IV-Hauptbildschirm werden die folgenden Schaltflächen angezeigt:

	Gibt die Angaben zu einem neuen Patienten ein und fügt den Patienten zur Datenbank hinzu.
	Lädt die Angaben zu einem bestehenden Patienten aus der Datenbank.
	Druckt Berichte aus der Datenbank.
	Zeigt eine Vorschau der Testergebnisse auf einem Testbildschirm an.
	Wählt die Testoption SVC (Langsame Vitalkapazität) aus.
	Wählt die Testoption FVC (Forcierte Vitalkapazität) aus.
	Wählt die Testoption CCS (Ruhestrom-Spirometrie) aus.
	Wählt die Testoption IVC (Inspiratorische Vitalkapazität) aus.
	Wählt die Testoption IV (Inspiratorisches Volumen) aus.
	Wählt die Testoption MVV (maximale willkürliche Ventilation) aus.
	Startet die Post-Test-Funktionen.
	Schließen Sie den aktuellen Testbildschirm.
	Beim FVC-Testen von Kindern verwendete Anreizanzeige.
	Startet die automatische Zoomfunktion.
	Vergrößern.
	Verkleinern.



Wählt die Schnellspeicher-Funktion aus. Speichert kurzfristig die Angaben zum aktuellen Patienten und erstellt eine Liste. Die Liste wird im Dialogfeld Schnellspeicherfunktion angezeigt. Der Patient wird erst durch Abruf von dieser Liste wieder zum aktuellen Patienten.



Wählt die Trendfunktion aus.



Ruft das Hilfesystem auf.

Diese Schaltflächen werden beim Durchführen von Tests verwendet. Nicht alle Schaltflächen stehen bei allen Tests zur Verfügung. Eine grau dargestellte Schaltfläche kann nicht für den laufenden Test verwendet werden.

Die folgenden Schaltflächen sind für Belastungstests bestimmt.



Klicken Sie auf diese Schaltfläche um den Test zu starten.



Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie bereit sind, die Dosis zu verabreichen.



Klicken Sie auf diese Schaltfläche um die Testergebnisse anzuzeigen.



Klicken Sie auf diese Schaltfläche um die Durchführung von Belastungstests zu beenden.

SO INSTALLIEREN SIE DAS SPIROTRAC IV-SYSTEM

Bevor Sie Spirotrac IV zum ersten Mal verwenden, müssen vier Aufgaben durchgeführt werden. Diese werden im vorliegenden Kapitel in der Reihenfolge, in der sie ausgeführt werden, beschrieben.

- Anschließen des Spirometers an den seriellen Anschluss oder die A/D-Schnittstellenkarte des Computers
- Laden der Spirotrac IV-Software
- Überprüfung und gegebenenfalls Austausch des Gerätetyps
- Gegebenenfalls Aktualisieren von Datenbanken älterer Versionen auf Version IV mit Hilfe des Datenbank-Migrationsprogramms

Treten beim Befolgen dieser Schritte Probleme auf, lesen Sie unter Fehlerbehebung bei Software-Problemen bzw. Fehlerbehebung bei Hardware-Problemen nach um weitere Unterstützung zu erhalten.

Nach der Installation der Hardware und Software muss Spirotrac IV kalibriert werden, falls das Programm mit dem Fleisch-Messkopf oder dem S-Modell verwendet wird.

So schließen Sie den Vitalograph Pneumotrac an Ihren Computer an

Zur Installation des Vitalograph Pneumotrac müssen Sie die folgenden Schritte durchführen.



Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, den Computer auszuschalten, bevor Sie mit dem Installationsvorgang beginnen.

1. Stecken Sie das Kabel in einen verfügbaren seriellen Anschluss auf der Rückseite des Computers (normalerweise mit dem **10101**-Symbol gekennzeichnet). Wenn der Computer über einen 25-poligen seriellen Anschluss verfügt, verwenden Sie einen Anschlussadapter von 9-polig auf 25-polig.
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den seriellen Anschluss an der Seite des Vitalograph Pneumotrac (gekennzeichnet mit dem **10101**-Symbol).



Wenn Sie zusätzliche Geräte (keine Vitalograph-Produkte) an die serielle Schnittstelle anschließen, müssen diese den Verordnungen VDE0750, Teil 1-1 und Ihren jeweiligen EN-Spezifikationen entsprechen, z.B. EN60950 für Informationstechnologie und Bürogeräte, EN60601 für elektromedizinische Geräte. Nicht-medizinische Geräte müssen außerhalb der Patientenumgebung aufbewahrt werden, d.h. außerhalb von Bereichen, in denen es zu einem beabsichtigten oder unbeabsichtigten Kontakt zwischen dem Patienten und Teilen des Systems kommen kann oder dazu, dass andere Personen Teile des Systems berühren.
(Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Händler.)

3. Nehmen Sie den weißen Verbindungsschlauch aus der Verpackung und schließen Sie ihn an das Vitalograph Pneumotrac-Gerät an. Stellen Sie sicher, dass die geriffelte Seite des Schlauchs mit der geriffelten Seite des Anschlusses verbunden wird.

4. Nehmen Sie den Messkopf aus der Verpackung und schließen Sie ihn an das freie Ende des Verbindungsschlauchs an. Stellen Sie sicher, dass die geriffelte Seite des Schlauchs mit dem blauen Anschlusszapfen des Messkopf- Anschlusses verbunden wird.
5. Nehmen Sie einen der Messkopf-Filter aus der Verpackung und setzen Sie ihn in den Messkopfstand des Vitalograph Pneumotrac-Geräts ein.
6. Der Vitalograph Pneumotrac ist jetzt betriebsbereit.

Hinweis: *Dieses Gerät kann von elektromagnetischen Störungen beeinträchtigt werden. Auch in unmittelbarer Nähe befindliche Elektrogeräte können vom Pneumotrac beeinträchtigt werden. Werden solche Beeinträchtigungen vermutet, entweder das betreffende Gerät ausschalten oder den Abstand zwischen dem betroffenen Gerät und dem vermuteten Störgerät vergrößern oder die Anschlusskabel verkürzen.*

So schließen Sie den Vitalograph Pneumotrac an Ihren Computer an

1. Vergewissern Sie sich, dass der Computer ausgeschaltet ist.
2. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene serielle Kabel an den Vitalograph 2120 an. Befolgen Sie die Anweisungen der beiliegenden Dokumentation und stellen Sie sicher, dass das Netzteil an das Kabel angeschlossen ist, falls die 2120-Batterie nicht bereits geladen ist.
3. Schließen Sie den 9-poligen seriellen „D“-Stecker am anderen Ende des 2120-Kabels an den entsprechenden seriellen Anschluss (COM) auf der Rückseite Ihres Computers an. Wenn der Computer über einen 25-poligen seriellen Anschluss verfügt, verwenden Sie einen Anschlussadapter von 9-polig auf 25-polig.

So schließen Sie den Vitalograph Gold Standard Plus an Ihren Computer an

1. Vergewissern Sie sich, dass der Computer ausgeschaltet ist.
2. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene serielle Kabel an den Vitalograph Gold Standard Plus an.
3. Schließen Sie den 9-poligen seriellen „D“-Stecker am anderen Ende des Gold Standard Plus-Kabels an den entsprechenden seriellen Anschluss (COM) an der Rückseite Ihres Computers an. Wenn der Computer über einen 25-poligen seriellen Anschluss verfügt, verwenden Sie einen Anschlussadapter von 9-polig auf 25-polig.

So schließen Sie die Spirometer 68000 bzw. 69000 an Ihren Computer an

Der Fleisch-Messkopf und das S-Modell-Spirometer werden über eine Spirotrac A/D-Schnittstellenkarte an den Computer angeschlossen. Diese muss vor dem Anschließen des Geräts auf dem Computer installiert werden.

So installieren Sie die Spirotrac A/D-Karte

Befolgen Sie diese Schritte um die von der Spirotrac IV-Software benötigte Karte auf Ihrem Computer zu installieren. Falls Sie nicht mit Ihrer CPU-Einheit vertraut sind und Ihnen die hier verwendete Terminologie Probleme bereitet, ziehen Sie die entsprechenden Abbildungen in Ihrer Computerdokumentation zu Rate.



1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer ausgeschaltet ist und ziehen Sie das Netzkabel von der CPU-Einheit ab.
2. Entfernen Sie die Abdeckung der CPU-Einheit. Falls Sie nicht sicher sind, welche

Schrauben hierzu gelöst werden müssen, schlagen Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer nach.


3. Finden Sie einen freien ISA-Steckplatz, an den die Karte eingesetzt werden kann.
4. Entfernen Sie die neben dem Steckplatz befindliche Abblendplatte, indem Sie die Schraube(n), mit denen die Platte befestigt ist, lösen.
5. Nehmen Sie die Karte und stecken Sie sie in den ausgewählten ISA-Steckplatz der CPU ein.
6. Die in Schritt 4 entfernte Abblendplatte sollte mit der nun daran befestigten Karte wieder angebracht werden. Verwenden Sie die zuvor entfernte(n) Schraube(n) um die Abblendplatte wieder zu befestigen.
7. Bringen Sie die Abdeckung der CPU-Einheit wieder an.

Die Spirotrac A/D-Karte ist nun installiert und betriebsbereit.

So schließen Sie den Fleisch-Messkopfstände bzw. das S-Modell-Spirometer an Ihren Computer an

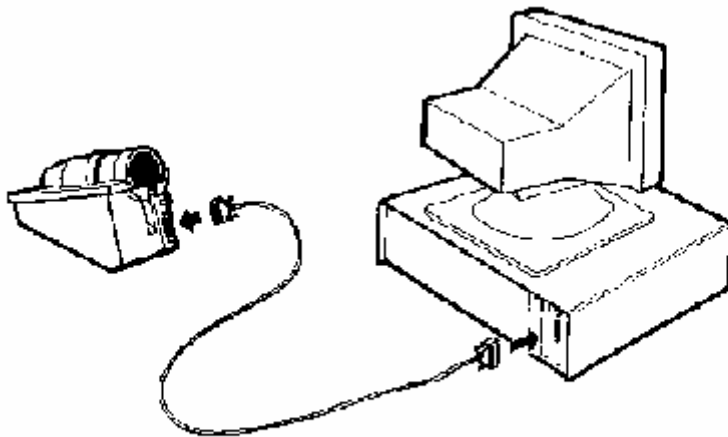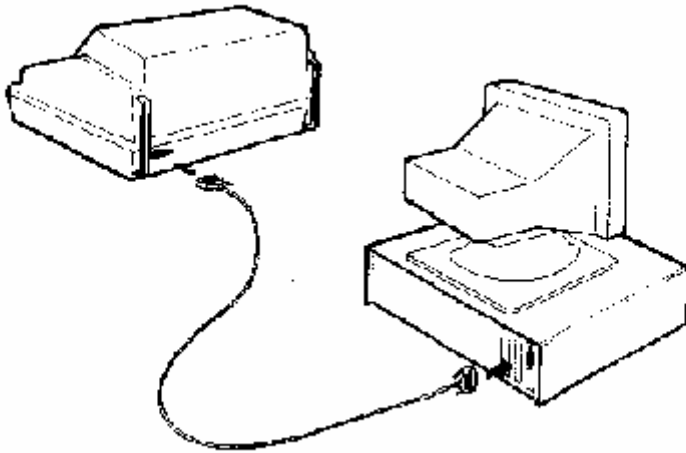

1. Verbinden Sie den Kabelstecker mit dem Fleisch-Messkopfstände bzw. der Rückseite des S-Modells und die Kabelbuchse mit der Karte auf der Rückseite des Computers.

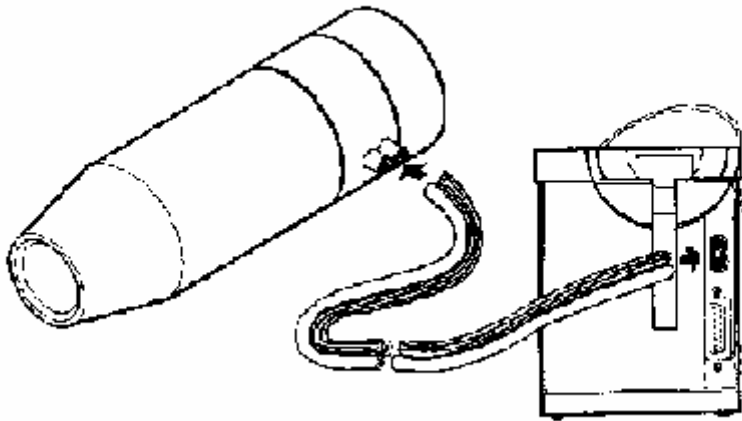

2. Schließen Sie ein Ende des Schlauches an den Messkopf und das andere an den Messkopfständer an.

Damit Sie die Anschlüsse problemlos finden, besitzt der Schlauch eine raue und eine glatte Seite und die Anschlüsse auf dem Messkopf und dem Messkopfständer sind farbig kodiert. Schließen Sie einfach die raue bzw. glatte Seite des Schlauchs an die Anschlüsse mit derselben Farbe auf dem Messkopf wie die Anschlüsse auf dem Messkopfständer an.

Software Installation

Laden der Spirotrac IV-Software

Wir empfehlen ggf. die Installation durch Ihren IT-Administrator. Der Installationsprozess ist einfach.

1. Legen Sie die Spirotrac-CD-ROM in das CD-Laufwerk ein. Das Installationsprogramm startet automatisch nach kurzer Zeit.
2. Sie werden aufgefordert, die gewünschte Sprache anzugeben. Wählen Sie eine Sprache aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**
3. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und stimmen Sie dieser zu. Wenn Sie der Vereinbarung nicht zustimmen, wird der Installationsvorgang abgebrochen.
4. Das Spirotrac IV Setup-Fenster wird angezeigt – klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
5. Ändern Sie ggf. das Ziellaufwerk und Zielverzeichnis durch Anklicken der Schaltfläche **Durchsuchen**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**, wenn Sie fertig sind.
6. Wählen Sie die Dienstprogramme aus, die Sie installieren möchten. Wenn Sie Spirotrac III installiert haben, empfiehlt sich die Installation des Datenbank-Aktualisierungsprogramms. Ist nach der ersten Installation ein weiteres Dienstprogramm erforderlich, kann das Installationsprogramm erneut ausgeführt werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
7. Spirotrac kann an das Datenverwaltungsprogramm eines Fremdherstellers angeschlossen werden. Wählen Sie dafür das entsprechende Schnittstellen-DLL. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vitalograph-Händler bzw. indem Sie auf **Weiter** klicken.
8. Wählen Sie das Messgerät, für das Sie Spirotrac verwenden wollen, z.B. Pneumotrac. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
9. Wenn Sie noch nicht über Acrobat Reader verfügen, stellen Sie sicher, dass Acrobat Reader für diesen Installationsvorgang ausgewählt ist. Sie benötigen Acrobat Reader um das Benutzerhandbuch für Spirotrac und die Hilfedatei aufzurufen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
10. Um die Softwaresicherheit zu garantieren, müssen Sie ein von Vitalograph angegebenes Lizenznummer eingeben. Das Passwort ist die Seriennummer der Spirotrac Software, die von Vitalograph auf dem Software-Paket angegeben ist. Geben Sie diese Seriennummer ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
11. Die Dateien werden in das ausgewählte Laufwerk und Verzeichnis kopiert.

Ist auf dem Laufwerk nicht genügend Speicherplatz vorhanden, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Klicken Sie in diesem Fall auf die Schaltfläche **OK**. Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie Dateien löschen oder sichern. Wiederholen Sie den Installationsvorgang beginnend mit Schritt 1.

10. Ist eine Installation auf einem Netzwerk erforderlich, klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja**, wenn die Aufforderung **Netzwerkeinrichtung** angezeigt wird. Klicken Sie anderenfalls

auf die Schaltfläche **Nein**. Weitere Informationen zur Installation auf einem Netzwerk finden Sie im Abschnitt Spirotrac IV auf einem Netzwerk installieren.

11. Ein virtueller PDF-Druckertreiber wird auf dem System installiert. Dieser Drucker kann dann zum Drucken ausgewählt werden, so dass mit Adobe Acrobat compatible PDF-Dateien ausgedruckt werden können.
12. Wenn die Installation beendet ist, wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden**.
Wenn aus gewählt wird Adobe Acrobat Reader installiert.
Sie sollten Ihren Computer nach der Installation neu starten.
13. Nach beendeter Installation wird der Programmname im Menü **Start** angezeigt. Klicken Sie auf den Programmnamen um die Anwendung auszuführen.

Hinweis: Es wird empfohlen, Spirotrac III-Datenbanken vor dem Ausführen von Spirotrac IV auf Version IV zu aktualisieren.

Installation von Spirotrac IV auf einem Netzwerk

Eine Spirotrac-Datenbank kann von mehreren Spirotrac-Installationen über ein Netzwerk gemeinsam benutzt werden.

Eine Spirotrac-Datenbank auf einem Computer, auf dem Spirotrac läuft, wird als zentrale Datenbank verwendet. (Dieser Computer wird als Server bezeichnet.) Mehrere andere Computer, auf denen Spirotrac installiert ist, können sich mit dieser zentralen Datenbank verbinden und darauf zugreifen. (Diese Computer werden als Clients bezeichnet.) Zum Einrichten der Server und Client-Computer müssen meherer Schritte ausgeführt werden.

Der Server-Computer:


Dies ist der Computer, auf dem Spirotrac ausgeführt wird und dessen Datenbank als zentrale Datenbank gewählt wurde.

1. Am Ende des Installationsvorgangs werden Sie gefragt, ob die Datenbank mit anderen Benutzern gemeinsam genutzt werden soll. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja** um diese Datenbank gemeinsam zu nutzen. Sie werden anschließend gefragt, welcher Laufwerksbuchstabe der Datenbank zugeordnet werden soll. Geben Sie den Buchstaben eines Laufwerks ein, das von Ihrem Computer nicht verwendet wird (vorgegeben wird X) und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**. Damit ist die Installation von Spirotrac beendet. Um die Installation abzuschließen, müssen Sie Ihren Computer neu starten.
2. Der nächste Schritt besteht darin, das Verzeichnis, das die Spirotrac-Datenbank enthält, freizugeben. Dieses Verzeichnis ist das Verzeichnis, in dem Spirotrac installiert wurde. Das Standardverzeichnis ist „C:\Spiro4“.


Um dieses Verzeichnis gemeinsam zu nutzen, wählen Sie im Windows-Explorer das Verzeichnis „C:\Spiro4“ (bzw. das Installationsverzeichnis, falls es hiervon verschieden ist) aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im aktivierten Kontextmenü den Befehl **Freigabe...** . Wählen Sie als Zugriffsoption **Lese-/Schreibzugriff**.

3. Abschließend ist es erforderlich, das im Lieferumfang von Spirotrac enthaltene

Dienstprogramm „Database Engine Network Configuration“ auszuführen.

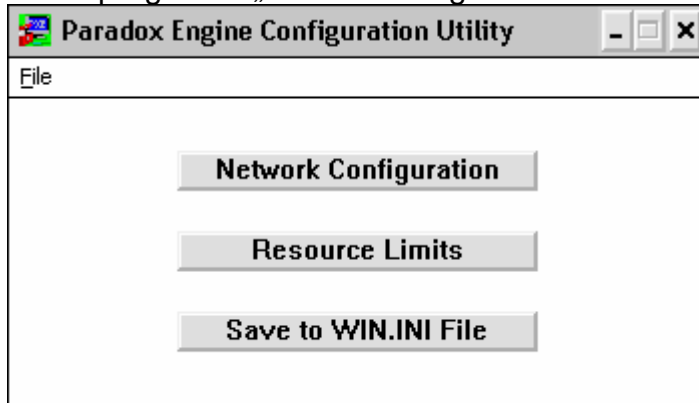

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Network Configuration**.

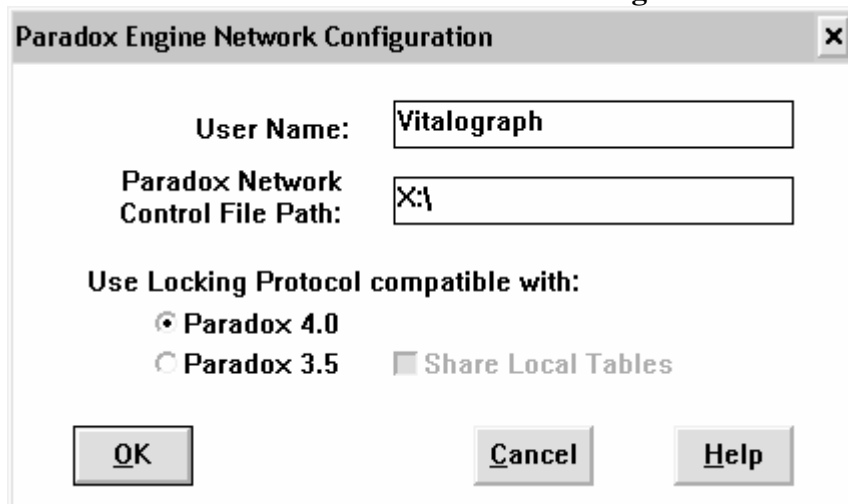

Geben Sie den Buchstaben ein, den Sie in Schritt 1 für „Paradox Network Control File Path“ gewählt haben (vorgegeben wird X).

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Resource Limits**:

Specify the maximum value for the following items. The combined resources used by all active Windows applications on your workstation cannot exceed this limit.

Open Tables:

Record Buffers:

Record Locks: per Table

Open Files:

Swap Buffer Size: Kbytes

Geben Sie die Einstellungen wie oben abgebildet ein.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Save to WIN.INI File** um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis: Bei einigen Betriebssystemen (z.B. Windows XP) kann man kein Laufwerk X erstellen. In diesem Fall bearbeiten Sie die Datei „autoexec.bat“ manuell, indem Sie folgende Zeile hinzufügen: -

SUBST X: C:\Spiro4\database

Um diese Einstellungen zu realisieren, müssen Sie Ihren Computer neu starten.

Der Client-Computer.

1. Am Ende des Installationsvorgangs werden Sie gefragt, ob die Datenbank mit anderen Benutzern gemeinsam genutzt werden soll. Wählen Sie diesmal die Schaltfläche **Nein**, da diese Datenbank nicht gemeinsam genutzt werden soll.
2. Der nächste Schritt besteht darin, den Computer mit dem Laufwerk zu verbinden, das die zentrale Datenbank enthält, die auf dem Server freigegeben wurde. Es ist wichtig, eine Verbindung zu demselben Netzlaufwerk herzustellen, mit dem auch die Server-Datenbank verbunden wurde, z. B. X (Vorgabe).

Wählen Sie im **Windows-Explorer** unter **Netzwerkumgebung** den Server-Computer aus und wählen Sie das Verzeichnis aus, das die zentrale Datenbank enthält. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im aktivierten Kontextmenü den Befehl **Netzlaufwerk verbinden**. Wählen Sie das Laufwerk aus, mit dem verbunden werden soll, z.B. X (Vorgabe). Klicken Sie auf **OK**.

3. Abschließend ist es erforderlich, das im Lieferumfang von Spirotrac enthaltene Dienstprogramm „Database Engine Network Configuration“ auszuführen. Verwenden Sie dieselben Einstellungen wie für den Server im vorherigen Abschnitt.

Den Gerätetyp ändern

1. Wählen Sie das Menü **Optionen** und anschließend das Untermenü **Gerät**.
2. Wählen Sie das benötigte Gerät und den COM-Anschluss, falls Sie einen Vitalograph 2120 oder Gold Standard Plus verwenden.

Wählen Sie **ATS-Wellenform**, wenn Sie FVC-Tests aus einer Auswahl von 24 Wellenformen simulieren und die Ergebnisse anschließend anzeigen wollen.

GENAUIGKEITSÜBERPRÜFUNG IN SPIROTRAC IV

In Übereinstimmung mit internationalen Standards zur Spirometrie wird empfohlen, die Genauigkeit täglich zu überprüfen. Beachten Sie, dass das System neu kalibriert werden muss, wenn sich das Eingabegerät ändert.

Die Genauigkeitsüberprüfung in Spirotrac IV trifft nur auf die Geräte Vitalograph Pneumotrac, Fleisch-Messkopf und S-Modell zu. Vitalograph 2120 und Vitalograph Gold Standard Plus werden rechnerfern kalibriert. Einzelheiten können Sie der Dokumentation zu diesen Geräten entnehmen.

Beschreibung der Genauigkeitsüberprüfung für den Vitalograph

Pneumotrac

Verbinden Sie den Messkopf mit der Präzisionspumpe. Es wird empfohlen, die 1-Liter-Präzisionspumpe von Vitalograph zu verwenden. Diese Pumpe weist eine Genauigkeit von $\pm 0,5\%$ auf. Falls der Messkopf erst kurz zuvor zum Testen benutzt wurde, muss er vor dem Genauigkeitsüberprüfen auf Umgebungstemperatur abgekühlt werden, indem Raumluft durch ihn hindurch gepumpt wird.

Genauigkeitsüberprüfung

Befolgen Sie zum Kalibrieren folgende Schritte.


1. Wählen Sie das Menü **Optionen** und anschließend das Untermenü **Genauigkeitsüberprüfung** und wählen Sie die Option **Gerät**.
2. Geben Sie im Bedarfsfall den Namen des Bedieners ein (maximal 8 Zeichen), der die **Genauigkeitsüberprüfung** durchführt oder wählen Sie einen Namen aus der Liste.
3. Geben Sie das Volumen der für die Kalibrierung verwendeten Pumpe ein oder wählen Sie ein Pumpenvolumen aus der Liste.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kalibrieren**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Stellen Sie sicher, dass der Kolben vollständig zurückgezogen ist und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
6. Drücken Sie den Kolben mit einem gleichmäßigen, festen Stoß in die Pumpe (nicht zu langsam).
7. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
8. Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7.

Wenn sich die ersten beiden Stöße nicht innerhalb einer Toleranz von 3% reproduzieren lassen, wird das folgende Dialogfeld angezeigt.




Wird diese Meldung angezeigt, können Sie Schritte 6 und 7 bis zu fünf Mal wiederholen. Wenn die Genauigkeitsüberprüfung nach fünf Versuchen immer noch nicht erfolgreich ist, wird der Vorgang abgebrochen.

Auf dem Bildschirm wird folgende Meldung angezeigt, wenn die Genauigkeitsüberprüfung erfolgreich durchgeführt wurde.

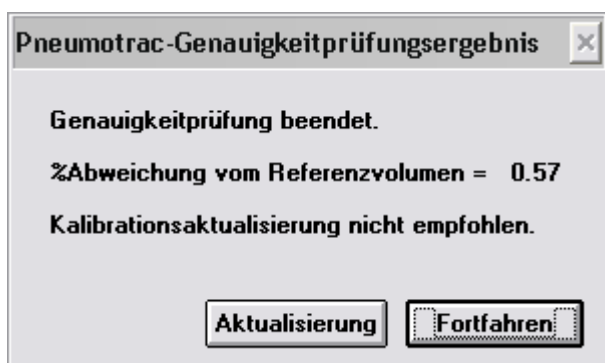

10. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

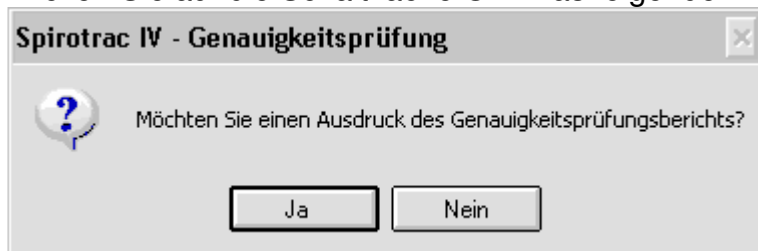

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** um den Bericht zu drucken.

Das Genauigkeitsüberprüfungsprotokoll

Spirotrac verwaltet ein Genauigkeitsüberprüfungsprotokoll für Vitalograph Pneumotrac, 2120 und Gold Standard Plus.

Spirotrac unterscheidet diese aufgrund ihrer Seriennummer. Ein Genauigkeitsüberprüfungsprotokoll für jedes Spirometer wird gespeichert und kann bei Bedarf ausgedruckt werden.


Das Genauigkeitsüberprüfung sprotokoll wird jedes Mal aktualisiert, wenn sich Vitalograph Pneumotrac, 2120 bzw. Gold Standard Plus bei der Kommunikation mit Spirotrac IV im Remote-Modus befinden. Während der Aktualisierungsphase erscheinen die folgenden Spirotrac IV-Meldungen:

- 'Testmodus wird aufgerufen – Verbindung zum Gerät herstellen'
- 'Testmodus wird aufgerufen – Abrufen der Umgebungsdaten'
- 'Testmodus wird aufgerufen – Abrufen der Kalibrierungsdaten'
- 'Testmodus wird aufgerufen – Aktualisierung des Genauigkeitsüberprüfungsprotokolls'

Es werden nur die Informationen der letzten Genauigkeitsüberprüfung, die im Vitalograph Pneumotrac, 2120 bzw. Gold Standard Plus vorgenommen wurde, auf das Protokoll übertragen.

Wählen Sie das Menü **Berichte** aus und wählen Sie die Option **Genauigkeitsüberprüfungsprotokoll...**

Ein dem folgenden ähnliches Dialogfeld wird angezeigt.

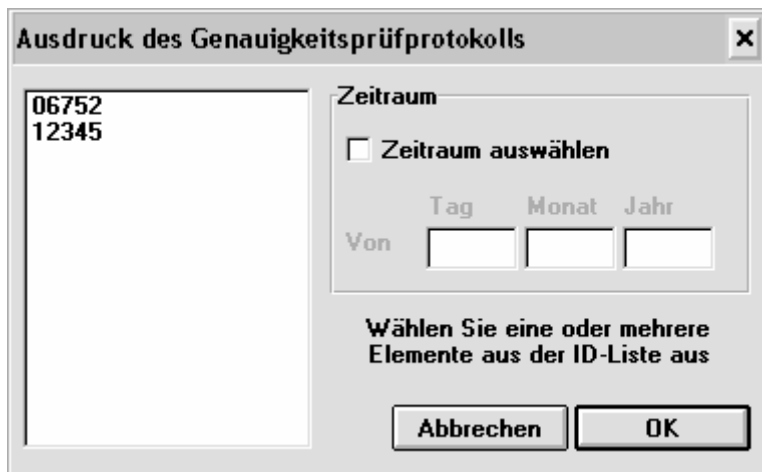

Wählen Sie die Seriennummer(n) aus, für die der Bericht gedruckt werden soll. Soll der Bericht einen bestimmten Zeitraum berücksichtigen, markieren Sie das Kontrollkästchen **Zeitraum auswählen**.

Geben Sie das Startdatum des Berichts ein (der Bericht berücksichtigt den Zeitraum von diesem Datum an bis zum aktuellen Datum) und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **OK**.

Hinweis: Für die Spirometer 68000 und 69000 wird ebenfalls ein Genauigkeitsüberprüfungsprotokoll erstellt, das jedoch nicht mit den Seriennummern der Geräte in Beziehung gesetzt wird.

Beschreibung der Genauigkeitsüberprüfung für die Spirometer 68000 und 69000

Der Genauigkeitsüberprüfungsvorgang in Spirotrac IV erfolgt in zwei Stufen. In Stufe 1 überprüft das System das Volumen von zwei aufeinanderfolgenden Pumpenstößen daraufhin, ob sie um weniger als 3% voneinander abweichen. Wird dieser Wert auch nach sechs Versuchen nicht erreicht, wird der Genauigkeitsüberprüfungsvorgang abgebrochen, da die Vermutung naheliegt, dass entweder das Gerät nicht richtig funktioniert oder der Benutzer nicht richtig kalibriert, d. h. entweder zu schnell oder zu langsam vorgeht.

In Stufe 2, wenn zwei aufeinanderfolgende Pumpenstöße mit weniger als 3% Abweichung erreicht wurden, verwendet das System das Volumen des letzten Atemstoßes als das gemessene Volumen und vergleicht es mit einem tatsächlichen Volumen, das der Benutzer in das System eingegeben hat. Weicht das gemessene Volumen um nicht mehr als 3% vom tatsächlichen Volumen ab, gelten die ATS-Kriterien als erfüllt und die Kalibrierung wird automatisch aktualisiert. Wenn die ATS-Kriterien nicht erfüllt sind, kann der Benutzer selbst entscheiden, ob er die Kalibrierung aktualisieren möchte.

Verbinden Sie den Messkopf mit der Präzisionspumpe. Es wird empfohlen, die 1-Liter-Präzisionspumpe von Vitalograph zu verwenden. Diese Pumpe weist eine Genauigkeit von +/- 0,5% auf. Falls der Messkopf erst kurz zuvor zum Testen benutzt wurde, muss er vor dem Genauigkeitsüberprüfen auf Umgebungstemperatur abgekühlt werden, indem Raumluft durch ihn hindurch gepumpt wird.

Die Pumpe am S-Modell anbringen

Anleitungen zum Anbringen der Pumpe an das S-Modell finden Sie im dazugehörigen Benutzerhandbuch.

Genauigkeitsüberprüfung

Befolgen Sie zum Kalibrieren folgende Schritte.


1. Wählen Sie das Menü **Optionen** und anschließend das Untermenü **Genauigkeitsüberprüfung** und wählen Sie die Option **Gerät**.
2. Geben Sie im Bedarfsfall den Namen des Bedieners ein (maximal 9 Zeichen), der die Genauigkeitsüberprüfung durchführt oder wählen Sie einen Namen aus der Liste.
3. Geben Sie das Volumen der für die Kalibrierung verwendeten Pumpe ein oder wählen Sie ein Pumpenvolumen aus der Liste.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kalibrieren**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Stellen Sie sicher, dass der Kolben vollständig zurückgezogen ist und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
6. Drücken Sie den Kolben mit einem gleichmäßigen, festen Stoß in die Pumpe (nicht zu langsam).
7. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
8. Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7.

Wenn der erste und zweite Stoß nicht die weiter oben im Abschnitt „Beschreibung des Genauigkeitsüberprüfungsvorgangs“ beschriebenen Kriterien erfüllen, wird folgende Meldung angezeigt.




Wird diese Meldung angezeigt, können Sie die Schritte 6 und 7 insgesamt sechs Mal durchführen. Wenn die Genauigkeitsüberprüfung nach sechs Versuchen immer noch nicht erfolgreich ist, wird der Vorgang abgebrochen.

Auf dem Bildschirm wird folgende Meldung angezeigt, wenn die Kalibrierung erfolgreich durchgeführt wurde.

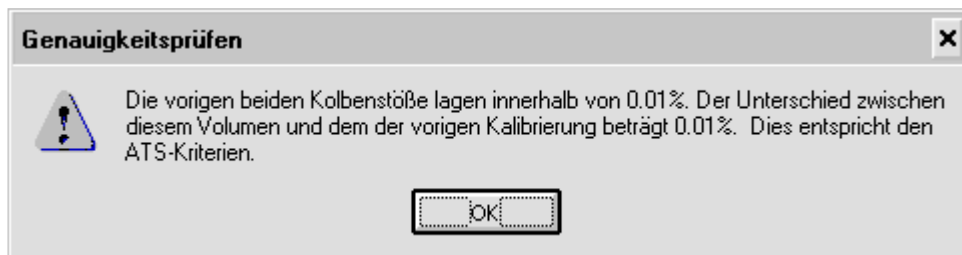

11. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

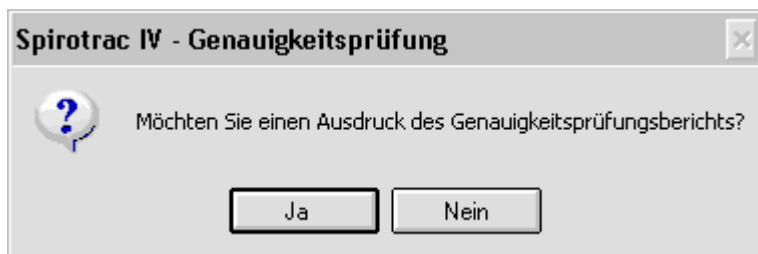

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** um den Bericht zu drucken.

PATIENTENDATEN AUSWÄHLEN UND VERWALTEN

Bevor Sie einen Test an einem Patienten durchführen, dessen Ergebnisse gespeichert werden sollen, verwenden Sie das Menü **Patient** um Daten über den Patienten anzugeben, der getestet wird. Dies kann auf zwei Arten geschehen:

- durch Eingabe von Informationen über einen neuen Patienten auf dem Bildschirm
- durch Auswahl von zuvor in das System eingegebenen Patientendaten.

Das Menü **Patient** kann auch dazu verwendet werden, bei Bedarf zuvor in das System eingegebene Patientendaten, die abgerufen werden, zu ändern oder zu löschen.

Sie können sich zwischen Feldern auf dem Bildschirm bewegen, indem Sie die Maus verwenden oder indem Sie die TABULATORTASTE drücken um sich vorwärts zu bewegen bzw. die UMSCHALTTASTE und TABULATORTASTE um sich rückwärts zu bewegen. Durch Drücken der EINGABETASTE wird der Cursor nicht von einem Feld zum anderen bewegt.

Stellen Sie sicher, dass die richtige Datenbank ausgewählt ist, bevor Sie einen neuen Patienten eingeben.

Neue Patienten eingeben

Befolgen Sie diese Schritte um Daten zu einem neuen Patienten einzugeben.

1. Wählen Sie das Menü **Patient** aus und wählen Sie daraus die Option **Neue**. Oder klicken Sie auf das folgende Symbol:



Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

Neue Patientendaten

Name					
Nachname	Vorname	Zweiter			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Patienten-ID	Geburtsdatum				
<input type="text"/>	Tag	Monat	Jahr	Alter	
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Geschlecht	Maßangaben		Bevölkerungsgruppe		
<input checked="" type="radio"/> Männlich	Größe	<input type="text" value="0"/> cm.	<input type="text" value="Europäisch"/>		
<input type="radio"/> Weiblich	Gewicht	<input type="text" value="0"/> kg.	Körpermassenindex		
			<input type="text" value="-"/>		
<input type="button" value="Mehr..."/>	Sie können einen neuen Patienten einrichten, diese demographischen Daten speichern, sie als 'Aktuell' eingeben oder abbrechen.			<input type="button" value="Abbrechen"/>	<input type="button" value="Speichern"/>
<input type="button" value="Neue"/>				<input type="button" value="Aktuelle Daten eingeben"/>	

2. Geben Sie den Nachnamen des Patienten in das Feld **Nach** ein sowie einen Vornamen

oder Anfangsbuchstaben in die Felder **Vor** und **Mittel** ein.

3. Geben Sie ein eindeutiges Kennzeichen in das Feld Patienten-ID ein um den Patienten zu identifizieren. Hierbei handelt es sich um ein Schlüsselfeld, weshalb das Eingeben einer ID zwingend erforderlich ist.
4. Geben Sie das Geburtsdatum des Patienten in Zahlen in die Felder **Tag**, **Monat** und **Jahr** ein.
5. Klicken Sie auf das Optionsfeld **Weiblich**, wenn es sich um eine Patientin handelt.
6. Geben Sie die Größe des Patienten, entsprechend dem Maßsystem, das in der Windows-Systemsteuerung unter **Ländereinstellungen** festgelegt ist, in metrischen oder US-Maßen in das Feld **Größe** ein.

Beachten Sie, dass bei Verwendung der Trendfunktion für Größe und Gewicht in diesem und in Schritt 7 Werte eingegeben werden müssen.

Im Dialogfeld wird der Körpermassenindex (BMI) des Patienten angezeigt, wenn sowohl die Größe als auch das Gewicht eingegeben wurden.

7. Geben Sie das Gewicht des Patienten, entsprechend dem Maßsystem, das in der Windows-Systemsteuerung unter **Ländereinstellungen** festgelegt ist, in metrischen oder US-Maßen in das Feld **Gewicht** ein.
8. Wählen Sie die Bevölkerungsgruppe aus, indem Sie auf die entsprechende Beschreibung in der Liste **Bevölkerungsgruppe** klicken.
9. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Mehr...**, wenn Sie zusätzliche Informationen eingeben möchten, bzw. fahren Sie mit Schritt 14 fort, wenn Sie die Eingabe von Informationen über den Patienten beendet haben.

Nach dem Klicken auf die Schaltfläche **Mehr...** wird das folgende Dialogfeld angezeigt.

The screenshot shows a dialog box titled "Weitere Daten". It has a close button in the top right corner. The dialog is divided into several sections:

- Rauchverhalten:** Contains a checkbox for "[Ehemaliger] Rauch", a text input for "# Zigaretten/Tag" (value: 0), a text input for "# Jahre geraucht" (value: 0), a text input for "Packungen pro Tag" (value: -), a text input for "# Jahre seit Rauchen aufgehört" (value: 0), and a text input for "Packungsjahre" (value: -).
- Berufliche Belastung:** A text input field.
- Allgemeine Kommentare:** A large text area for notes.
- Überweisender Arzt:** A text input field.

At the bottom right, there are two buttons: "Abbrechen" and "OK".

Die Eingaben in dieses Dialogfeld sind optional.

Im Dialogfeld werden die pro Tag gerauchten Packungen und der Packungsjahrwert angezeigt.

10. Markieren Sie, falls zutreffend, das Kontrollkästchen **[Ehemaliger] Raucher**. Geben Sie in diesem Fall die Anzahl der Zigaretten, die der Patient pro Tag raucht, in das Feld **# Zigaretten/Tag** sowie die Anzahl der Jahre, die der Patient bereits raucht, in das Feld **# Jahre geraucht** ein.

oder

Geben Sie, falls zutreffend, die Anzahl der Jahre, die der Patient nicht mehr raucht, in das Feld **# Jahre seit Rauchen aufgehört** ein.

11. Geben Sie in das Feld **Berufliche Belastung** die Namen anderer gesundheitsbeeinträchtigenden Stoffe und Substanzen ein, denen der Patient am Arbeitsplatz ausgesetzt ist, z. B. Isozyanat.

12. Geben Sie in das Feld **Allgemeine Bemerkungen** zusätzliche Bemerkungen über den Patienten ein.
13. Geben Sie den Namen des Hausarztes des Patienten in das Feld **Überweisender Arzt** ein.
14. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK** und das Fenster **Neue Patientendaten** wird wieder angezeigt.
15. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktuelle Daten eingeben** um die neu eingegebenen Patienteninformationen zu speichern und fortzufahren. Um Informationen über einen weiteren neuen Patienten einzugeben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** und anschließend auf die Schaltfläche **Neue**.

Informationen über einen bestehenden Patienten auswählen oder ändern

Befolgen Sie diese Schritte um einen Patienten für Tests auszuwählen, über den bereits Informationen in Spirotrac IV eingegeben wurden.

1. Wählen Sie das Menü **Patient** aus und wählen Sie daraus die Option **Abruf**. Oder klicken Sie auf das folgende Symbol:



Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

Patienten von der Datenbank abrufen ✕

Geben sie die ID-Nummer des Patienten ein oder wählen sie eine nummer aus der untenstehenden Liste aus.

Suchkriterien

Suche nach ID

Suche nach Name

Patient	Geburtstag
JOHN_DOE	01/01/1970
JOHN_TREND	01/01/1960

Neue...
Überprüfen...
Abbrechen
OK

2. Patienten sind entweder nach ID oder nach Namen aufgelistet. Klicken Sie im Feld **Suchkriterien** auf das gewünschte Optionsfeld.

3. Geben Sie die ID oder den Namen (je nach dem oben ausgewählten Suchkriterium) des gewünschten Patienten ein oder bewegen Sie sich durch die angezeigte Liste und klicken Sie auf die korrekte ID oder den korrekten Namen in der Liste. (Sie können auch das erste bzw. die ersten Zeichen der Patienten-ID bzw. des Patientennamens eingeben.)
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Einen Patienten löschen

Befolgen Sie diese Schritte um einen Patienten zu löschen.

1. Wählen Sie das Menü **Patient** aus und wählen Sie daraus die Option **Löschen**.

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

Wählen Sie Patienten aus, die gelöscht werden sollen.

Wählen Sie einen oder mehrere Patienten aus der Liste aus, die gelöscht werden sollen.

Patient	Geburtstag
JOHN_DOE	01/01/1970
JOHN_TREND	01/01/1960

Suchkriterien

Suche nach ID
 Suche nach Name

Alle auswählen

Abbrechen

Löschen

2. Patienten sind entweder nach ID oder nach Namen aufgelistet. Klicken Sie im Feld **Suchkriterien** auf das gewünschte Optionsfeld.

Bewegen Sie sich durch die angezeigte Liste und klicken Sie auf die korrekte ID oder den korrekten Namen in der Liste. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Löschen**.

3. Wenn das folgende Dialogfenster angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass der angegebene Patient gelöscht werden soll.

Löschen von Patientendatensatz

Patienten-ID
JOHN_DOE

Achtung:-
Durch Löschen dieses Datensatzes werden dieser Patient und die damit verknüpften Testdaten unwiderruflich aus der Datenbank gelöscht.

Name

Nachname	Vorname	Zweiter
Doe	John	J

Klicken Sie auf Löschen, um diesen Patienten zu löschen, und Alle löschen, um alle ausgewählten Patienten zu löschen.

Löschen Alle löschen Abbrechen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Löschen** um den Patienten zu löschen oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja zu allen** um alle zum Löschen ausgewählten Patienten zu löschen.

TESTS DURCHFÜHREN

Vorbereitungen zur Durchführung von Tests

Im Menü **Test** befinden sich spezielle Schaltflächen, Symbole und Bildschirminformationen, mit denen sich der Benutzer vor dem erstmaligen Durchführen von Tests vertraut machen sollte. Beschreibungen dieser Schaltflächen, Symbole und Informationen finden Sie im Abschnitt In Spirotrac IV verwendete Schaltflächen und Symbole.

Den Vitalograph 2120 oder Gold Standard Plus vor der Durchführung von Tests einrichten

Bevor der PC und der Vitalograph 2120 oder Vitalograph Gold Standard Plus die Kommunikation miteinander aufnehmen können, muss sich das Gerät im Remote-Modus befinden. Dazu muss es eingeschaltet werden. Wird der hier abgebildete Hauptmenübildschirm angezeigt, schaltet das Gerät automatisch in den Remote-Modus, wenn die Spirotrac IV-Software Informationen an den Vitalograph 2120 oder Vitalograph Gold Standard Plus sendet.

>	P A T I E N T	L O E S C H E N
	T E S T	S E T U P
	D R U C K E N	A N Z E I G E N
	P O S T	K A L I B ' N

Vor der Durchführung von SVC-, FVC-, CCS-, IVC-, IV- und MVV-Tests vorzunehmende Überprüfungen

Bevor Sie mit SVC-, FVC-, CCS-, IVC-, IV- und MVV-Tests beginnen, sollten Sie eine Reihe von Überprüfungen durchführen um sicherzustellen, dass die Testoptionen wie gewünscht eingestellt sind.

1. Stellen Sie sicher, dass die Genauigkeit des Geräts vor kurzem überprüft wurde.
2. Stellen Sie sicher, dass im Untermenü **Tests speichern** des Menüs **Optionen** die richtigen Einstellungen für das Speichern von Tests gewählt sind.
3. Stellen Sie sicher, dass die zu messenden Parameter sowie die Felder **Testdatum**, **Testzeit**, **Besuchsref.** und **Testref.** im Untermenü **Parameter** des Menüs **Optionen** Ihren Wünschen entsprechend ausgewählt sind.

Beachten Sie, dass man auf die Testsymbole im Software-Programm nicht doppelklicken sollte. Bei langsameren Systemen kann das zu der Meldung „Unzureichende Speicherkapazität“ führen. Auf diese Symbole sollte man nur einmal klicken. Sollte die Meldung „Unzureichende Speicherkapazität“ erscheinen, lassen Sie das Programm einfach erneut laufen. Daten gehen nicht verloren.

Allgemeine Schritte bei der Durchführung von SVC-, FVC-, CCS-, IVC-, IV- und MVV-Tests

Dieser Abschnitt beschreibt allgemeine Schritte, die bei der Durchführung von SVC-, FVC-, CCS-, IVC-, IV- und MVV-Tests zu befolgen sind. Fahren Sie im Anschluss an diese allgemeinen Schritte mit den für den gewählten Test spezifischen Schritten fort, z. B. mit den im Abschnitt FVC-Tests durchführen beschriebenen Schritten.

1. Wählen Sie mit einer der folgenden Methoden einen aktuellen Patienten aus.

Wählen Sie einen Patienten, dessen Tests gespeichert werden sollen und fahren Sie mit Schritt 2 fort.

oder

Geben Sie Informationen über einen Patienten ein, dessen Tests nicht gespeichert werden sollen, indem Sie im Menü **Patient** die Option **Überprüfen** wählen.

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

The dialog box titled "Patienten überprüfen" contains the following elements:

- Name:** Two input fields for "Nachname" and "Vorname".
- Maßangaben:** Two input fields for "Alter" (with "Jahre" next to it) and "Größe" (with "cm." next to it).
- Größe:** Two radio buttons labeled "Männlich" (selected) and "Weiblich".
- Text:** A text box on the right side containing the instruction: "Wenn Sie die Testdaten dieses Patienten speichern möchten, verwenden Sie dazu die Datenbankfunktionen des Serielles Spirotrac".
- Buttons:** "OK" and "Abbrechen" buttons at the bottom right.

Geben Sie die entsprechenden Informationen in die Felder **Nach**, **Vor**, **Alter** und **Größe** ein und klicken Sie, falls zutreffend, auf das Optionfeld **Weiblich**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2. Klicken Sie auf die gewünschte Testschaltfläche, z. B. **FVC**.

Wenn das Dialogfeld **Tests abrufen** angezeigt wird, können Tests ausgewählt werden, die abgerufen werden sollen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**. Diese Tests dienen nur optischen Zwecken. Sie werden beim Speichern von Tests nicht berücksichtigt.

Wenn das Dialogfeld **Besuchsreferenz eingeben** angezeigt wird (siehe unten), geben Sie eine Referenznummer in das Feld Besuchsref. ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

3. Fahren Sie so fort, wie in dem jeweiligen Abschnitt über den durchzuführenden Test beschrieben.


Hinweis 1: Klicken Sie beim Anzeigen von Diagrammen auf dem Bildschirm die Maustaste und halten Sie sie gedrückt um ein Fadenkreuz über das Diagramm zu legen. Bewegen Sie die Maus bei gedrückter Maustaste um das Ablesen der Werte am Maßstab an den Rändern des Diagramms zu erleichtern.

Hinweis 2: Bei jeder der folgenden Testmethoden darf der Patient pro Sitzung maximal 12 Atemstöße abgeben.

NB: Wenn der Testbildschirm über eine Minute lang nicht benutzt wird, unterbricht Spirotrac den Test.

SVC-Tests durchführen

1. Führen Sie die Schritte im Abschnitt Allgemeine Schritte bei der Durchführung von SVC-, FVC-, CCS-, IVC-, IV- und MVV-Tests aus.
2. Wählen Sie das Menü **Test** aus und wählen Sie daraus die Option **SVC** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **SVC**.

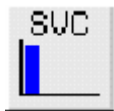

Sie können den Test jederzeit beenden, indem Sie erneut auf die Schaltfläche **SVC** klicken.

3. Warten Sie, bis die Meldung „PUSTEN SIE IN DEN MESSKOPF UM ZU BEGINNEN" am oberen Rand des Diagramms angezeigt wird.
4. Geben Sie dem Patienten folgende Anweisungen um den Test ordnungsgemäß durchzuführen:
 - Stehen Sie auf.
 - Halten Sie den Messkopf von Ihrem Mund weg.
 - Atmen Sie so tief wie möglich ein. Nehmen Sie nun das Mundstück in den Mund und halten Sie es mit den Zähnen fest.

- Schließen Sie ihre Lippen fest um das Mundstück.
- Atmen Sie so lange wie möglich normal aus.

Sie werden aufgefordert, den Test zu akzeptieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** um den Test zu akzeptieren, bzw. **Nein** um den Test zu verwerfen.

Wenn das Dialogfeld **Testreferenz eingeben** angezeigt wird, geben Sie eine Referenznummer in das Feld **Testref.** ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vorschau** um die Ergebnisse der einzelnen Testparameter anzuzeigen.

Ein dem folgenden Beispiel ähnliches Fenster wird angezeigt.

Parameter	Normalwert	Vor	%Normal	Nach	%Normal	%Änderung
SVC	L	5.62	3.16	56.2	-	-

Testtyp: SVC

Test 1 

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen** um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Wenn Sie auf die Schaltfläche **Drucken** klicken, wird der angezeigte Test gedruckt.

6. Wiederholen Sie bei Bedarf Schritt 4 um einen weiteren SVC-Test durchzuführen.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden** um den SVC-Test zu beenden.

Sie können einen anderen Testtyp durchführen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken.

Wenn das Dialogfeld **Tests speichern** angezeigt wird (wie dies beim manuellen Speichern von Tests der Fall ist), kann der Benutzer auf **Schlecht**, **Durchschnittlich** oder **Maximum** klicken um den Anstrengungswert zu ändern. Klicken Sie auf die Tests, die gespeichert werden sollen und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Speichern** um die Tests zu speichern.

Tests werden automatisch gespeichert, wenn im Untermenü **Tests speichern** des Menüs **Optionen** die Option **Bester ATS Test**, **Bester ERS Test**, **Beste 3 ATS Tests** oder **Beste 3 ERS Tests** ausgewählt ist.

FVC-Tests durchführen (einschließlich Anreiztests)

1. Führen Sie die Schritte im Abschnitt Allgemeine Schritte bei der Durchführung von SVC-, FVC-, CCS-, IVC-, IV- und MVV-Tests aus.
2. Wählen Sie das Menü **Test** aus und wählen Sie daraus die Option **FVC** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **FVC**.



NB: Die Position und Größe des Diagramms können für spätere Tests gespeichert werden, indem Sie **Position/Größe speichern** im Systemmenüfeld in der linken oberen Ecke des Diagramms wählen.

Wenn Sie einen Anreiztest durchführen und die zwei Diagramme auf dem Bildschirm angezeigt werden, reduzieren Sie sie auf Symbolgröße am unteren Bildschirmrand und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Anreiz**. Dieser Bildschirm kann nun dem Kind gezeigt werden, wobei erklärt wird, was während des Tests geschieht. Anschließend können die Diagramme wieder auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Sie können den Test jederzeit beenden, indem Sie auf die Schaltfläche **FVC** klicken.

3. Warten Sie, bis die Meldung „PUSTEN SIE IN DEN MESSKOPF UM ZU BEGINNEN“ am oberen Rand des Diagramms angezeigt wird.
4. Geben Sie dem Patienten folgende Anweisungen um den Test ordnungsgemäß durchzuführen.
 - Stehen Sie auf.
 - Halten Sie den Messkopf von Ihrem Mund weg.
 - Atmen Sie so tief wie möglich ein. Nehmen Sie nun das Mundstück in den Mund und halten Sie es mit den Zähnen fest
 - Schließen Sie ihre Lippen fest um das Mundstück.
 - Atmen Sie so tief und so schnell wie möglich aus, wobei Sie versuchen, mindestens 6 Sekunden lang auszuatmen
 - (Falls Einatmungsparameter ausgewählt sind:) Atmen Sie anschließend so schnell wie möglich ein


Ein Qualitätsübersichtsdialogfeld wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** um den Test zu akzeptieren, bzw. **Nein** um den Test zu verwerfen.

Wenn das Dialogfeld **Testreferenz eingeben** angezeigt wird, geben Sie eine Referenznummer in das Feld **Testref.** ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vorschau** um die Ergebnisse der einzelnen Testparameter anzuzeigen.
Ein dem folgenden Beispiel ähnliches Fenster wird angezeigt.

Parameter		Normalwert	Vor	%Normal	Nach	%Normal	%Änderung
SUC	L	5.34	-	-	-	-	-
FVC	L	5.34	6.00	112.4	-	-	---
FEU 1	L	4.40	4.26	96.8	-	-	---
FEU 1/FVC	%	82.91	71.03	85.7	-	-	---
PEF	L/M	580.02	390.30	67.3	-	-	---
FEF 25-75	L/S	4.60	3.41	74.2	-	-	---
FIUC	L	5.09	-	-	-	-	-

Testtyp: FVC

Test 1 

Wenn Sie die Schaltfläche **Drucken** wählen, wird der bis zu diesem Zeitpunkt beste Test der aktuellen Testsitzung gedruckt.

Wenn **Interpretation** im Menü **Optionen** ausgewählt ist, wird eine automatische Interpretation der Ergebnisse angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfläche **Interp.** klicken.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen** um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

6. Wiederholen Sie bei Bedarf Schritt 4 um einen weiteren FVC-Test durchzuführen.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden** um den FVC-Test zu beenden.

Sie können einen anderen Test durchführen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken.

Wenn das Dialogfeld **Tests speichern** angezeigt wird (wie dies beim manuellen Speichern von Tests der Fall ist), kann der Benutzer auf **Schlecht**, **Durchschnittlich** oder **Maximum** klicken um den Anstrengungswert zu ändern. Klicken Sie auf die Tests, die gespeichert werden sollen und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Speichern** um die Tests zu speichern.


Tests werden automatisch gespeichert, wenn im Untermenü **Tests speichern** des Menüs **Optionen** die Option **Bester ATS Test**, **Bester ERS Test**, **Beste 3 ATS Tests** oder **Beste 3 ERS Tests** ausgewählt ist.

CCS-Tests durchführen

1. Führen Sie die Schritte im Abschnitt Allgemeine Schritte bei der Durchführung von SVC-, FVC-, CCS-, IVC-, IV- und MVV-Tests aus.
2. Wählen Sie das Menü **Test** aus und wählen Sie daraus die Option **CCS** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **CCS**:



3. Wenn im Menü **Optionen** als Parameter **FRC**, **RV** oder **TLC** ausgewählt sind, wird das folgende Dialogfeld angezeigt.

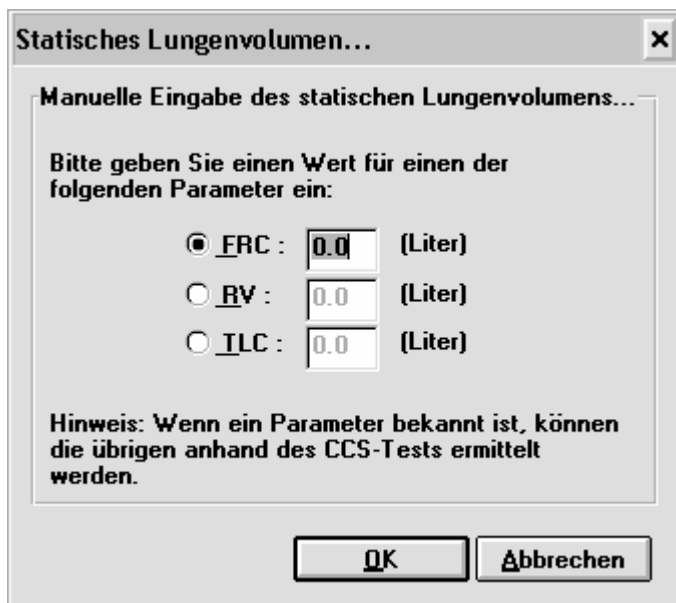

Sie können den Test jederzeit beenden, indem Sie auf die Schaltfläche **CCS** klicken.

4. Warten Sie, bis die Meldung „PUSTEN SIE IN DEN MESSKOPF UM ZU BEGINNEN" am oberen Rand des Diagramms angezeigt wird.
5. Lesen Sie dem Patienten folgende Anweisungen vor um den Test ordnungsgemäß durchzuführen.
 - Befestigen Sie die Klammer auf der Nase
 - Legen Sie den Bakterien-Viren-Filter vorsichtig zwischen die Zähne
 - Schließen Sie ihre Lippen fest um das Mundstück.
 - Atmen Sie normal ein und aus. Das wird als „Ruheatmung" bezeichnet.

Fahren Sie erst fort, wenn Sie sicher sind, dass der Patient eine gleichmäßige "Ruheatmung" erreicht hat.

- Atmen Sie so tief wie möglich ein.

- Atmen Sie so tief und so schnell wie möglich aus (und wenn der Patient völlig ausgeatmet hat:).
- Atmen Sie so schnell wie möglich ganz tief ein.
- (Lassen Sie den Patienten zur Ruheatmung zurückkehren) Atmen Sie wieder normal ein und aus.

Sie werden aufgefordert, den Test zu akzeptieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** um den Test zu akzeptieren, bzw. **Nein** um den Test zu verwerfen.


Wenn das Dialogfeld **Testreferenz eingeben** angezeigt wird, geben Sie eine Referenznummer in das Feld **Testref.** ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vorschau** um die Ergebnisse der einzelnen Testparameter anzuzeigen.

Ein dem folgenden Beispiel ähnliches Dialogfeld wird angezeigt.

Parameter		Normalwert	Vor	%Normal	Nach	%Normal	%Änderung
FUC	L	5.37	3.01	56.1	-	-	--
FEU 1	L	4.43	2.11	47.7	-	-	--
FEU 1/FUC	%	83.01	70.26	84.6	-	-	--
PEF	L/M	582.12	179.60	30.9	-	-	--
FEP 25-75	L/S	4.63	1.70	36.7	-	-	--
FIUC	L	5.12	2.85	55.8	-	-	--
IUC	L	5.37	-	-	-	-	-

Testtyp: CCS

Test 1 

Wenn Sie die Schaltfläche **Drucken** wählen, wird der bis zu diesem Zeitpunkt beste Test der aktuellen Testsitzung gedruckt.

Wenn **Interpretation** im Menü **Optionen** ausgewählt ist, wird eine automatische Interpretation der Ergebnisse angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfläche **Interp.** klicken.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen** um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

8. Wiederholen Sie bei Bedarf Schritt 5 um einen weiteren CCS-Test durchzuführen.
9. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden** um den CCS-Test zu beenden.

NB: Die für einen CCS-Test gespeicherten Daten stammen aus den letzten 30 Testsekunden. Sie können einen anderen Test durchführen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken.

IVC-Tests durchführen

1. Führen Sie die Schritte im Abschnitt Allgemeine Schritte bei der Durchführung von SVC-, FVC-, CCS-, IVC-, IV- und MVV-Tests aus.
2. Wählen Sie das Menü **Test** aus und wählen Sie daraus die Option **IVC** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **IVC**:



Sie können den Test jederzeit beenden, indem Sie auf die Schaltfläche **IVC** klicken.

3. Warten Sie, bis die Meldung „PUSTEN SIE IN DEN MESSKOPF UM ZU BEGINNEN" am oberen Rand des Diagramms angezeigt wird.
4. Lesen Sie dem Patienten folgende Anweisungen vor um den Test ordnungsgemäß durchzuführen.
 - Stehen Sie auf
 - Nehmen Sie das Mundstück in den Mund und halten Sie es mit den Zähnen fest
 - Schließen Sie ihre Lippen fest um das Mundstück.
 - Atmen Sie normal ein und aus. Das ist Ruheatmung.

Wenn Sie sicher sind, dass die Atmung des Patienten ruhig ist, fahren Sie folgendermaßen fort:

- Atmen Sie so tief wie möglich aus.
- Atmen Sie vollständig ein (wie schnell Sie atmen, ist unwichtig) und nach dem Einatmen
- Kehren Sie zur Ruheatmung zurück, d.h. Atmen Sie wieder normal ein und aus.

Sie werden aufgefordert, den Test zu akzeptieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** um den Test zu akzeptieren, bzw. **Nein** um den Test zu verwerfen.

Wenn das Dialogfeld **Testreferenz eingeben** angezeigt wird, geben Sie eine Referenznummer in das Feld **Testref.** ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vorschau** um die Ergebnisse der einzelnen Testparameter anzuzeigen.

Ein dem folgenden Beispiel ähnliches Fenster wird angezeigt.

Parameter		Normalwert	Vor	%Normal	Nach	%Normal	%Änderung
IUC	L	5.35	6.59	123.1	-	-	--

Testtyp: IVC

Schließen Interpretation Drucken

Test 1 █

Wenn Sie die Schaltfläche **Drucken** wählen, wird der bis zu diesem Zeitpunkt beste Test der aktuellen Testsitzung gedruckt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen** um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.


6. Wiederholen Sie bei Bedarf Schritt 4 um einen weiteren IVC-Test durchzuführen.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden** um den IVC-Test zu beenden.

Sie können einen anderen Test durchführen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken.

NB: Die für einen IVC-Test gespeicherten Daten stammen aus den letzten 30 Testsekunden.

IV-Tests durchführen

1. Führen Sie die Schritte im Abschnitt Allgemeine Schritte bei der Durchführung von SVC-, FVC-, CCS-, IVC-, IV- und MVV-Tests aus.
2. Wählen Sie das Menü **Test** aus und wählen Sie daraus die Option **IV** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **IV**:

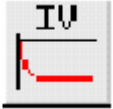

Sie können den Test jederzeit beenden, indem Sie auf die Schaltfläche **IV** klicken.

3. Warten Sie, bis die Meldung „ATMEN SIE EIN, UM ZU BEGINNEN" am oberen Rand des Diagramms angezeigt wird.
4. Lesen Sie dem Patienten folgende Anweisungen vor um den Test ordnungsgemäß durchzuführen.
 - Stehen Sie auf und halten Sie den Messkopf von Ihrem Mund weg.
 - Atmen Sie vollständig aus.
 - Nehmen Sie das Mundstück in den Mund und halten Sie es mit den Zähnen fest.
 - Schließen Sie ihre Lippen fest um das Mundstück.
 - Atmen Sie so tief und so schnell wie möglich ein und versuchen Sie, so lange wie möglich einzuatmen.


Beachten Sie, dass es wichtig ist, den Atem nach dem Einatmen anzuhalten um eine aussagekräftige Messung des BHT-Wertes (BHT = breath hold time = Atemeinhaltezeit) zu erhalten. Anschließend sollte durch den Messkopf ausgeatmet werden.

Sie werden aufgefordert, den Test zu akzeptieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** um den Test zu akzeptieren, bzw. **Nein** um den Test zu verwerfen.

Wenn das Dialogfeld **Testreferenz eingeben** angezeigt wird, geben Sie eine Referenznummer in das Feld **Testref.** ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vorschau** um die Ergebnisse der einzelnen Testparameter anzuzeigen.

Ein dem folgenden Beispiel ähnliches Fenster wird angezeigt.

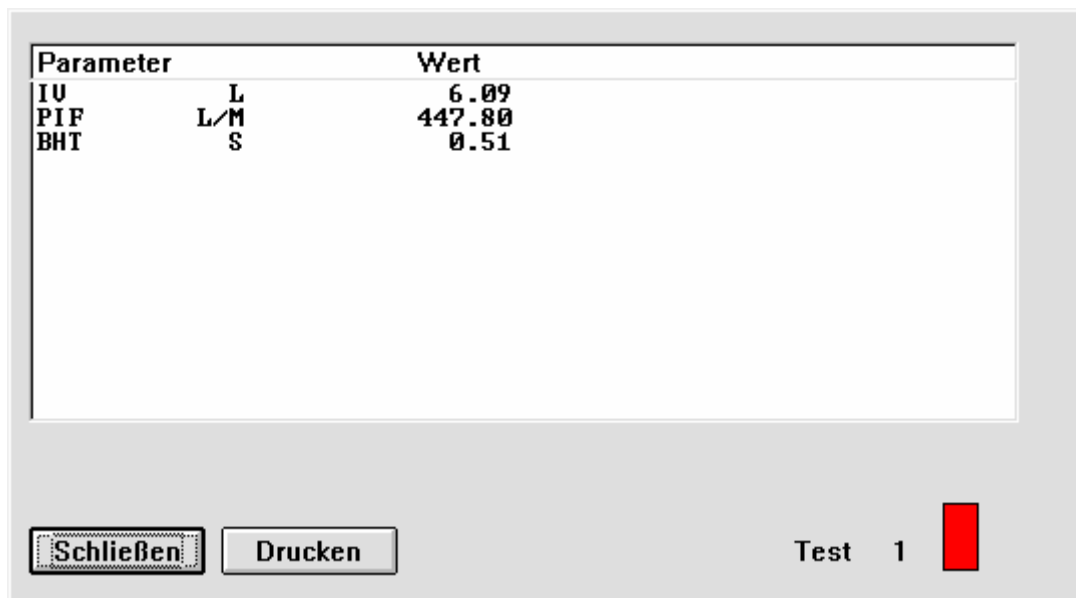

Wenn Sie die Schaltfläche **Drucken** wählen, wird der bis zu diesem Zeitpunkt beste Test der aktuellen Testsitzung gedruckt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen** um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

6. Wiederholen Sie bei Bedarf Schritt 4 um einen weiteren IV-Test durchzuführen.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden** um den IV-Test zu beenden.

Sie können einen anderen Test durchführen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken.

MVV-Tests durchführen

1. Führen Sie die Schritte im Abschnitt Allgemeine Schritte bei der Durchführung von SVC-, FVC-, CCS-, IVC-, IV- und MVV-Tests aus.
2. Wählen Sie das Menü **Test** aus und wählen Sie daraus die Option **MVV** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **MVV**:



Sie können den Test jederzeit beenden, indem Sie auf die Schaltfläche **MVV** klicken.

3. Warten Sie, bis die Meldung „PUSTEN SIE IN DEN MESSKOPF UM ZU BEGINNEN" am oberen Rand des Diagramms angezeigt wird.
4. Lesen Sie dem Patienten folgende Anweisungen vor um den Test ordnungsgemäß durchzuführen. Für MVV-Tests wird die Verwendung einer Nasenklammer empfohlen.
 - Stehen Sie auf.
 - Nehmen Sie das Mundstück in den Mund und halten Sie es mit den Zähnen fest.
 - Schließen Sie ihre Lippen fest um das Mundstück.
 - Atmen Sie so tief und so schnell wie möglich ein und aus.

Drücken Sie die Leertaste, wenn der Patient mit dem Ein- und Ausatmen beginnt um die Aufzeichnung zu starten.

Nach Beendigung des Tests werden Sie aufgefordert, den Test zu akzeptieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** um den Test zu akzeptieren, bzw. **Nein** um den Test zu verwerfen. Wird der Test angenommen, wird die Sitzung beendet.

Wenn das Dialogfeld **Testreferenz eingeben** angezeigt wird, geben Sie eine Referenznummer in das Feld **Testref.** ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

ATS-Wellenformen anzeigen

ATS-Wellenformen können zur Simulation der Ergebnisse von FVC-Tests angezeigt werden. Sie wählen dabei Werte auf dem Bildschirm aus, anstatt physiologische Tests durchzuführen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät im Untermenü **Gerät** des Menüs **Optionen** auf **ATS-Wellenformen** eingestellt ist.
2. Wählen Sie im Menü **Patient** die Option **Überprüfen**. (Es ist unwahrscheinlich, dass der Benutzer diese Tests speichern möchte).

Geben Sie die relevanten Patientendaten ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

3. Wählen Sie das Menü **Test** aus und wählen Sie daraus die Option **FVC** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **FVC**.



Wenn das Dialogfeld **Besuchsreferenz eingeben** angezeigt wird, geben Sie eine Referenznummer in das Feld **Besuchsref.** ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

4. Wählen Sie das Menü **Test** aus und wählen Sie daraus die Option **ATS**.
5. Klicken Sie auf die für den Test erforderliche Wellenformnummer. Der ATS-Test wird daraufhin ausgeführt.

Post-Tests

Wählen Sie das Menü **Test** und wählen Sie die Option **Post-Test** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Post**.



Wenn nicht bereits ein Patient ausgewählt ist, wird der Bildschirm **Patient von der Datenbank abrufen** angezeigt. Wählen Sie den Patienten aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**. Die Tests werden von der Datenbank geladen und der letzte Test des Patienten ist hervorgehoben.

Lesen Sie im Abschnitt zum entsprechenden Test nach und fahren Sie wie gewohnt fort.

Post-Tests sind für IV-Tests nicht verfügbar.

Schnellspeichern


Die Schnellspeicherfunktion ist besonders dann nützlich, wenn mehrere Patienten in einer kurzen Zeitspanne getestet werden und dabei zwischen Patienten hin- und hergewechselt wird. Maximal 20 Patienten können gleichzeitig schnellgespeichert werden.

So können Sie einen Patienten schnellspeichern:

1. Wechseln Sie zum Hauptbildschirm. Wenn gerade ein Test durchgeführt wird, müssen Sie auf das entsprechende Symbol klicken (wenn z. B. ein FVC-Test durchgeführt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **FVC**) um den Test zu beenden.
2. Wählen Sie das Menü **Patient** aus und wählen Sie daraus die Option **Schnellspeichern** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Schnellspeichern**:



Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

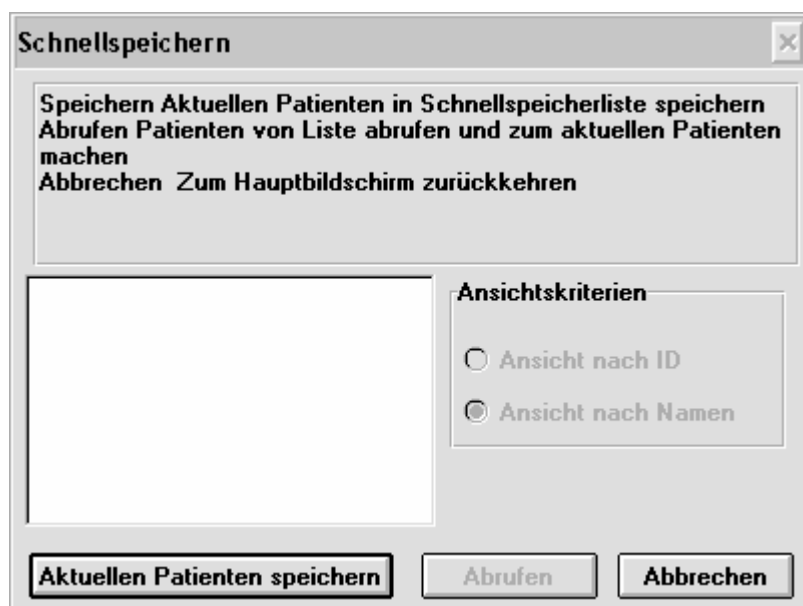


3. Sie können den aktuellen Patienten schnellspeichern, indem Sie auf die Schaltfläche **Aktuellen Patienten speichern** klicken.
4. Ein anderer Patient kann nun für einen Test ausgewählt werden

5. Wenn Sie wieder zum ersten Patienten zurückkehren müssen, wählen Sie das Menü **Patient** aus und wählen Sie die Option **Schnellspeichern** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Schnellspeichern**.



Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

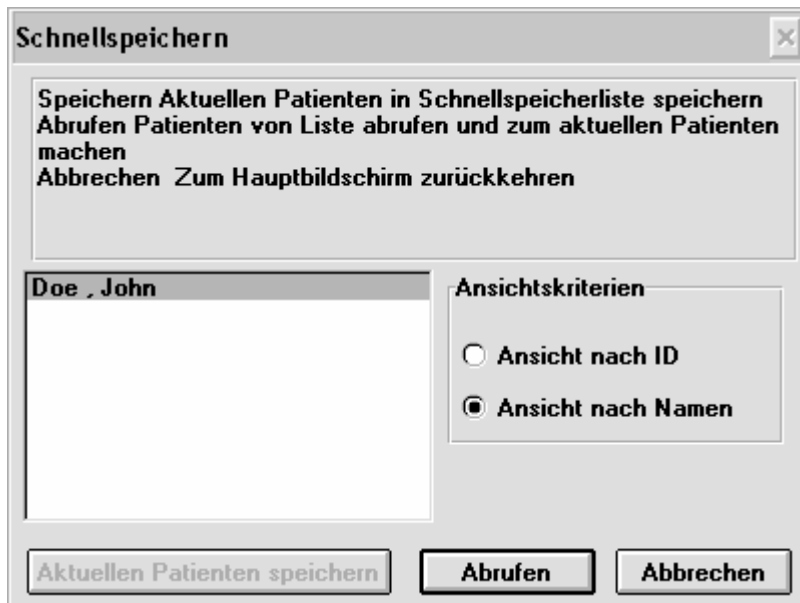

6. Sie können nun den zweiten Patienten schnellspeichern (falls Sie bald wieder zu ihm zurückkehren müssen), indem Sie auf die Schaltfläche **Aktuellen Patienten speichern** klicken.

Der erste Patient kann abgerufen werden, indem Sie auf die Schaltfläche **Abrufen** klicken.

7. Sie können nun mit dem ersten Patienten fortfahren.

BELASTUNGSTESTS

Dieses Kapitel beschreibt die Schritte zur Durchführung von Belastungstests.

Einen neuen Belastungstest durchführen

1. Stellen Sie sicher, dass die Felder **Testdatum**, **Testzeit** und **Besuchsref.** im Untermenü **Parameter** des Menüs **Optionen** wie gewünscht ausgewählt sind.
2. Wählen Sie einen Patienten.
3. Wählen Sie das Menü **Test** aus und wählen Sie die Option **Belastungstest** und anschließend **Neuer Belastungstest**.

Wenn das Fenster **Besuchsreferenz eingeben** angezeigt wird, geben Sie eine Referenznummer in das Feld **Besuchsref.** ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

Belastungstest-Design: Allgemein

Grundlegende Informationen

Bronchialverengendes Mittel

Parameter

Erwarteter prozentualer Rückgang von (z. B. 20)

Verdünnungsmitteltest durchführen

Bei langsamem Teststart Warnung anzeigen.

Dosis aufzeichnen als

Dosis

Konzentration

Zeit

Bester Test

Bedienungsperson wählt besten Test aus

Automatisch höchstes Ergebnis verwenden

Dieses ist das erste von drei Dialogfeldern, mit denen die Durchführung des Belastungstests festgelegt wird.

4. Wählen Sie das entsprechende Mittel im Listenfeld **Bronchialverengendes Mittel** oder fügen Sie ein neues Mittel hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche **Liste bearbeiten** klicken. Dieses Feld muss einen Eintrag erhalten.
5. Wählen Sie den zu messenden Parameter im Listenfeld **Parameter** aus. Dieses Feld muss einen Eintrag erhalten.
6. Wenn die Vorgabe nicht zutrifft, geben Sie den erwarteten prozentualen Rückgang im Ergebnis in Relation zum Vergleichstestergebnis ein.

7. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Verdünnungsmitteltest durchführen** um einen Kontrolltest mit einem Verdünnungsmittel durchzuführen.

Beachten Sie, dass immer ein Vergleichstest durchgeführt werden muss, während der Verdünnungsmitteltest optional ist. Der Benutzer kann auch einen Verdünnungsmitteltest als Vergleichstest verwenden. Markieren Sie in diesem Fall das Kontrollkästchen **Verdünnungsmitteltest durchführen** nicht.

8. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Bei langsamem Teststart Warnung anzeigen**, wenn diese Meldung bei der Durchführung des Tests angezeigt werden soll.
9. Klicken Sie auf das Optionsfeld **Dosis oder Konzentration**, wenn ein Mittel verabreicht wird oder klicken Sie auf das Optionsfeld **Zeit**, wenn der Patient während der Durchführung des Tests einem Mittel konstant ausgesetzt wird.
10. Klicken Sie auf das Optionsfeld **Bedienungsperson wählt besten Test aus** oder **Automatisch höchstes Ergebnis verwenden** um anzugeben, wie die besten Tests ausgewählt werden.
11. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Wenn der Benutzer in Schritt 9 das Optionsfeld **Dosis oder Konzentration** gewählt hat, wird das folgende Dialogfeld angezeigt und der Benutzer sollte mit Schritt 12 fortfahren.

Dosis/Reaktion-Kurvenoptionen

X-Achse

X-Achsen-Werte können im Bereich zwischen 0.0001 und 1000 eingegeben werden. Wählen Sie einen Satz von Einheiten aus, so daß alle Dosierungen in diesen Bereich fallen.

Einheiten

Linear

Log. (Basis 10)

Log. (doppelte Dosierung)

Y-Achse

Optionen

Dosierungen sind kumulativ


Vergleichstest auf Diagramm zeigen

Verdünnungsmitteltest auf Diagramm zeigen

Ziellinie auf Diagramm zeigen


Erwarteten Schnittpunkt auf Diagramm anzeigen

Wenn der Benutzer in Schritt 3 das Optionsfeld **Zeit** gewählt hat, wird das folgende Fenster angezeigt.

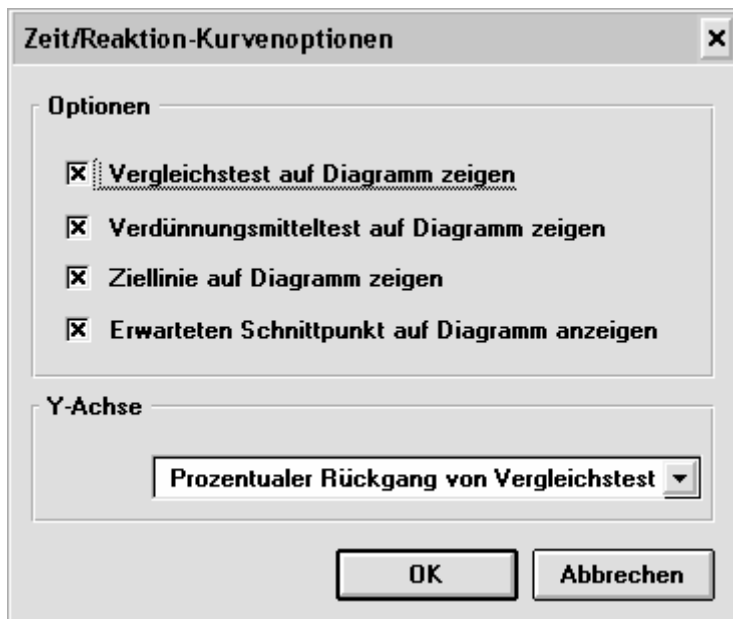

12. Befolgen Sie diese Schritte um im Bildschirm **Dosis/Reaktion-Kurve** Einträge einzugeben.

- Wählen Sie die entsprechenden X-Achsen-Einheiten aus der Liste aus oder fügen Sie eine neue Einheit hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche **Liste bearbeiten** klicken. Andere Einheiten können im Bedarfsfall zur Liste hinzugefügt werden, indem Sie auf die Schaltfläche **List bearbeiten** klicken um das folgende Dialogfeld anzuzeigen.

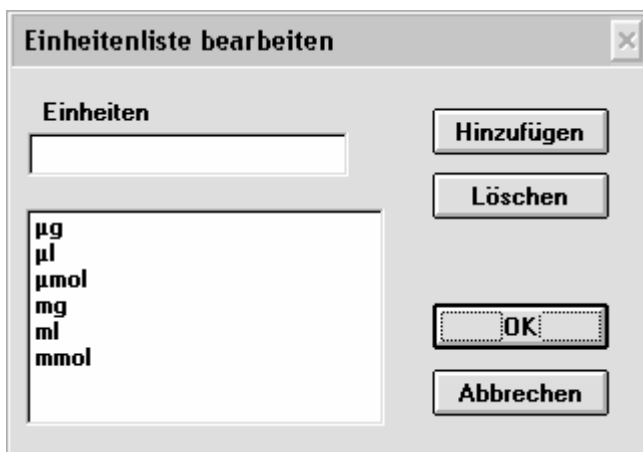


- Klicken Sie auf das Optionsfeld **Linear**, **Log (Basis 10)** oder **Log (doppelte Dosierung)** um anzugeben, ob die X-Achse linear oder logarithmisch sein soll.
- Wählen Sie die entsprechenden Y-Achsen-Einheiten aus der Liste aus.
- Markieren Sie im Bereich **Optionen** die erforderlichen Kontrollkästchen.

(Dosierungen können je nach dem verwendeten Mittel kumulativ sein. Histamin zum Beispiel besitzt einen kumulativen Effekt.)

Vergleichstest auf Diagramm zeigen, Verdünnungsmitteltest auf Diagramm zeigen, Ziellinie auf Diagramm zeigen: Die Ergebnisse werden auf dem Diagramm angezeigt.


13. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

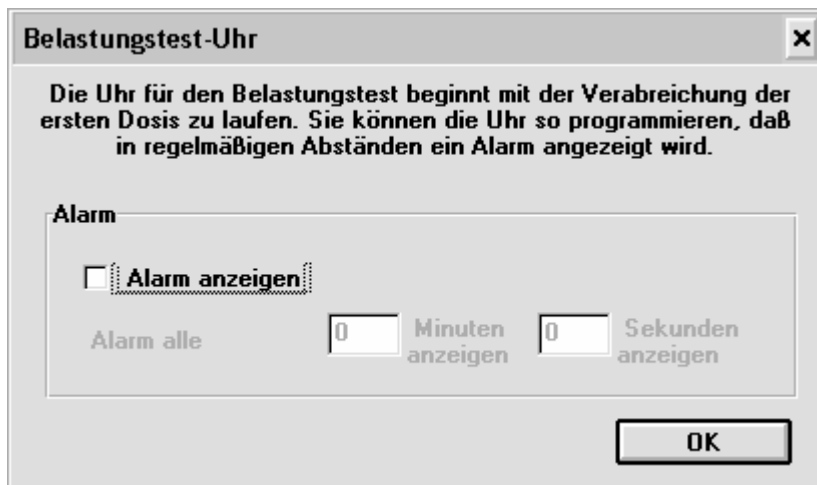

14. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Alarm anzeigen**, wenn nach Verabreichung der ersten Dosis ein Alarm zu festgelegten Intervallen erfolgen soll.

Wenn das Kontrollkästchen **Alarm anzeigen** markiert wurde, müssen Sie die entsprechenden Einträge in die Felder **Minuten anzeigen** und **Sekunden anzeigen** eingeben.

15. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

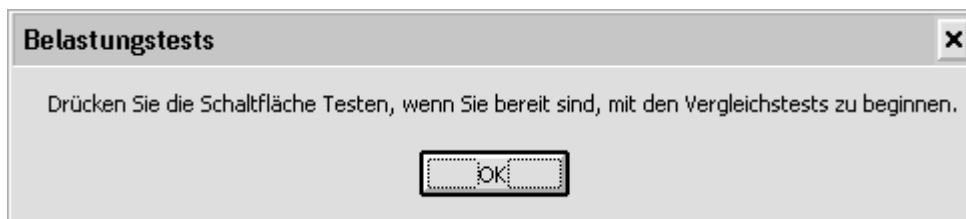

16. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, wenn Sie bereit sind, den Vergleichstest durchzuführen.
17. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Test**.



18. Warten Sie, bis die Meldung „PUSTEN SIE IN DEN MESSKOPF UM ZU BEGINNEN“ am oberen Rand des Diagramms angezeigt wird.

19. Lesen Sie dem Patienten folgende Anweisungen vor um den Test ordnungsgemäß durchzuführen.

- Stehen Sie auf.
- Halten Sie den Messkopf von Ihrem Mund weg.
- Atmen Sie so tief wie möglich ein. Nehmen Sie nun das Mundstück in den Mund und halten Sie es mit den Zähnen fest
- Schließen Sie ihre Lippen fest um das Mundstück.
- Atmen Sie so tief und so schnell wie möglich aus und versuchen Sie, mindestens 6 Sekunden lang auszuatmen.

Bei Verwendung des FEV1-Parameters kann der Patient das Ausatmen nach 1-2 Sekunden beenden. Bei Verwendung des PEF-Parameters kann der Patient das Ausatmen nach einem PEF-Vorgang beenden..


Durch Klicken auf die Schaltfläche **Vorschau** können die Testergebnisse angezeigt werden.



20. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden**.




Der folgende Bildschirm wird angezeigt, wenn in Schritt 10 das Optionsfeld **Bedienungsperson wählt besten Test aus** gewählt wurde. Wählen Sie den gewünschten Test aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

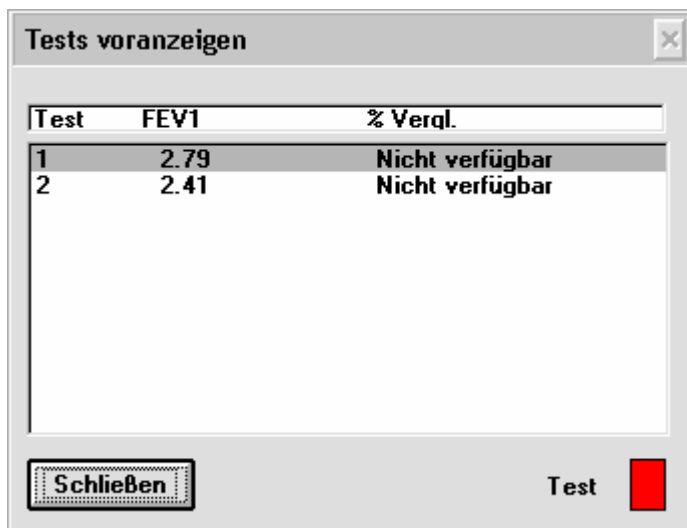

Führen Sie nun einen Verdünnungsmitteltest durch, wenn Sie in Schritt 7 diese Option gewählt haben. Falls Sie keinen Verdünnungsmitteltest durchführen, fahren Sie mit Schritt 21 fort.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK** um mit dem Verdünnungsmitteltest zu beginnen
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Dosis**.

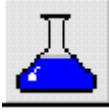


- Klicken Sie auf die Schaltfläche **JETZT!**, wenn das Verdünnungsmittel verabreicht wurde.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, wenn Sie bereit sind, den Test durchzuführen.
- Wiederholen Sie die Schritte 17 und 18 um den Verdünnungsmitteltest durchzuführen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden**.




21. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, wenn Sie bereit sind, den Test durchzuführen.

Wenn der Benutzer in Schritt 3 das Optionsfeld **Zeit** gewählt hat, wird das folgende Fenster angezeigt.

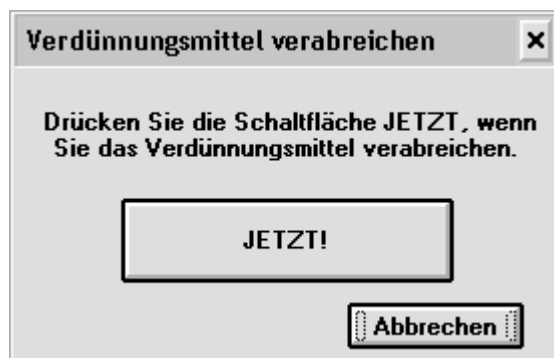

Klicken Sie auf die Schaltfläche **JETZT!** und fahren Sie mit Schritt 25 fort.

22. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Dosis**. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

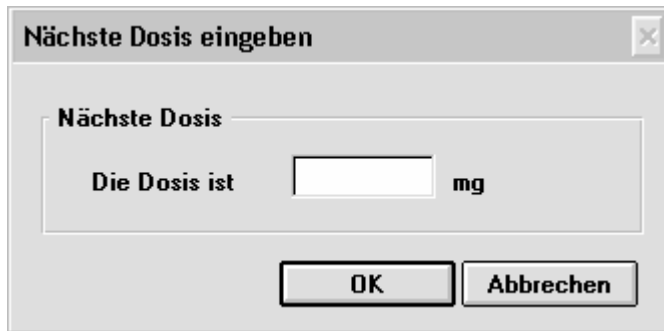

Nächste Dosis eingeben


Nächste Dosis

Die Dosis ist mg

OK Abbrechen

23. Geben Sie die zu verabreichende Dosis ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**. Ein dem folgenden Beispiel ähnliches Dialogfeld wird angezeigt.

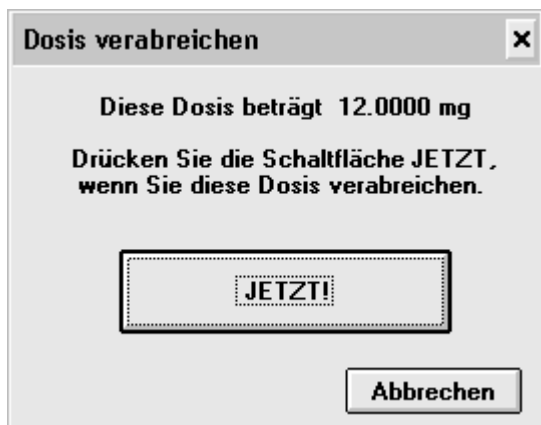

Dosis verabreichen

Diese Dosis beträgt 12.0000 mg

Drücken Sie die Schaltfläche **JETZT**,
wenn Sie diese Dosis verabreichen.

JETZT!

Abbrechen


24. Klicken Sie nach Verabreichen der Dosis auf die Schaltfläche **JETZT**.

25. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, wenn Sie bereit sind, mit dem Test zu beginnen.


26. Klicken Sie nach dem Beenden des Tests auf die Schaltfläche **Beenden**.



Die Reaktionskurve wird auf einem dem folgenden Beispiel ähnlichen Bildschirm angezeigt.

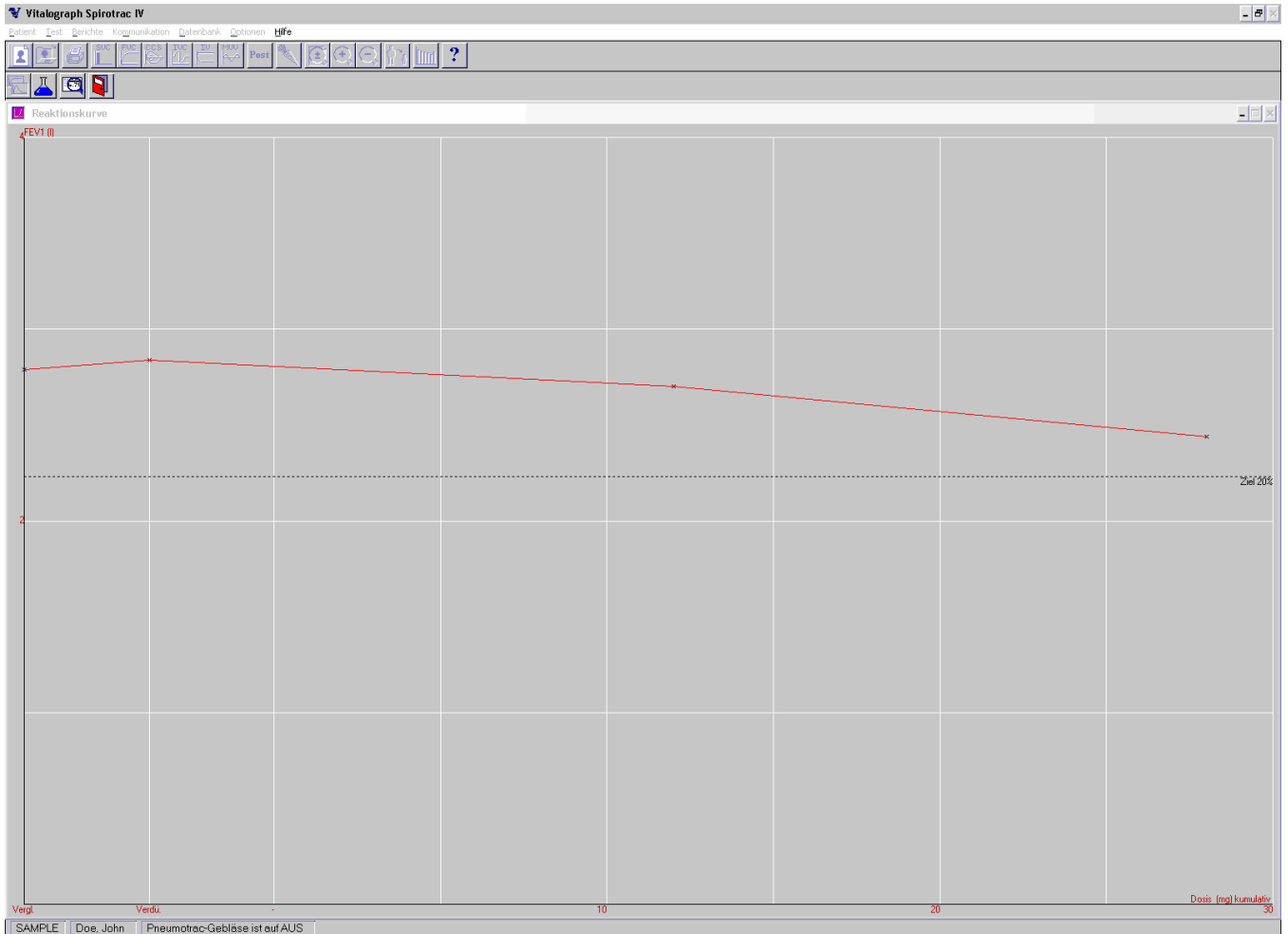

27. Wiederholen Sie Schritt 17 und 18 zur Durchführung des Tests, bis ein dem folgenden Beispiel ähnliches Dialogfeld angezeigt wird, das meldet, dass der Zielwert erreicht wurde.

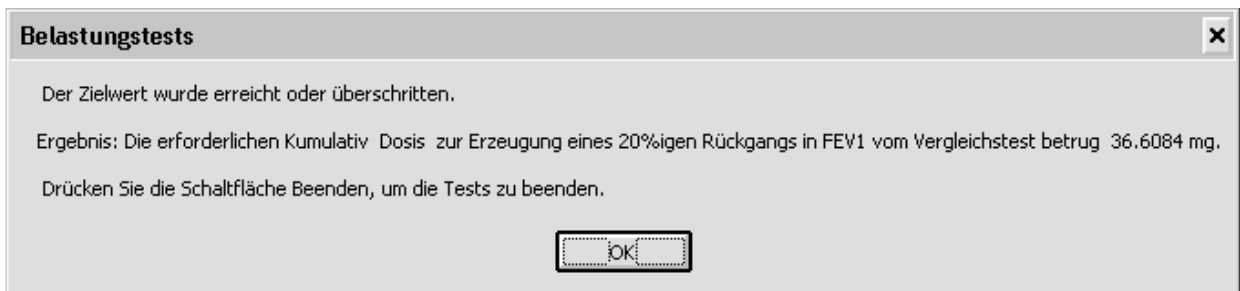

Beachten Sie, dass der Test auch beendet werden kann, ohne dass der Zielwert erreicht wurde.

28. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden** um die Durchführung des Tests zu beenden.



Einen Vergleichstest für Belastungstests abrufen

Wählen Sie im Menü **Test** die Option **Belastungstest abrufen** um einen Belastungstest nach einer Unterbrechung (etwa nach Abwarten, bis die Wirkung eines verabreichten Mittels einsetzt) erneut zu starten. Der Bildschirm **Patient abrufen** wird angezeigt (wenn der Patient nicht der aktuelle Patient ist). Wählen Sie einen Patienten aus um den Vergleichstest zu laden und fahren Sie wie gewohnt fort.

Zuvor gespeicherte Belastungstests anzeigen

Wählen Sie im Menü **Test** die Option **Vorherigen Belastungstest anzeigen** um Belastungstests von der Datenbank abzurufen. Der Bildschirm **Patient abrufen** wird angezeigt (wenn der Patient nicht der aktuelle Patient ist). Wählen Sie einen Patienten aus um alle vorherigen Tests des ausgewählten Patienten zu laden.

Massentests

Wenn dieses Produkt für spezielle Schnelltests, d. h. Hunderte von Tests pro Tag, eingesetzt wird, sind in Bezug auf den Messkopf bestimmte Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Nach einem Test verbleiben zerstäubte Wasserdampftröpfchen noch bis zu zehn Minuten lang in den Spirometriegeräten (vgl.: Hiebert et al, Contaminated Aerosol Recovery from Pulmonary Function Testing Equipment, Am J Respir Crit Care Med 1999, 159, 610-612.).

Aus diesem Grund sollten zwei Vorkehrungen getroffen werden:

1. Verwenden Sie für jeden Patienten einen neuen Bakterien-Viren-Filter. Erneuern Sie den Filter auch nach jeweils zehn Ausatmungen, wenn an einem Patienten mehrere Tests durchgeführt werden.
2. Wechseln Sie den Messkopf alle zwei Stunden oder 100 Ausatmungen aus, je nachdem, was zuerst eintritt. Reinigen und desinfizieren Sie den Messkopf gemäß der Anleitung im Benutzerhandbuch, bevor Sie ihn wieder am Gerät anbringen [oder schalten Sie den Lüfter ein, soweit Sie einen verwenden (Pneumotrac, 2120 mit BS)].

BERICHTE DRUCKEN

Einen aktiven oder abgerufenen Bericht drucken

Zum Drucken von Berichten stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Das Anzeigen kann entweder unmittelbar nach der Testdurchführung erfolgen, wenn die für einen bestimmten Patienten durchgeführten Tests noch aktiv sind (d.h. bevor ein anderer Patient der aktuelle Patient im System wird) oder dadurch, dass früher mit einem Patienten durchgeführte Tests abgerufen werden.

Einen Bericht für aktive Tests drucken


Aktive Tests können unmittelbar nach der Testdurchführung gedruckt werden, indem Sie zunächst auf die Schaltfläche **Vorschau** und anschließend auf die Schaltfläche **Drucken** im Testbildschirm klicken.

Einen Bericht für abgerufene Tests drucken

1. Wählen Sie das Menü **Berichte** und anschließend das Untermenü **Berichtstyp**. Informationen zum Anpassen von Berichten finden Sie unter Berichtsoptionen.
2. Wählen Sie den gewünschten Berichtstyp aus.
3. Wählen Sie einen Patienten, für den Tests gedruckt werden sollen.
4. Wählen Sie das Menü **Berichte** aus und wählen Sie die Option **Drucken** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Drucken**:




Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

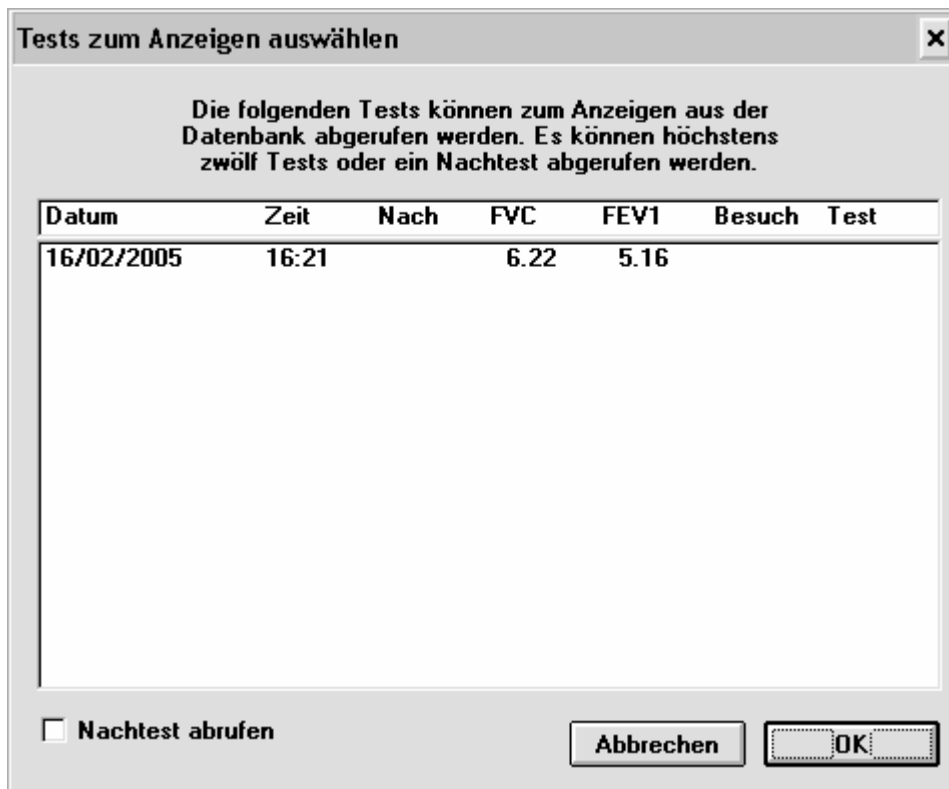

- Wählen Sie die Tests aus, die gedruckt werden sollen und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Wenn Post-Tests mit den verbundenen Vortests benötigt werden, klicken Sie auf **Post-Test abrufen** für die entsprechende Testliste.

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

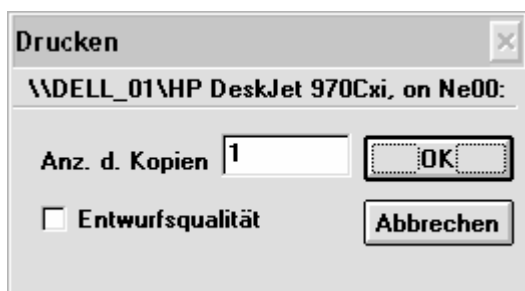

- Geben Sie die Anzahl von Berichtskopien ein, die gedruckt werden sollen.
- Markieren Sie gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Entwurfqualität**.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK** und der Bericht wird gedruckt.

Auf einer Seite können maximal drei Ergebnissätze gedruckt werden.

Stapeldrucken

Befolgen Sie diese Schritte um Berichte im Stapel zu drucken.

1. Wählen Sie das Menü **Berichte** und wählen Sie den Befehl **Stapeldruck**.

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

Stapelausdrucksoptionen

Letzter Stapelausdruck: <Keine>

Berichte

FVC-Tests
 Drucken Zu verwendender Bericht
[Dropdown]

CCS-Tests
 Drucken Zu verwendender Bericht
[Dropdown]

MVV-Tests
 Drucken Zu verwendender Bericht
[Dropdown]

Einatmungstests
 Drucken Zu verwendender Bericht
[Dropdown]

Alle Tests ausdrucken:

Zu einem bestimmten Datum

Nach einem bestimmten Datum

Seit dem letzten Stapelausdruck

Datum

Tag Monat Jahr

[Abbrechen]

[Start]

Informationen zum Anpassen von Berichten finden Sie unter Berichtsoptionen.

2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Drucken** im Bereich **FVC-Tests**, falls FVC-Berichte gedruckt werden sollen und wählen Sie anschließend den gewünschten FVC-Berichtstyp aus.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Drucken** im Bereich **MVV-Tests**, falls MVV-Berichte gedruckt werden sollen und wählen Sie anschließend den gewünschten MVV-Berichtstyp aus.
4. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Drucken** im Bereich **CCS-Tests**, falls CCS-Berichte gedruckt werden sollen und wählen Sie anschließend den gewünschten CCS-Berichtstyp aus.
5. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Drucken** im Bereich **Einatmungstests**, falls Einatmungsberichte gedruckt werden sollen und wählen Sie anschließend den gewünschten Einatmungsberichtstyp aus.
6. Klicken Sie auf das Optionsfeld **Zu einem bestimmten Datum** oder **Nach einem bestimmten Datum** oder **Seit dem letzten Stapelausdruck**.
7. Geben Sie ein Datum in die Felder **Tag**, **Monat** und **Jahr** ein.

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Stapeldruck starten**.

Die Tests werden auf dem Bericht nach der Besuchsreferenznummer und dem Testalter angeordnet. Der Ausdruck sieht somit so aus, als sei der Bericht am Ende einer Testsitzung gedruckt worden.

Einen Farbdrucker verwenden


Werden farbige Ausdrücke auf einem Farbdrucker benötigt, wählen Sie die Option **Farbdrucker verwenden** im Menü **Berichte**. Es ist wichtig, dass auf Ihrem Computer die aktuellsten Druckertreiber installiert sind. Diese sind im Lieferumfang des Druckers enthalten.

TRENDERSTELLUNGSERGEBNISSE

1. Wählen Sie einen aktuellen Patienten.
2. Wählen Sie das Menü **Test** aus und wählen Sie die Option **Trend** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Trend**.



Ein dem folgenden Beispiel ähnliches Dialogfeld wird angezeigt, in dem die Tests aufgeführt sind, die zur Trenderstellung verwendet werden können.

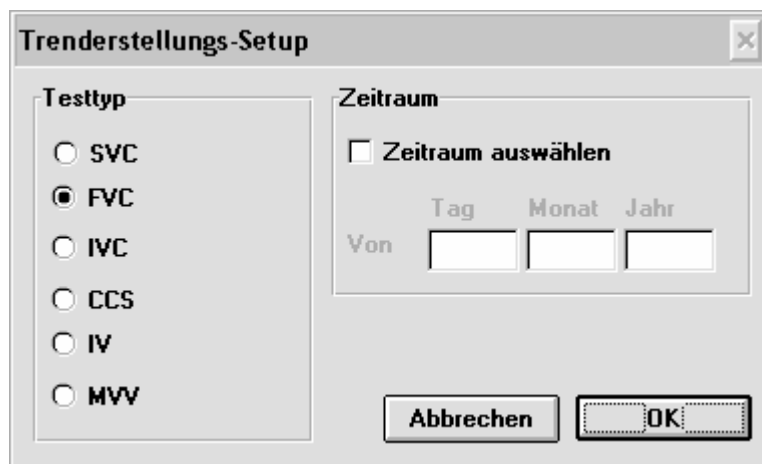

Trenderstellungs-Setup

Testtyp

- SVC
- FVC
- IVC
- CCS
- IV
- MVV

Zeitraum


Zeitraum auswählen

Von Tag Monat Jahr

Wählen Sie den Testtyp aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zeitraum auswählen** und geben Sie gegebenenfalls das gewünschte Datum ein (ab dem die Tests geladen werden sollen). Andernfalls werden alle Testergebnisse geladen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Wählen Sie im folgenden Dialogfeld die Tests für die Trenderstellung aus.

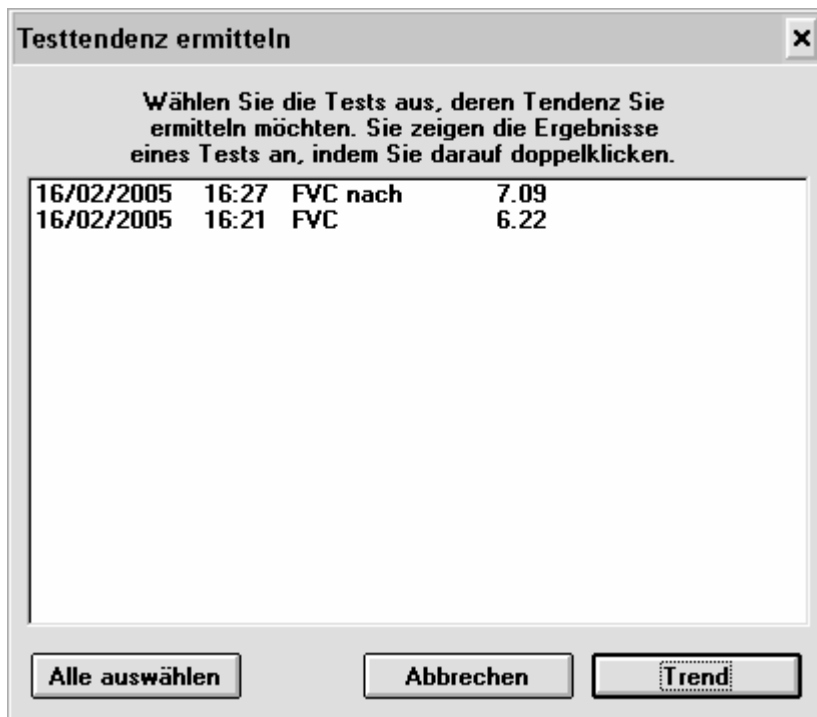

Hier sind alle mit dem Patienten durchgeführten Tests aufgelistet. Sie sind nach Datum und Zeit sortiert, wobei sich der neueste Test oben auf der Liste befindet.

Wenn Sie auf einen Test doppelklicken, werden Details zu den mit diesem Test verbundenen Parametern angezeigt. Ein dem folgenden Beispiel für FVC-Tests ähnliches Dialogfeld wird angezeigt.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Drucken** um einen Bericht zu drucken, in dem die Testparameter aufgelistet sind.


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig** um zum vorherigen Dialogfeld zurückzukehren.

3. Wählen Sie die Tests aus, für die ein Trend erstellt werden soll, indem Sie entweder auf mindestens zwei einzelne Tests klicken oder indem Sie auf die Schaltfläche **Alle**

auswählen klicken um alle Tests auszuwählen. (Beachten Sie, dass die Auswahl eines ausgewählten Tests wieder aufgehoben wird, wenn Sie darauf klicken).

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Trend**.

Ein dem folgenden Beispiel ähnliches Dialogfeld wird angezeigt, in dem der Trend eines Parameters in Relation zum Datum dargestellt ist.

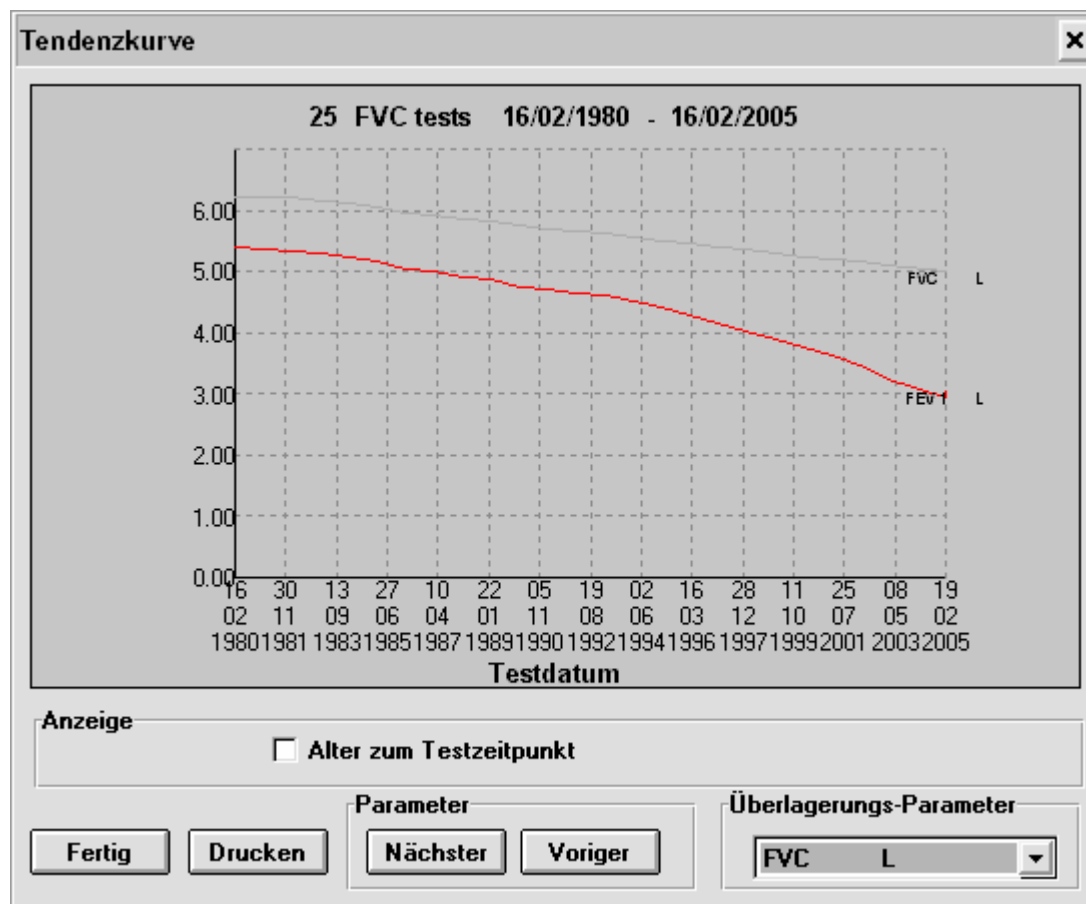

Klicken Sie auf einen beliebigen Überlagerungs-Parameter, für den ein Trend erstellt werden soll um ihn auf dem Diagramm anzuzeigen. Sie können auch auf die Schaltflächen **Nächster** bzw. **Voriger** klicken um den aktuellen Parameter durch den nächsten in der Liste zu ersetzen. Die verfügbaren Parameter hängen von den Einstellungen unter Parameter im Menü **Optionen** ab. Der Benutzer kann auch Trends für Größe und Gewicht erstellen.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Alter zum Testzeitpunkt** klicken, wird das Testdatum auf der X-Achse durch das Alter des Patienten ersetzt (wenn z.B. ein Trend für jährliche Untersuchungen erstellt werden soll).

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Drucken** um einen Bericht zu drucken. Daraufhin wird der normale Windows-Druckbildschirm angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK** um den Bericht zu drucken.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig** und die Schaltfläche **Abbrechen**, wenn die Trenderstellung beendet ist.

Aktive oder abgerufene Testergebnisse anzeigen

Zum Anzeigen von Ergebnissen stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Das Anzeigen kann entweder unmittelbar nach der Testdurchführung erfolgen, wenn die für einen bestimmten Patienten durchgeführten Tests noch aktiv sind (d.h. bevor ein anderer Patient der aktuelle Patient im System wird) oder dadurch, dass früher mit einem Patienten durchgeführte Tests abgerufen werden.

Ergebnisse für aktive Tests anzeigen

Aktive Tests können unmittelbar nach der Testdurchführung angezeigt werden, indem Sie einfach auf die Schaltfläche **Vorschau** klicken. Die angezeigten Parameter hängen davon ab, welche Parameter im Menü **Optionen** ausgewählt wurden.

Ergebnisse für abgerufene Tests anzeigen

1. Wählen Sie das Menü **Test** aus und anschließend das Untermenü **Tests anzeigen**.
2. Wählen Sie einen Patienten, dessen Tests angezeigt werden sollen.
3. Wählen Sie den gewünschten Testtyp aus – SVC, FVC, CCS, IVC, IV oder MVV.

Tests zum Anzeigen auswählen

Die folgenden Tests können zum Anzeigen aus der Datenbank abgerufen werden. Es können höchstens zwölf Tests oder ein Nachtest abgerufen werden.

Datum	Zeit	Nach	FVC	FEV1	Besuch	Test
16/02/1998	16:21		6.22	5.16		
07/11/2005	11:15		2.81	2.49		

Nachtest abrufen

Abbrechen OK

4. Wählen Sie einen oder mehrere Tests aus, die angezeigt werden sollen und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
5. Die Ergebnisse können durch Klicken auf das Symbol **Vorschau** angezeigt werden.
6. Klicken Sie auf das Testsymbol (in obigem Beispiel **FVC**) um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

GEBLÄSEBETRIEB (NUR VITALOGRAPH PNEUMOTRAC)

Aus Hygienegründen wird der Vitalograph Pneumotrac mit einem kleinen Sauggebläse geliefert, das jegliche Feuchtigkeitsreste aus dem Atmungskreis des Messkopfes entfernt um das Entstehen von Mikroorganismen zu verhindern. Daher wird empfohlen, den Messkopf vor Gebrauch durch den nächsten Patienten anzudocken. Das Gebläse läuft dann etwa 30 Sekunden lang.

Das Gebläse wird von dem Spirotrac-Softwareprogramm gesteuert. Nach Beendigung der Tests (bei der Rückkehr zum Hauptbildschirm), schaltet sich das Gebläse für die Dauer von 30 Sekunden ein.

Wenn Sie bei laufendem Gebläse einen Testbildschirm aufrufen, schaltet Spirotrac das Gebläse ab. Spirotrac wartet einige Sekunden, bis das Gebläse zum Stillstand gekommen ist. Das Gebläse funktioniert bei allen Testtypen ähnlich, außer beim IV-Test. Bei der Durchführung von IV-Tests ist das Gebläse immer deaktiviert.

Gebläseatterie

Ihr Gebläse funktioniert, so lange eine funktionsfähige PP3-Batterie ins Gerät eingelegt ist. Das Batteriefach befindet sich unter dem Pneumotrac-Gerät. Zum Auswechseln der Batterie führen Sie bitte folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Entfernen Sie die alte Batterie mit Hilfe des Bandes.
3. Legen Sie die neue Batterie mit dem Etikett nach unten ein und vergewissern Sie sich, dass die Pole korrekt ausgerichtet sind, d.h. + zu +.
4. Schließen Sie das Batteriefach.

KOMMUNIKATION MIT DEM VITALOGRAPH 2120 UND GOLD STANDARD PLUS

Den Vitalograph 2120 und Gold Standard Plus in den Remote-Modus setzen

Bevor der Computer und der Vitalograph 2120 bzw. Vitalograph Gold Standard Plus die Kommunikation miteinander aufnehmen können, muss sich das Gerät im Remote-Modus befinden. Dazu muss es eingeschaltet werden. Wird der hier abgebildete Hauptmenübildschirm angezeigt, schaltet das Gerät automatisch in den Remote-Modus, wenn die Spirotrac IV-Software Informationen an den Vitalograph 2120 oder Vitalograph Gold Standard Plus sendet.

```
> PATIENT   LOESCHEN
   TEST     SETUP
   DRUCKEN  ANZEIGEN
   POST     KALIB'N
```

Tests durchführen

Anstelle des Fleisch-Messkopfes oder des S-Modells können der Vitalograph 2120 BZW: Gold Standard Plus zum Durchführen von Tests verwendet werden. Das Spirometer 2120 bzw. Gold Standard Plus muss mit dem Computer verbunden und für den Remote-Modus bereit sein, d.h. das Hauptmenü muss angezeigt sein. Weitere Informationen zum Durchführen von Tests finden Sie im Abschnitt Tests durchführen.

Patientendaten vom Computer an den 2120 bzw. Gold Standard Plus senden

Befolgen Sie diese Schritte um Patientendaten von Spirotrac IV an den Vitalograph 2120 bzw. Gold Standard Plus zu senden.

1. Wählen Sie das Menü **Kommunikation** und anschließend das Untermenü **Patient(en) senden**.

Patientendaten an Externes Gerät Senden

Wählen Sie einen oder mehrere Patienten aus der Liste aus, um ihre Daten an das externe Gerät zu senden.

Patient	Geburtstag
JOHN_DOE	01/01/1970
JOHN_TREND	01/01/1960

Suchkriterien

Suche nach ID
 Suche nach Name

Alle auswählen

Abbrechen

Übertragen

2. Wählen Sie einen Patienten aus, dessen Daten an den Vitalograph 2120 bzw. Gold Standard Plus gesendet werden sollen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übertragen**. Die Patientendaten werden nun an den Vitalograph 2120 bzw. Gold Standard Plus gesendet.


Tests vom Vitalograph 2120 bzw. Gold Standard Plus auf den Computer herunterladen

Befolgen Sie diese Schritte um Tests vom Vitalograph 2120 bzw. Gold Standard Plus auf den Computer herunterzuladen:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät für den Remote-Modus bereit ist.
2. Wählen Sie das Menü **Kommunikation** und anschließend das Untermenü **Tests laden**.

Die Ergebnisse können vom Vitalograph 2120 bzw. Gold Standard Plus zu Spirotrac IV verschoben, d.h. anschließend auf dem 2120 bzw. Gold Standard Plus gelöscht werden. Wählen Sie in diesem Fall die Option **Laden und löschen**.

Die Ergebnisse können auch vom Vitalograph 2120 bzw. Gold Standard Plus zu Spirotrac IV kopiert werden, so dass sie auf dem 2120 bzw. Gold Standard Plus verbleiben. Wählen Sie in diesem Fall die Option **Laden ohne zu löschen**.

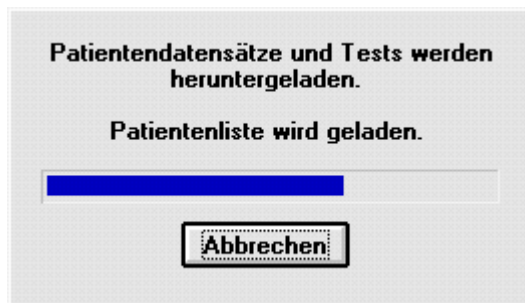

3. Patienten und Ergebnisse werden in die Spirotrac IV-Datenbank aufgenommen. Bei Bedarf werden neue Patienten erstellt.

Wenn die Patienten-ID auf dem Vitalograph 2120 bzw. Gold Standard Plus in Format eines Namens vorhanden ist (z. B. JOHN DOE), wird sie in der Spirotrac-Datenbank weiterhin im Feld für die Patienten-ID und nicht in den Namensfeldern gespeichert.

Da auf dem Vitalograph 2120 bzw. Gold Standard Plus kein Geburtsdatum eingegeben werden kann, wird es in Spirotrac über das Alter des Patienten am 1. Januar des nächstgelegenen Jahres annäherungsweise ermittelt. Damit wird sichergestellt, dass erwartete Informationen bis auf ein Jahr genau sind. Das korrekte Geburtsdatum kann jederzeit durch Patienten auswählen eingegeben werden

Mehrere 2120-Geräte verwenden

Jeder Vitalograph 2120 verfügt über eine vorprogrammierte Seriennummer. Diese Nummer wird für jeden Patienten in der automatisch vergebenen ID (die auf dem Datum beruht, z. B. 190298P1) verwendet. Dies ist für den Fall wichtig, dass Testergebnisse von verschiedenen 2120-Geräten in der Spirotrac IV-Datenbank gespeichert werden. Es gibt in diesem Fall keinen Konflikt zwischen den automatisch vergebenen IDs verschiedener Geräte, beispielsweise 02419-190298P1 von einem Gerät und 02278-190298P1 von einem anderen.

EINRICHTEN DER OPTIONEN

Über das Menü **Optionen** können Sie die in Spirotrac IV verwendeten Optionen in regelmäßigen Abständen einrichten und ändern.

Berichtsoptionen

Es gibt zwei Berichtsoptionen: Berichte erstellen/modifizieren und Berichtskopf.

Die Option Berichte erstellen/modifizieren

Mit dieser Option kann die in einem angegebenen Bericht angezeigte Kombination von Berichtstypen und -attributen festgelegt werden.

1. Wählen Sie das Menü **Optionen** und anschließend das Untermenü **Berichtsoptionen**.
2. Wählen Sie die Option **Berichte erstellen/modifizieren**. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

3. Geben Sie den Namen des Berichts, der erstellt werden soll, in das Feld **Berichtsname** ein und fahren Sie mit Schritt 4 fort.

oder,

wenn Sie den neuen Bericht auf der Grundlage eines vorhandenen Berichtes erstellen möchten, wählen Sie den Namen des Berichts, der geändert werden soll, aus der Liste der Berichtsnamen aus. Geben Sie einen Namen für den neuen Bericht ein.

4. Klicken Sie auf die Berichtsspirogramme, die in dem Bericht erscheinen sollen.
5. Markieren Sie die gewünschten Berichtsattribute. Das Markieren dieser Attribute hat folgende Wirkung:

Auswertung: Schließt eine Interpretation mit ein, falls diese Option im Menü **Optionen** aktiviert wurde.

Normalwert Spirogramm: Zeichnet die Punkte, durch die die Kurve erwartungsgemäß gezeichnet wird.

Volumen/Zeit-Kurve: FEV 0.5, 1, 3

Strom/Volumen-Kurve: FEF 25%, 50%, 75%

COPD-Risiko: Risiko in Prozent einer Herz-Lungen-Krankheit.

Initialien der Bedienungsperson: Initialen der Person, die die Kalibrierung ausgeführt hat.


6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK** um den Bericht zu speichern. Der neue Bericht wird erstellt.

Hinweis: Wählen Sie zuerst das Menü **Berichte** und dann **Berichtstyp**. Markieren Sie den gewünschten Berichtsnamen, d.h. **Standard**. Der neue Bericht kann jetzt verwendet werden.

Die Option Berichtskopf

Mit dieser Option kann die in einem Bericht angezeigte Kopfzeile definiert werden.

1. Wählen Sie das Menü **Optionen** und anschließend das Untermenü **Berichtsoptionen**.
2. Wählen Sie die Option **Berichtskopf**. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

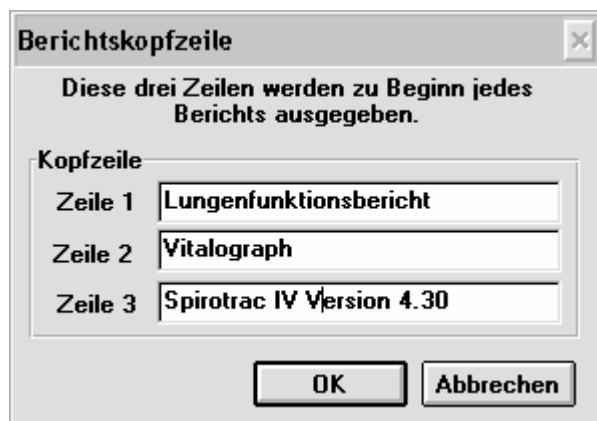

3. Geben Sie in die Felder **Zeile 1**, **Zeile 2** und **Zeile 3** maximal 3 Zeilen ein. Diese werden als Kopfzeile von Berichten ausgegeben.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Anzeige des CCS-Tests

Bei der Durchführung von CCS-Tests können zwei Arten der graphischen Darstellung verwendet werden;

- Volumen/Zeit-Fenster
- Strom/Volumen-Fenster

Je nach Wahl einer dieser Optionen wird festgelegt, welche graphische Anzeige während der CCS-Tests verwendet wird.

Testdauer

Mit dieser Option kann die maximale Zeitdauer festgelegt werden, für die FVC- und MVV-Tests bis zur Berechnung von Ergebnissen ausgeführt werden.

1. Wählen Sie das Menü **Optionen** und anschließend das Untermenü **Testdauer**.
2. Wählen Sie die Option **MVV-Dauer** oder **FVC-Dauer**.
3. Wählen Sie **10, 12** oder **15 Sekunden** für die maximale MVV-Dauer bzw. **20** oder **30 Sekunden** für die maximale FVC-Dauer.

Gerät

Mit dieser Option kann der gewünschte Gerätetyp festgelegt werden.

1. Wählen Sie das Menü **Optionen** und anschließend das Untermenü **Gerät**.
2. Wählen Sie das gewünschte Gerät.

Wählen Sie die Option **ATS-Wellenform** um FVC-Tests aus einer Auswahl von 24 Wellenformen zu simulieren und die Ergebnisse anzuzeigen.

Genauigkeitsprüfung

Es gibt zwei Genauigkeitsprüfungsoptionen: Gerät und BTPS.

Gerät


Die zur Gerätekalibrierung erforderlichen Schritte sind in Kapitel 4 beschrieben.

BTPS

Mit dieser Option kann die vom System zur Berechnung des BTPS-Korrekturfaktors verwendete Luftdruckanzeige geändert werden. Dies ist nur bei Verwendung des S-Modell-Spirometers oder des Fleisch-Messkopfes erforderlich.

1. Wählen Sie das Menü **Optionen** und anschließend das Untermenü **Genauigkeitsprüfung**.
2. Wählen Sie die Option **BTPS**.

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

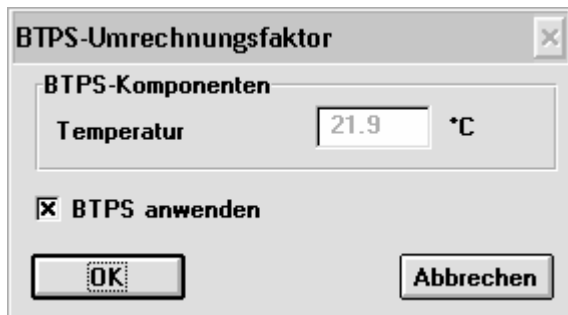

Beachten Sie, dass Spirotrac IV die Umgebungstemperatur direkt misst, so dass Sie die Temperatur nicht eingeben müssen.

3. Ändern Sie den Wert im Feld **Luftdruck**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Berechnen**. Der BTPS-Korrekturfaktor ändert sich daraufhin entsprechend dem von Ihnen eingegebenen Wert.
5. Klicken Sie auf das Optionsfeld **BTPS anwenden** um den Faktor auf das Spirometer anzuwenden.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK** um den neuen BTPS-Korrekturfaktor zu speichern.

Tests speichern

Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Tests automatisch oder manuell gespeichert werden sollen.

1. Wählen Sie das Menü **Optionen** und anschließend das Untermenü **Tests speichern**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Bester ATS Test** um automatisch den besten Test zu speichern, d.h. bei

SVC-Tests: den Test mit dem größten SVC-Ergebnis.
FVC-Tests: die Stromergebnisse und Ausgangsdaten des Tests mit dem größten FVC+FEV1 und den größten Volumenergebnissen von allen Tests
CCS-Tests: die Stromergebnisse und Ausgangsdaten des Tests mit dem größten FVC+FEV1 und den größten Volumenergebnissen von allen Tests
IVC-Tests: den Test mit dem größten IVC-Ergebnis.
MVV-Tests: den Test mit dem größten MVV-Ergebnis

- **Bester ERS-Test** um automatisch den besten Test zu speichern, d.h. bei

SVC-Tests: den Test mit dem größten SVC-Ergebnis.
FVC-Tests: die Ausgangsdaten des Tests mit dem größten PEF (falls der FVC-Wert dieses Tests um nicht mehr als 5% vom besten FVC-Wert abweicht), andernfalls die Ausgangsdaten des Tests mit dem größten FVC-Wert. Alle Parameter von allen Tests werden berücksichtigt, d.h. der größte eines jeden Tests.
CCS-Tests: die Ausgangsdaten des Tests mit dem größten PEF (falls der FVC-Wert dieses Tests um nicht mehr als 5% vom besten FVC-Wert abweicht), andernfalls die Ausgangsdaten des Tests mit dem größten FVC-Wert. Alle Parameter von allen Tests werden berücksichtigt, d.h. der größte eines jeden Tests.
IVC-Tests: den Test mit dem größten IVC-Ergebnis.
MVV-Tests: den Test mit dem größten MVV-Ergebnis

- **Beste 3 ATS-Tests** um automatisch die nach folgenden Kriterien drei besten Tests zu speichern:

SVC-Tests: den Test mit dem größten SVC-Ergebnis.
FVC-Tests: die Tests mit dem größten Wert für FVC+FEV1.
CCS-Tests: die Tests mit dem größten Wert für FVC+FEV1.
IVC-Tests: den Test mit dem größten IVC-Ergebnis.
MVV-Tests: den Test mit dem größten MVV-Ergebnis

- **Beste 3 ERS-Tests** um automatisch die nach folgenden Kriterien drei besten Tests zu speichern:

SVC-Tests: den Test mit dem größten SVC-Ergebnis.
FVC-Tests: die Tests mit dem größten Wert für FEV1.
CCS-Tests: die Tests mit dem größten Wert für FEV1.
IVC-Tests: den Test mit dem größten IVC-Ergebnis.
MVV-Tests: den Test mit dem größten MVV-Ergebnis

- **Manuell** um die vom Benutzer aus einer Liste von durchgeführten Tests ausgewählten Tests zu speichern.

IV-Tests werden immer manuell gespeichert.

%Vor/Nach-Gleichung

Beim Anzeigen oder Drucken eines Vor/Nach-Vergleichs kann die prozentuale Änderung zwischen dem Vor-Ergebnis und dem Nach-Ergebnis verschieden berechnet werden. Mit dieser Option können Sie eine der folgenden Möglichkeiten wählen:

Auf VOR-Wert basieren, % Änderung = $\frac{\text{Nach} - \text{Vor}}{\text{Vor}}$

Auf NACH-Wert basieren, % Änderung = $\frac{\text{Nach} - \text{Vor}}{\text{Nach}}$

Auf
DURCHSCHNITTSWERTEN
basieren, % Änderung = $\frac{\text{Nach} - \text{Vor}}{0,5 \times (\text{Vor} + \text{Nach})}$

Standardwerte

Mit dieser Option können Sie eine Reihe von Standardwerten festlegen, die beim Durchführen von Tests verwendet werden.

1. Wählen Sie das Menü **Optionen** und anschließend das Untermenü **Standardwerte**.

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

Erwarteter Wert/Bevölkerungsgruppe-Korrelationen

Erwarteter Wert/Bevölkerungsgruppe-Korrelationen einstellen ...

Wählen Sie eine Bevölkerungsgruppe aus, die mit einem Satz von Standardwerten verknüpft werden soll.

Änderungen im Abschnitt Bevölkerungsgruppe ethnische werden für die aktuell ausgewählte Bevölkerungsgruppe übernommen.

Bevölkerungsgruppe

- Kaukasisch
- Schwäarz
- Hispanisch
- Europäisch
- Skandinavisch
- Asiatisch
- Indianisch
- Orientalisch
- Andere

Normalwert :

Knudson

Korrekturfaktor für Bevölkerungsgruppe

Der Prozentsatz, mit dem der Standardwert multipliziert wird.

100

OK Abbrechen

2. Wählen Sie die Bevölkerungsgruppe aus, indem Sie auf die entsprechende Beschreibung in der Liste **Bevölkerungsgruppe** klicken. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Standardwert** den Satz aus, der mit der Bevölkerungsgruppe verbunden wird.

Die tatsächlichen Ergebnisse werden dann mit den von diesem Satz gelieferten Standardergebnissen verglichen.

Parameter

Mit dieser Option werden die angezeigten Testparameter ausgewählt.

1. Wählen Sie das Menü **Optionen** und anschließend **Parameter**.

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

Parametertabelle			
Parameter			
<input checked="" type="checkbox"/> SVC	<input type="checkbox"/> FEF 75-85%	<input type="checkbox"/> FIF50/FEF50%	<input type="checkbox"/> TLC
<input checked="" type="checkbox"/> FVC	<input type="checkbox"/> FEF 25%	<input type="checkbox"/> MVV Ind	<input type="checkbox"/> IRV
<input checked="" type="checkbox"/> FEV1	<input type="checkbox"/> FEF 50%	<input type="checkbox"/> FMFT	<input type="checkbox"/> ERV
<input type="checkbox"/> FEV1/SVC%	<input type="checkbox"/> FEF 75%	<input type="checkbox"/> FET	<input type="checkbox"/> IC
<input checked="" type="checkbox"/> FEV1%	<input checked="" type="checkbox"/> FIVC	<input type="checkbox"/> Tpef	<input checked="" type="checkbox"/> IV
<input type="checkbox"/> FEV1/PEF	<input type="checkbox"/> FIVC/FVC%	<input type="checkbox"/> Vext	<input checked="" type="checkbox"/> PIF
<input type="checkbox"/> FEV6	<input type="checkbox"/> FIV1	<input type="checkbox"/> Vext/FVC%	<input checked="" type="checkbox"/> BHT
<input type="checkbox"/> PEF L/sec	<input type="checkbox"/> PIF L/sec	<input type="checkbox"/> R Ind	<input checked="" type="checkbox"/> MVV Dir
<input checked="" type="checkbox"/> PEF L/min	<input type="checkbox"/> PIF L/min	<input checked="" type="checkbox"/> IVC	<input checked="" type="checkbox"/> Testdatum
<input type="checkbox"/> FEF.2-1.2	<input type="checkbox"/> FIF 25%	<input type="checkbox"/> FRC	<input checked="" type="checkbox"/> Testzeit
<input checked="" type="checkbox"/> FEF 25-75%	<input type="checkbox"/> FIF 50%	<input type="checkbox"/> TV	<input checked="" type="checkbox"/> Testref.
<input type="checkbox"/> FEF25-75/FVC	<input type="checkbox"/> FIF 75%	<input type="checkbox"/> RV	<input checked="" type="checkbox"/> Besuchsref.

Alle diese Parameter werden berechnet und gespeichert; Sie müssen jedoch hier angeben, welche Parameter in Berichten angezeigt werden sollen.

Parameter	Definition
SVC	Vitalkapazität (Liter)
FVC	Forcierte Vitalkapazität (Liter)
FEV 1	Forciertes Expirationsvolumen nach 1 Sekunde (Liter)
FEV 1/SVC%	Verhältnis von FEV 1 zu VC in %
FEV 1/FVC%	Verhältnis von FEV 1 zu FVC in %
FEV1/PEF	Verhältnis von FEV1 zu PEF
FEV6	Forciertes Expirationsvolumen nach 6 Sekunden (Liter)
PEF	Expirations-Spitzenstrom (Liter/Sek oder Liter/Min) Hinweis: Dieser Parameter kann bei Gold Standard Plus und bei Modell 69000 nicht angewandt werden.
FEF 0,2-1,2	Mittlerer forciertes expiratorischer Atemstrom im Zeitintervall zwischen 0,2 und 1,2 Sekunden der Testzeit (Liter/Sek)
FEF 25-75%	Maximaler expiratorischer Atemstrom im Mittelteil: der mittlere FEF im Zeitintervall zwischen 25% und 75% des FVC (Liter/Sek)
FEF 25-75%/FVC	Verhältnis von FEF 25-75 zu FVC in %

FEF 75-85%	Forcierter expiratorischer Atemstrom gegen Ende: der mittlere FEF im Zeitintervall zwischen 75% und 85% des FVC (Liter/Sek)
FEF 25%	Forcierter expiratorischer Atemstrom bei 25% des FVC (Liter/Sek)
FEF 50%	Forcierter expiratorischer Atemstrom bei 50% des FVC (Liter/Sek)
FEF 75%	Forcierter expiratorischer Atemstrom bei 75% des FVC (Liter/Sek)
FIVC	Forcierte Inspirationsvolumen (Liter)
FIVC/FVC%	Verhältnis von FIVC zu FVC in %
FIV 1	Forciertes inspiratorische nach 1 Sekunde (Liter)
PIF	Einatmungs-Spitzenstrom (Liter/Sek oder Liter/Min) Hinweis: Dieser Parameter kann bei Gold Standard Plus und bei Modell 69000 nicht angewandt werden.
FIF 25%	Forcierter Inspirationsstrom bei 25% des FVC (Liter/Sek)
FIF 50%	Forcierter Inspirationsstrom bei 50% des FVC (Liter/Sek)
FIF 75%	Forcierter Inspirationsstrom bei 75% des FVC (Liter/Sek)
FIF 50/FEF 50%	Verhältnis von FIF 50% zu FEF 50% in %
MVV Ind	Maximale willkürliche Ventilation, indirekt aus dem FEV berechnet (Liter/Min)
FMFT	Forcierte mittelexpiratorische Atemstromzeit (Sek)
TPEF	Zeit bis Spitzenstrom (Millisekunden)
FET	Forcierte Ausatemungszeit (Sek)
Vext	Volumen expiriert zwischen 0 Sekunden und der Startzeit, gemäß dem rückextrapolierten Volumen (Liter)
Vext/FVC%	Verhältnis von Vext zu FVC in %
Rind	Indirekter Atemwegswiderstand (kPa/l/s)
IVC	Inspiratorische Vitalkapazität (Liter)
FRC	Funktionelle Residualkapazität (Liter)
TV	Ruheatemungsvolumen (Liter)
RV	Residualvolumen (litres)
TLC	Totalkapazität der Lunge (Liter)
IRV	Inspiratorisches Reservevolumen (Liter)
ERV	Exspiratorisches Reservevolumen (Liter)
IC	Inspiratorische Kapazität (Liter)
IV	Inspiratorisches Volumen (Liter)
PIF	Inspiratorischer Spitzenstrom (Wahl zwischen Liter/Sek oder Liter/Min)
BHT	Atemanhaltezeit (Sek)
MVV Dir	Maximale willkürliche Ventilation, direkt aus einer ausgewählten Testzeitperiode (Liter/Min) berechnet

2. Klicken Sie auf die Parameter, die für die verschiedenen Testtypen angezeigt werden sollen.

Beachten Sie, dass alle Testergebnisse automatisch berechnet und gespeichert werden, so dass Sie einen Test zu einem späteren Zeitpunkt abrufen und zusätzliche, in diesem Fenster ausgewählte Parameter anzeigen können.

3. Klicken Sie auf die Optionsfelder **Testdatum** und **Testzeit**, falls diese automatisch mit einem Test gespeichert werden sollen.
4. Klicken Sie auf **Besuchsref.** um eine Referenznummer für eine Gruppe von Tests für den Patienten einzugeben.


5. Klicken Sie auf **Testref.** um für jeden einzelnen Test eine Referenznummer einzugeben.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Anreizanzeige

Mit dieser Option wird das Volumen eingerichtet, das durch einen Balken dargestellt wird, entlang dem sich der Puck bewegt, wenn ein Kind einen FVC-Anreiztest durchführt. Beim ersten Durchführen des Tests stellt der Balken einen prozentualen Anteil des erwarteten Lungenvolumens dar. Anschließend stellt der Balken einen prozentualen Anteil der besten FVC der durchgeführten Tests dar um das Kind zu ermutigen, sich noch mehr anzustrengen.

NB: Die Anreizanzeige erscheint nicht, wenn die erforderlichen Patientendaten nicht eingegeben wurden, d.h. die Parameter, die zur Berechnung der erwarteten Werte notwendig sind.

1. Wählen Sie das Menü **Optionen** und anschließend **Anreizanzeige**. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

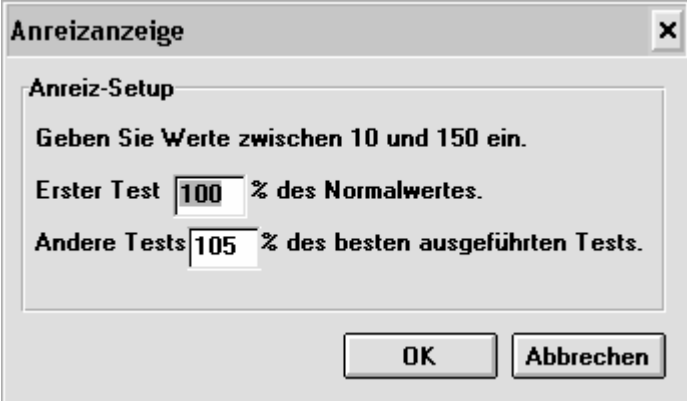

Anreizanzeige

Anreiz-Setup

Geben Sie Werte zwischen 10 und 150 ein.

Erster Test % des Normalwertes.

Andere Tests % des besten ausgeführten Tests.

OK Abbrechen

2. Geben Sie eine Zahl als prozentualen Anteil des Normalwertes ein. Diese Zahl wird dazu verwendet, die Länge des Balkens im Fenster für den ersten Test zu bestimmen.
3. Geben Sie eine Zahl als prozentualen Anteil des besten FVC aller durchgeführten Tests ein. Da die Länge des Balkens in anschließenden Tests durch diese Zahl bestimmt wird, wird das Kind dadurch ermutigt, sich noch mehr anzustrengen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.


Datenbank

Mit dieser Option wird einerseits die Anzahl der Tage festgelegt, die Tests nach der erstmaligen Durchführung abgerufen werden können und andererseits die Anzahl der Tage, nach der Ausgangsdaten automatisch vom System gelöscht werden.

Das Abrufen eines Tests macht diesen Test zum aktuellen Test, als ob er gerade durchgeführt worden wäre. Dadurch erhält der Benutzer bei der Durchführung von Tests einen optischen Vergleich mit früheren Tests.

1. Wählen Sie das Menü **Optionen** und anschließend **Datenbank**.

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

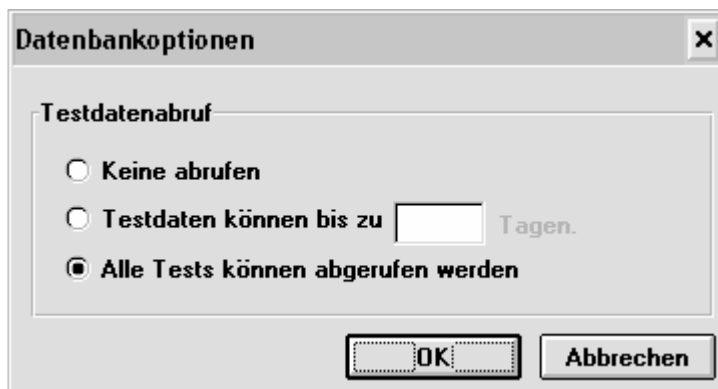

2. Klicken Sie auf das Optionsfeld **Tests können bis zu [] Tage lang abgerufen werden** um Tests innerhalb eines begrenzten Zeitraums abrufen zu können. Geben Sie anschließend die Anzahl der Tage ein, für die Tests abgerufen werden können.

oder

klicken Sie auf das Optionsfeld **Alle Test können abgerufen werden**, wenn Sie Tests ohne zeitliche Begrenzung abrufen können wollen.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Interpretation

Mit dieser Option wird festgelegt, ob während der Durchführung von Tests und als Teil von Berichten eine Interpretation verfügbar ist.

1. Wählen Sie das Menü **Optionen** und anschließend **Interpretation**.
2. Wenn Sie auf **Interpretation** klicken, wird ein Auswahlhäkchen entweder hinzugefügt oder entfernt.

Ist kein Häkchen angezeigt, bedeutet dies, dass keine Interpretation verfügbar ist.

Extraktionsgebläse

Mit dieser Option wird angezeigt, ob das Vitalograph Extraktionsgebläse zum Trocknen des Messkopfes aktiviert ist.

1. Wählen Sie das Menü **Optionen** und anschließend **Extraktionsgebläse aktivieren**.
2. Wenn Sie auf **Extraktionsgebläse aktivieren** klicken, wird ein Auswahlhäkchen entweder hinzugefügt oder entfernt.

Ist kein Häkchen angezeigt, bedeutet dies, dass das Gebläse deaktiviert ist.

NB: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Vitalograph Pneumotrac als Gerät ausgewählt ist.

SVC-Balkendiagramm

Mit dieser Option wird festgelegt, ob das beim Durchführen von SVC-Tests erstellte Diagramm Balken oder Linien enthält.

1. Wählen Sie das Menü **Optionen** und anschließend **SVC-Balkendiagramm**.
2. Wenn Sie auf **SVC-Balkendiagramm** klicken, wird das Häkchen entweder hinzugefügt oder entfernt.

Ist kein Häkchen angezeigt, bedeutet dies, dass ein Liniendiagramm erstellt wird.

Ist ein Häkchen angezeigt, bedeutet dies, dass ein Balkendiagramm erstellt wird. Das ist der für SVC-Tests am häufigsten verwendete Diagrammtyp.

Passwörter


Es gibt zwei Passwortoptionen: Ändern und Umschaltsperrung Ein/Aus.

Die Option Ändern

Mit dieser Option wird ein Passwort geändert

1. Wählen Sie das Menü **Optionen** und anschließend das Untermenü **Passwort**.
2. Wählen Sie die Option **Ändern**.

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

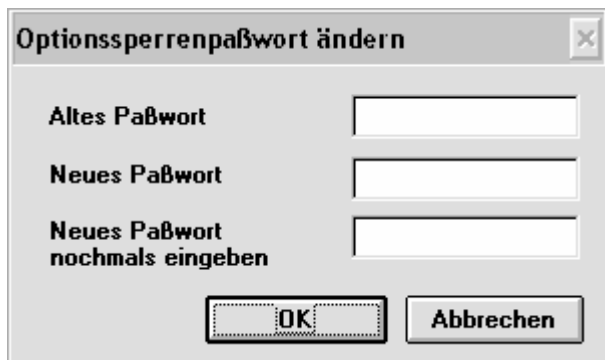

The image shows a dialog box titled "Optionssperrenpaßwort ändern". It has three text input fields. The first is labeled "Altes Paßwort", the second "Neues Paßwort", and the third "Neues Paßwort nochmals eingeben". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen".


3. Geben Sie das zur Zeit verwendete Passwort in das Feld **Altes Passwort** ein. Aus Sicherheitsgründen wird das eingegebene Kennwort auf dem Bildschirm in Form von Sternchen dargestellt.
4. Geben Sie das neue Passwort in das Feld **Neues Passwort** ein.
5. Geben Sie das neue Passwort erneut in das Feld **Neues Passwort nochmals eingeben** ein.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Umschaltsperr Ein/Aus

Mit dieser Option wird der Zugriff eines Benutzers auf bestimmte Funktionen in Spirotrac IV eingeschränkt oder gewährt.

1. Wählen Sie das Menü **Optionen** und anschließend das Untermenü **Passwort**.
2. Wählen Sie die Option **Umschaltsperr Ein/Aus**.

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

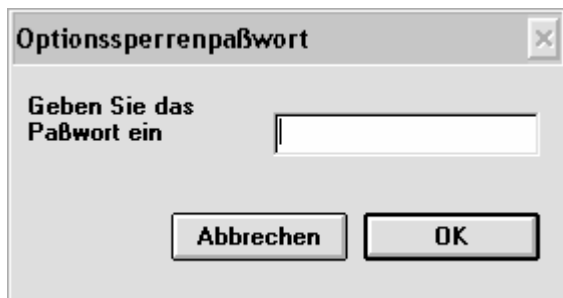

3. Tippen Sie das Benutzerpasswort in das Feld **Geben Sie das Passwort ein**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

DATENBANKVERWALTUNG

Der Benutzer kann in Spirotrac IV eine Reihe von Datenbanken erstellen, in der Patientendaten zum Zweck der leichteren Verwaltung dieser Informationen gespeichert werden. Wenn der Benutzer zum Beispiel in mehreren Kliniken arbeitet, kann für jede Klinik eine Datenbank erstellt werden. Wenn der Benutzer Patientendaten auf Diskette speichern möchte, ist es leichter, Patienten aus einer Liste einer einzigen Klinik auszuwählen als aus einer Liste aller Patienten.

Wenn die gewünschten Datenbanken erstellt sind, sollten Sie sich beim Auswählen von Patienten, der Durchführung von Tests usw. vergewissern, dass die richtige Datenbank verwendet wird. Beachten Sie, dass die Zugriffszeit auf Datensätze erheblich zunimmt, je größer die Datenbank wird.


Das Menü **Datenbank** wird dazu verwendet, die Datenbanken zu verwalten und Patientendatensätze zu sichern und wiederherzustellen.

Eine neue Datenbank erstellen

Befolgen Sie diese Schritte um eine neue Datenbank zu erstellen.

1. Wählen Sie das Menü **Datenbank** aus und wählen Sie die Option **Neue Datenbank anlegen**.

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

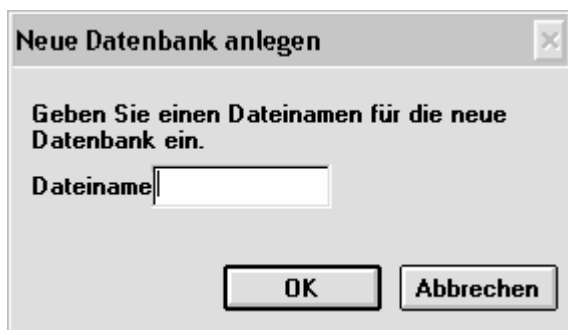


2. Geben Sie den Namen der neuen Datenbank (maximal acht Zeichen ohne Leerzeichen) in das Feld Dateiname ein.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**. Die neue Datenbank wird daraufhin im Installationsverzeichnis von Spirotrac erstellt.

Eine Datenbank auswählen

Befolgen Sie diese Schritte um eine Datenbank als aktuelle Datenbank festzulegen.

1. Wählen Sie das Menü **Datenbank** aus und wählen Sie die Option **Datenbank auswählen**.

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

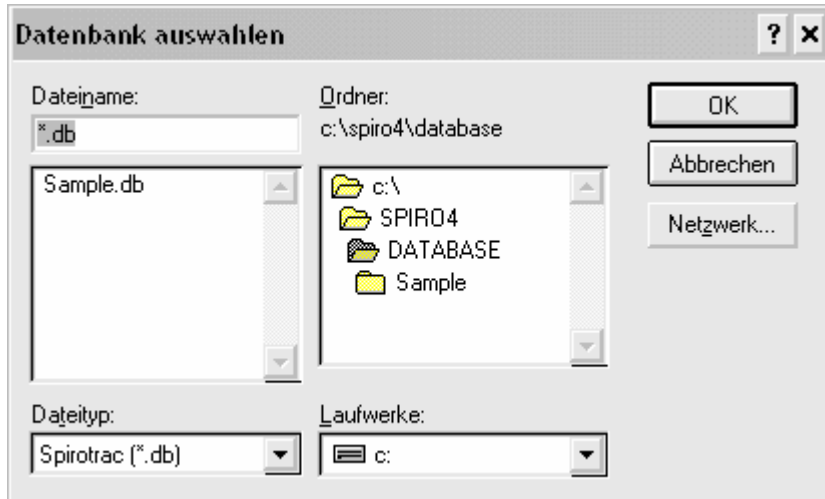


2. Geben Sie den Namen der Datenbank in das Feld Dateiname ein oder wählen Sie ihn aus der Liste aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**. Die Datenbank wird daraufhin ausgewählt.
4. Die ausgewählten Daten erscheinen links unten im Spirotrac IV-Fenster.

Eine Datenbank löschen

Befolgen Sie diese Schritte um eine Datenbank zu löschen.

1. Wählen Sie das Menü **Datenbank** aus und wählen Sie die Option **Datenbank löschen**.

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

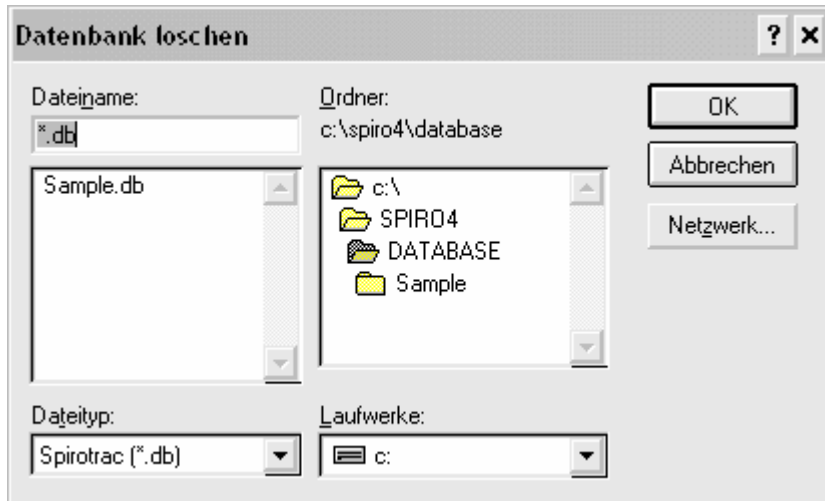

2. Geben Sie den Namen der Datenbank in das Feld **Dateiname** ein oder wählen Sie ihn aus der Liste aus.

NB: Beachten Sie, dass der Benutzer eine Datenbank, in der Sie gerade arbeiten, nicht löschen kann.


3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**. Die Datenbank wird daraufhin gelöscht.

Patientendatensätze sichern


Befolgen Sie diese Schritte um Patientendatensätze auf ein Speichermedium zu kopieren.

1. Wählen Sie das Menü **Datenbank** aus und wählen Sie die Option **Patientendaten sichern**.

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

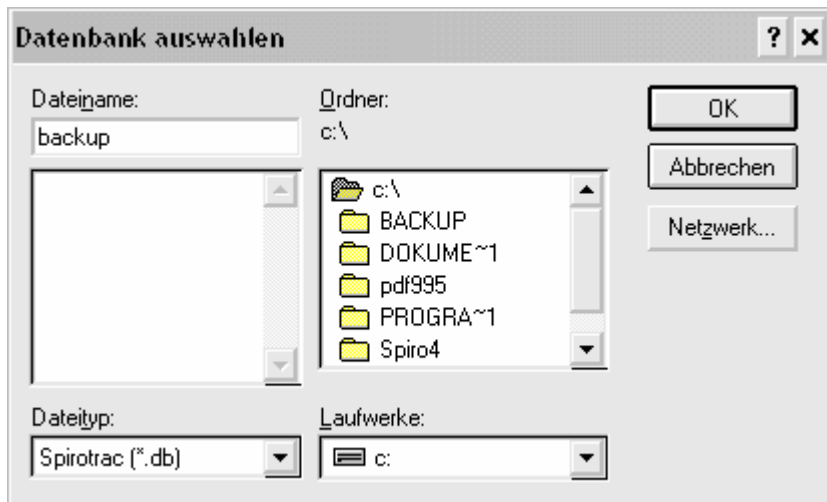

2. Wählen Sie den Ort aus, an dem die Sicherungskopie gespeichert wird und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

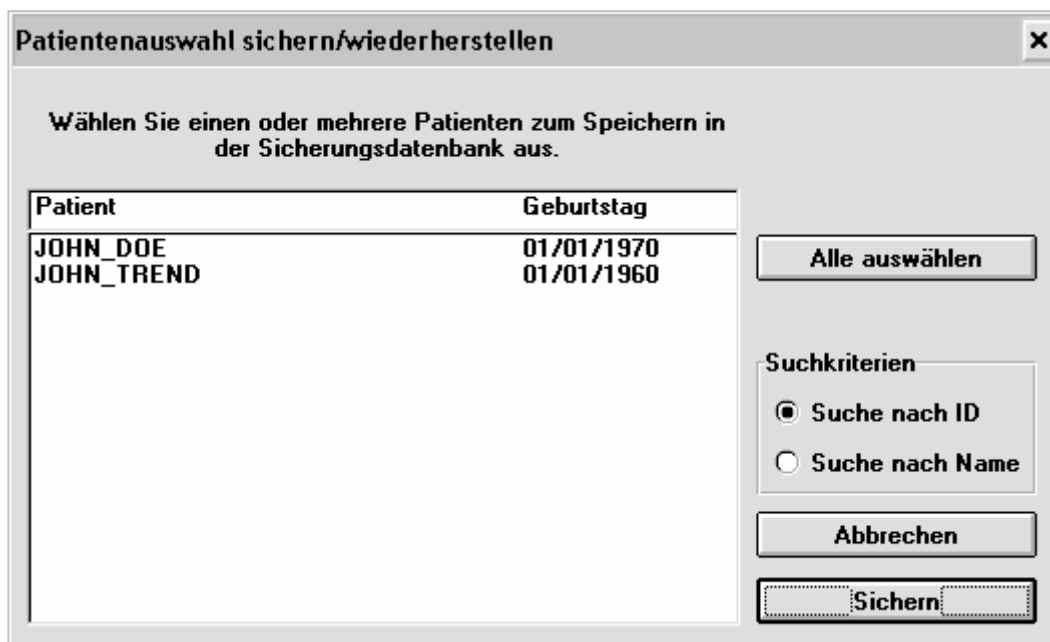

Dieses Fenster zeigt die Patienten in der ausgewählten Datenbank an.

3. Wählen Sie die Patienten aus, deren Datensätze gesichert werden sollen.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sichern**. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.



Klicken Sie auf **Ja** um die gewählten Patientendaten zu sichern. (Wenn Sie auf **Nein** klicken, wird die Sicherung der Daten abgebrochen).


Beachten Sie, dass beim Sichern auf ein nicht-permanentes Medium (z. B. auf eine Diskette) die Datensätze in ein temporäres Verzeichnis auf der Festplatte kopiert werden. Wenn die Datenbank zu groß für eine Diskette ist, wird die temporäre Datenbank in das angegebene Laufwerk kopiert und der Benutzer wird aufgefordert, eine weitere Diskette einzulegen. Dieser Vorgang wird so lange fortgesetzt, bis alle ausgewählten Datensätze gesichert sind.

Patientendatensätze von der Sicherungskopie wiederherstellen


Befolgen Sie diese Schritte um Patientendatensätze von einer Sicherungsdiskette wieder in das System zurückzukopieren.

1. Wählen Sie das Menü **Datenbank** aus. Wählen Sie dann die Zieldatenbank. Und wählen Sie die Option **Von Sicherung wiederherstellen**.

Ein dem folgenden Beispiel ähnliches Dialogfeld wird angezeigt.

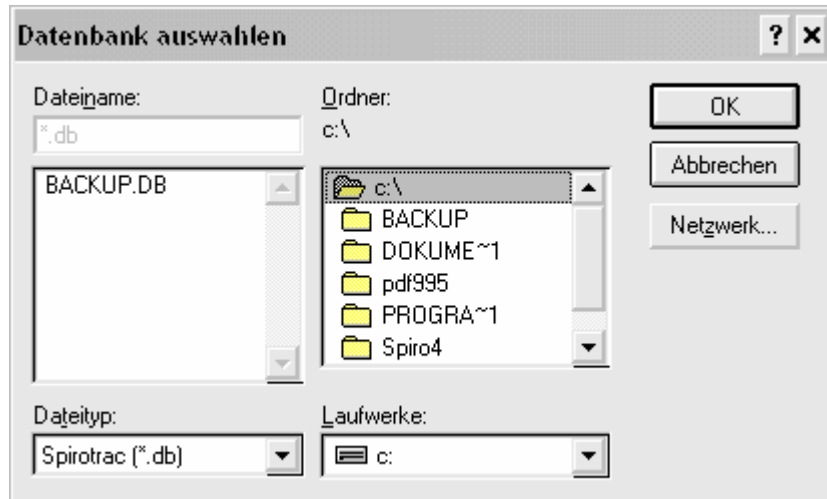

2. Wählen Sie den Ort aus, von dem die Sicherungskopie wiederhergestellt werden soll.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**. Ein dem folgenden Beispiel ähnliches Dialogfeld wird angezeigt.

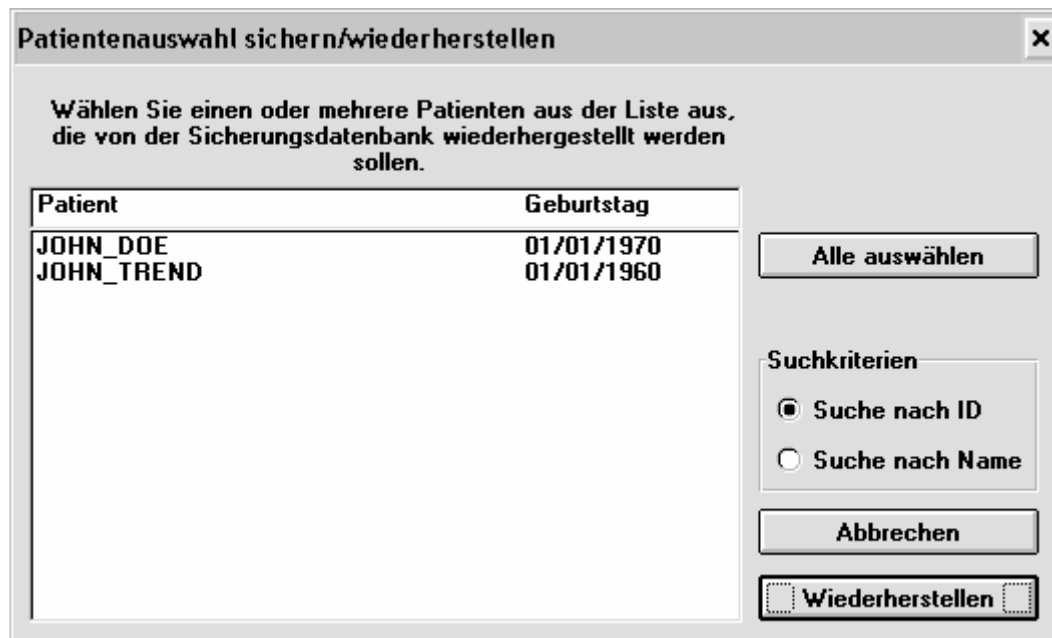

Das Fenster zeigt eine Liste der Patienten in der Sicherungsdatei an.

4. Wählen Sie die Patienten aus, deren Daten wiederhergestellt werden sollen.
5. Durch Klicken auf **Alle auswählen** werden alle Patienten in der Liste ausgewählt.

DATEN EXPORTIEREN

Die Datenexportfunktion wird dazu verwendet, Patienteninformationen und damit zusammenhängende Testausgangsdaten (falls ausgewählt) von Spirotrac IV in eine andere Anwendung, z. B. Excel™, in einem Format zu exportieren, das von dieser Anwendung erkannt wird.


Das Exportieren von Daten umfasst drei Stufen.

1. Auswahl der Datenbank, die die zu exportierenden Daten enthält.
2. Definieren des Inhalts der zu exportierenden Daten, d. h. der Patienteninformationen und des Formats, in dem diese Informationen exportiert werden und Festlegen, ob Ausgangsdaten exportiert werden oder nicht.
3. Exportieren der Daten.

Die Datenbank auswählen, die die Daten enthält

1. Führen Sie das Datenbank-Exportdienstprogramm aus. Wenn die Exportfunktion noch nicht konfiguriert wurde, wird die Meldung „Kann die Optionendateien nicht öffnen“ angezeigt. Ignorieren Sie diese Meldung und klicken Sie auf **OK**. Das Dialogfeld **Spirotrac IV Datenbank-Exportdienstprogramm** wird angezeigt.
2. Wählen Sie das Menü **Datenbank**.

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

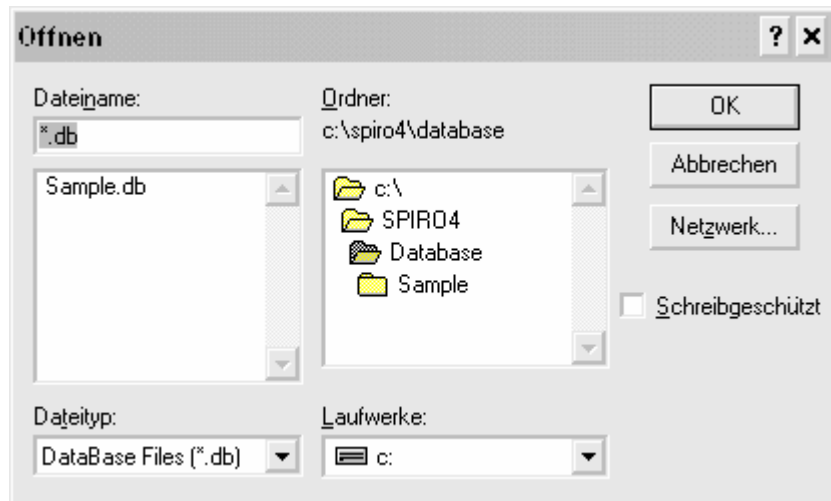

3. Geben Sie den Namen der gewünschten Datenbank in das Feld Dateiname ein oder wählen Sie eine Datenbank aus der Liste aus, falls der angezeigte Name nicht korrekt ist.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Die zu exportierenden Daten definieren

1. Wählen Sie im Menü **Optionen** die Option **Patiententests**.

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

The dialog box is titled "Optionen - Patienten-Testinformationen auswählen". It contains a message: "Bitte wählen Sie Tests aus, indem Sie in die Auswahlkästchen klicken". Below this message, there are eight rows of options, each with a checkbox and a "Setup" button:

<input type="checkbox"/> Demographische Patientendaten	Setup	<input type="checkbox"/> IVC-Testergebnisse	Setup
<input type="checkbox"/> SVC-Testergebnisse	Setup	<input type="checkbox"/> MVV-Testergebnisse	Setup
<input type="checkbox"/> FVC-Testergebnisse	Setup	<input type="checkbox"/> IV-Testergebnisse	Setup
<input type="checkbox"/> CCS-Testergebnisse	Setup	<input type="checkbox"/> Belastungstestergebnisse	Setup

At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Alle auswählen", "OK", and "Abbrechen".

2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Demographische Patientendaten** (falls nicht aktiviert). Klicken Sie auf die Schaltfläche **Setup** neben dem Kontrollkästchen **Demographische Patientendaten**. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

The dialog box is titled "Optionen - Demographische Patientendaten". It contains a section titled "Patienteninformationen" with the following options:

<input type="checkbox"/> Patienten-ID	<input type="checkbox"/> Raucher	Format der Bevölkerungsgruppe Buchstaben-Code (K,Af,H,E)
<input type="checkbox"/> Nachname	<input type="checkbox"/> Jahre geraucht	Geburtsdatumformat Paradox-Datumswert
<input type="checkbox"/> Vorname	<input type="checkbox"/> Nichtraucher seit	
<input type="checkbox"/> Zweiter Vorname	<input type="checkbox"/> Zig. pro Tag	
<input type="checkbox"/> Geschlecht	<input type="checkbox"/> Bevölkerungsgruppe	
<input type="checkbox"/> Geburtsdatum	<input type="checkbox"/> Bronchialprovokation	
<input type="checkbox"/> Größe	<input type="checkbox"/> Überweisender Arzt	
<input type="checkbox"/> Gewicht	<input type="checkbox"/> Allgemeine Kommentare	

At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Alle auswählen", "OK", and "Abbrechen".

3. Markieren Sie die Kontrollkästchen mit den Patienteninformationen, die exportiert werden sollen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

5. Markieren Sie das Kontrollkästchen **SVC-Testergebnisse** (falls nicht aktiviert). Klicken Sie auf die Schaltfläche **Setup** neben dem Kontrollkästchen **SVC-Testergebnisse**. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

Optionen - SVC-Testauswahl

SVC-Patienteninformationen

- Patienten-ID
- Besuchsreferenz
- Testreferenz
- Geburtsdatum
- Testzeitpunkt
- Größe des Patienten
- Gewicht des Patienten
- Anstrengungseinschätzung

SVC

Alle auswählen

OK

Abbrechen

Wählen Sie die zu exportierenden Parameter aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

6. Markieren Sie das Kontrollkästchen **FVC-Testergebnisse** (falls nicht aktiviert). Klicken Sie auf die Schaltfläche **Setup** neben dem Kontrollkästchen **FVC-Testergebnisse**. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

Optionen - FVC-Testauswahl

FVC-Patienteninformationen

- Patienten-ID
- Besuchsreferenz
- Testreferenz
- Geburtsdatum
- Testzeitpunkt
- Größe des Patienten
- Gewicht des Patienten
- Anstrengungseinschätzung

FVC Tests

- SVC
- FVC
- FEV1
- FEV6
- PEF L/s
- FEF 25-75%
- FEF 75-85%
- FEF .2-1.2%
- FEF 25%
- FEF 50%
- FEF 75%
- FIVC
- FIV1
- PIF L/s
- FIF 25%
- FIF 50%
- FIF 75%
- FET
- FMFT
- Vext
- TPEF

Alle auswählen

OK

Abbrechen

Wählen Sie die zu exportierenden Parameter aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

7. Markieren Sie das Kontrollkästchen **CCS-Testergebnisse** (falls nicht aktiviert). Klicken Sie auf die Schaltfläche **Setup** neben dem Kontrollkästchen **CCS Testergebnisse**. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

Optionen - FVC-Testauswahl

FVC-Patienteninformationen

- Patienten-ID
- Besuchsreferenz
- Testreferenz
- Geburtsdatum
- Testzeitpunkt
- Größe des Patienten
- Gewicht des Patienten
- Anstrengungseinschätzung

FVC Tests

- SVC
- FVC
- FEV1
- FEV6
- PEF L/s
- FEF 25-75%
- FEF 75-85%
- FEF .2-1.2%
- FEF 25%
- FEF 50%
- FEF 75%
- FIVC
- FIV1
- PIF L/s
- FIF 25%
- FIF 50%
- FIF 75%
- FET
- FMFT
- Vext
- TPEF

Alle auswählen OK Abbrechen

Wählen Sie die zu exportierenden Parameter aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

8. Markieren Sie das Kontrollkästchen **IVC-Testergebnisse** (falls nicht aktiviert). Klicken Sie auf die Schaltfläche **Setup** neben dem Kontrollkästchen **IVC Testergebnisse**. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

Optionen - IVC-Testauswahl

IVC-Patienteninformationen

- Patienten-ID
- Besuchsreferenz
- Testreferenz
- Geburtsdatum
- Testzeitpunkt
- Größe des Patienten
- Gewicht des Patienten
- Anstrengungseinschätzung

IVC Tests

- IVC

Alle auswählen OK Abbrechen

Wählen Sie die zu exportierenden Parameter aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

9. Markieren Sie das Kontrollkästchen **MVV-Testergebnisse** (falls nicht aktiviert). Klicken Sie auf die Schaltfläche **Setup** neben dem **Kontrollkästchen MVV-Testergebnisse**. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

Optionen - MVV-Testauswahl

MVV-Patienteninformationen

- Patienten-ID
- Besuchsreferenz
- Testreferenz
- Geburtsdatum
- Testzeitpunkt
- Größe des Patienten
- Gewicht des Patienten
- Anstrengungseinschätzung

MVV

Alle auswählen

OK

Abbrechen

Wählen Sie die zu exportierenden Parameter aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

10. Markieren Sie das Kontrollkästchen **IV-Testergebnisse** (falls nicht aktiviert). Klicken Sie auf die Schaltfläche **Setup** neben dem Kontrollkästchen **IV-Testergebnisse**. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

Optionen - IV-Testauswahl

IV-Patienteninformationen

- Patienten-ID
- Besuchsreferenz
- Testreferenz
- Geburtsdatum
- Testzeitpunkt
- Größe des Patienten
- Gewicht des Patienten
- Anstrengungseinsschätzung

IV-Tests

- IV
- PIF
- BHT


Alle auswählen

OK

Abbrechen


Wählen Sie die zu exportierenden Parameter aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

11. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Belastungstestergebnisse** (falls nicht aktiviert). Klicken Sie auf die Schaltfläche **Setup** neben dem Kontrollkästchen **Belastungstestergebnisse**. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

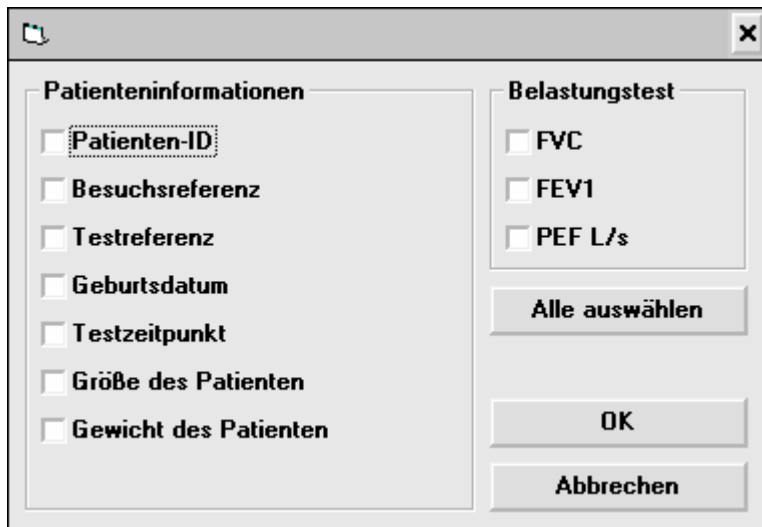

Wählen Sie die zu exportierenden Parameter aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

12. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
13. Wählen Sie im Menü Optionen die Option **Dateiformat** um das Format der zu exportierenden Datei zu definieren. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

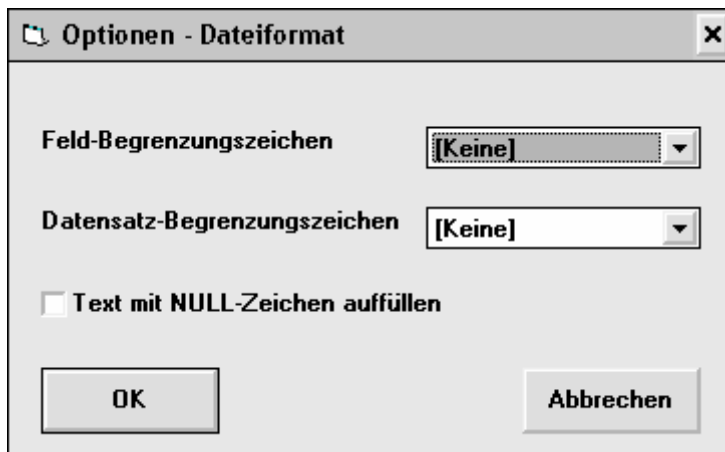


- Wählen Sie ein Zeichen aus um die Daten beim Exportieren in Felder zu formatieren.
 - Wählen Sie ein Zeichen aus um die Daten beim Exportieren in Datensätze zu formatieren.
 - Markieren Sie gegebenenfalls das Kontrollkästchen Text mit NULL-Zeichen auffüllen. (Dadurch werden die Ergebnisse beim Exportieren ausgerichtet.)
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
14. Wählen Sie im Menü Optionen die Option **Ausgangsdaten exportieren** um die Ausgangsdaten in die Datenübertragung einzuschließen.

Daten exportieren

1. Vergewissern Sie sich, dass eine Datenbank ausgewählt ist.
2. Befolgen Sie diesen Schritt um die Daten aller Patienten zu exportieren, bzw. Schritt 3 um die Daten eines einzelnen Patienten zu exportieren.


Wählen Sie im Menü **Datei** die Option **Alle Patienten**. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

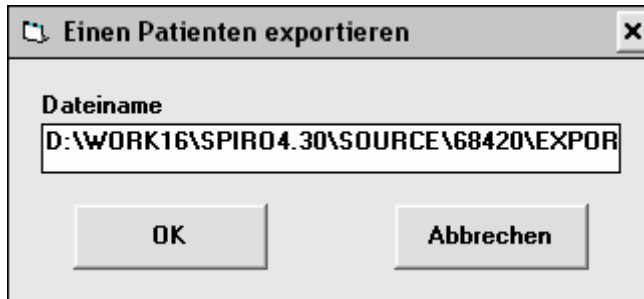

Geben Sie in das Feld **Dateiname** den Namen der Datei ein, in die die Daten exportiert werden sollen, falls die angezeigte Datei nicht korrekt ist.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt, falls die Datei bereits vorhanden ist.

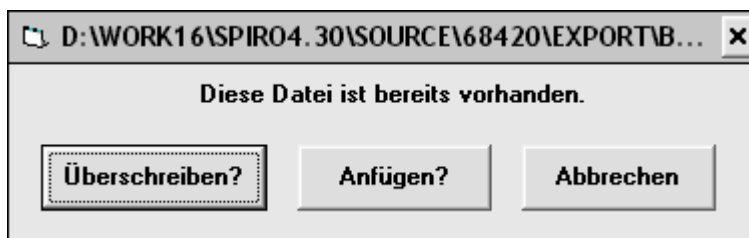


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Überschreiben?** um die in der Datei bereits enthaltenen Informationen zu überschreiben oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Anfügen?** um die neuen Informationen zu den in der Datei bereits enthaltenen Informationen hinzuzufügen oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Abbrechen** und wiederholen Sie die entsprechenden Schritte um die Datei umzubenennen.

Die Daten werden anschließend exportiert.

3. Befolgen Sie diesen Schritt um die Daten eines einzelnen Patienten zu exportieren.

Wählen Sie im Menü **Datei** die Option **Patient auswählen**. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

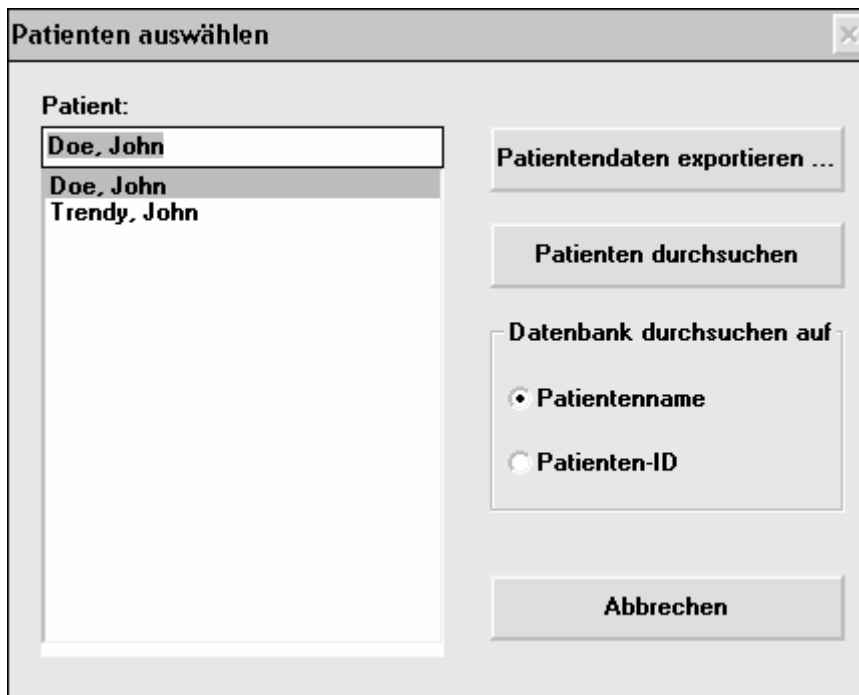

Es stehen Ihnen drei Möglichkeiten zur Verfügung, nach einem Patienten zu suchen: nach dem Patientennamen, nach der Patienten-ID oder durch Durchsuchen der Patientendatensätze, bis der richtige Satz gefunden wird.

Nach Patientennamen:

1. Klicken Sie auf das Optionsfeld **Patientenname** im Bereich **Datenbank durchsuchen auf**.
2. Klicken Sie auf den gewünschten Patientennamen in der Liste **Patient**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Patientendaten exportieren....**

Ein Doppelklicken auf den Patientennamen in der Liste **Patient** hat dieselbe Wirkung.

Nach Patienten-ID:

1. Klicken Sie auf das Optionsfeld **Patienten-ID** im Bereich **Datenbank durchsuchen auf**.
2. Klicken Sie auf die gewünschte Patienten-ID in der Liste **Patient**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Patientendaten exportieren....**

Ein Doppelklicken auf die Patienten-ID in der Liste **Patient** hat dieselbe Wirkung.

Durch Durchsuchen:

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Patienten durchsuchen**.

Ein dem folgenden Beispiel ähnliches Dialogfeld wird nun angezeigt, wenn der Benutzer den Patienten nach dem Patientennamen, der Patienten-ID oder mit Hilfe der Durchsuchfunktion gesucht hat.

Patienteninformationen

Name

Nach: Doe Vor: John Mittel: J

Patienten-ID: JOHN_DOE

Geburtsdatum

Tag: 1 Monat: 1 Jahr: 1970

Geschlecht: Männlich

Meßergebnisse

Größe: 180 cm.

Gewicht: 80 kg.

Bevölkerungsgruppe: Europäisch

<<< Zurück <<< >>> Weiter >>>

Exportieren... Abbrechen

Beachten Sie, dass der Benutzer beim Auswählen eines Patienten mit Hilfe der Durchsuchfunktion auf die Schaltflächen >>>**Weiter**>>> und <<<**Zurück**<<< klicken kann, bis die Informationen über den gewünschten Patienten angezeigt werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Exportieren....** Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

Einen Patienten exportieren

Dateiname

D:\WORK16\SPIRO4.30\SOURCE\68420\EXPOR

OK Abbrechen

Geben Sie in das Feld **Dateiname** den Namen der Datei ein, in die die Daten exportiert werden sollen, falls die angezeigte Datei nicht korrekt ist.

D:\WORK16\SPIRO4.30\SOURCE\68420\EXPORT\B...

Diese Datei ist bereits vorhanden.

Überschreiben? Anfügen? Abbrechen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Überschreiben?** um die in der Datei bereits enthaltenen Informationen zu überschreiben oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Anfügen?** um die neuen Informationen zu den in der Datei bereits enthaltenen Informationen hinzuzufügen oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Abbrechen** und wiederholen Sie die entsprechenden Schritte um die Datei umzubenennen.

Die Daten werden anschließend exportiert.


MANUELLE EINGABE VON SPIROTRAC IV-DATEN

Die Funktion zur manuellen Dateneingabe erfüllt zwei Aufgaben. Sie wird zum einen verwendet um Informationen über einen neuen Patienten einzugeben, d.h. Patienteninformationen und Testergebnisse, die bereits vor der Verwendung von Spirotrac IV vorhanden waren. Zum anderen dient sie dazu, frühere Informationen über einen bestehenden Patienten einzugeben, der erst später in Spirotrac IV aufgenommen wurde. Der Benutzer kann mit dieser Funktion auch Patienteninformationen löschen sowie Testergebnisse hinzufügen, löschen und anzeigen.


Falls die Standarddatenbank nicht verwendet werden soll, kann der Benutzer die Datenbank angeben, in der die Informationen gespeichert werden.

Daten zu einem neuen Patienten eingeben

1. Führen Sie das Programm zur manuellen Dateneingabe aus. Ein dem folgenden Beispiel ähnliches Dialogfeld wird angezeigt.

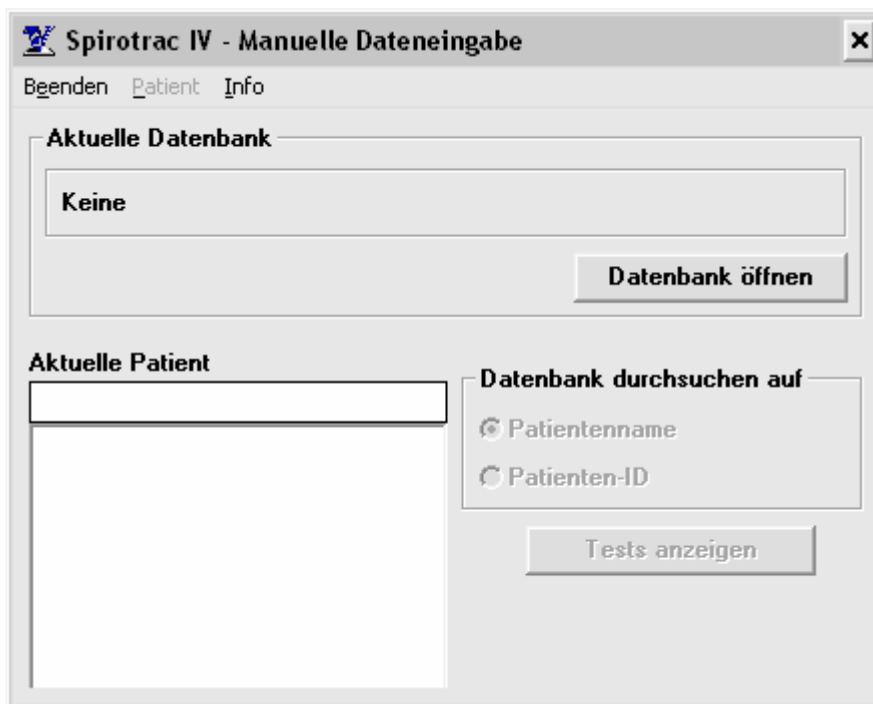

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Datenbank öffnen**. Ein dem folgenden Beispiel ähnliches Dialogfeld wird angezeigt.

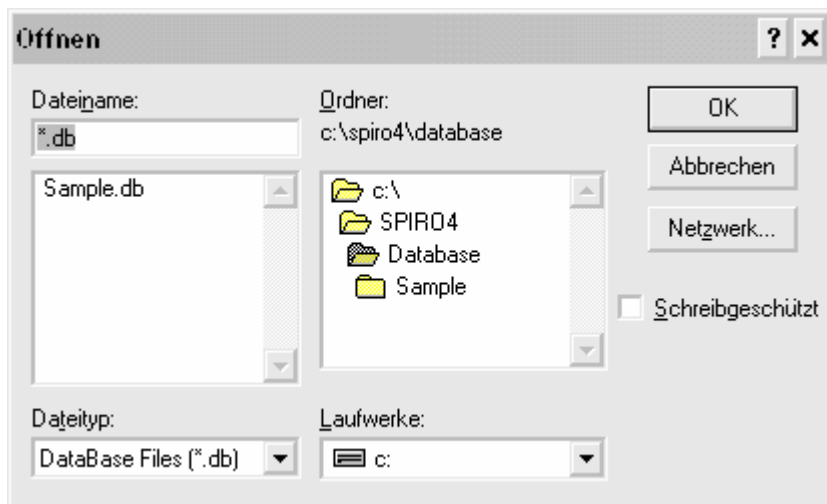

Geben Sie den Namen der gewünschten Datenbank in das Feld **Dateiname** ein oder wählen Sie ihn von der Liste aus.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

2. Wählen Sie das Menü **Patient** aus und wählen Sie die Option **Neuen Patienten hinzufügen**.

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

Das Feld **Patienten-ID** ist das einzige Feld, in das ein Eintrag eingegeben werden muss.

3. Geben Sie den Nachnamen des Patienten in das Feld **Nach** ein sowie einen Vornamen oder Anfangsbuchstaben in die Felder **Vor** und **Mittel** ein.
4. Geben Sie ein eindeutiges Kennzeichen in das Feld **Patienten-ID** ein um den Patienten zu identifizieren.
5. Geben Sie das Geburtsdatum des Patienten in Zahlen in die Felder **Tag**, **Monat** und **Jahr** ein. Geben Sie für das Jahr vier Stellen ein.

6. Klicken Sie auf das Optionsfeld **Weiblich**, wenn es sich um eine Patientin handelt.
7. Geben Sie die Größe des Patienten, entsprechend dem Maßsystem, das in der Windows-Systemsteuerung unter **Ländereinstellungen** festgelegt ist, in metrischen oder US-Maßen in das Feld **Größe** ein.
8. Geben Sie das Gewicht des Patienten, entsprechend dem Maßsystem, das in der Windows-Systemsteuerung unter **Ländereinstellungen** festgelegt ist, in metrischen oder US-Maßen in das Feld **Gewicht** ein.
9. Wählen Sie in der Pulldown-Liste die entsprechende **Bevölkerungsgruppe** aus.
10. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weitere**, wenn Sie zusätzliche Informationen eingeben möchten oder fahren Sie mit Schritt 16 fort, wenn Sie die Eingabe von Informationen zu dem Patienten beendet haben.

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfläche **Weitere** klicken.

Zusätzliche Patienteninformationen

Raucherstatus

Nichtraucher Ehem. Raucher

Raucher

Zigaretten/Tag 0

Jahre 0

Jahre seit 0

Berufliche Belastung

Allgemeine Kommentare

Überweisender Arzt

Abbrechen OK

Der Benutzer muss in keines der Felder in diesem Dialogfeld einen Eintrag eingeben.


11. Klicken Sie auf das zutreffende Feld im Bereich **Raucherstatus**.
Ist das Optionsfeld **Ehemaliger Raucher** ausgewählt, geben Sie in die Felder **Zigaretten/Tag**, **Jahre geraucht** und **Jahre Nichtraucher** ein, wieviele Packungen Zigaretten der Patient am Tag geraucht hat, wieviele Jahre der Patient geraucht hat und seit wievielen Jahren der Patient nicht mehr raucht.
- Ist das Optionsfeld **Raucher** ausgewählt, geben Sie in die Felder **Zigaretten/Tag** und **Jahre geraucht** ein, wieviele Zigaretten der Patient am Tag und wieviele Jahre der Patient bereits raucht.

12. Geben Sie in das Feld **Berufliche Belastung** die Namen anderer gesundheitsbeeinträchtigenden Stoffe und Substanzen ein, denen der Patient am Arbeitsplatz ausgesetzt ist, z. B. Isozyanat.
13. Geben Sie in das Feld **Allgemeine Bemerkungen** zusätzliche Bemerkungen über den Patienten ein.
14. Geben Sie den Namen des Hausarztes des Patienten in das Feld **Überweisender Arzt** ein.
15. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**. Das Fenster **Neuer Patient - Details** wird wieder angezeigt.
16. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.



17. Wählen Sie den gewünschten Test im Bereich **Testtyp** aus.
18. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Ein dem folgenden Beispiel ähnliches Dialogfeld wird angezeigt.

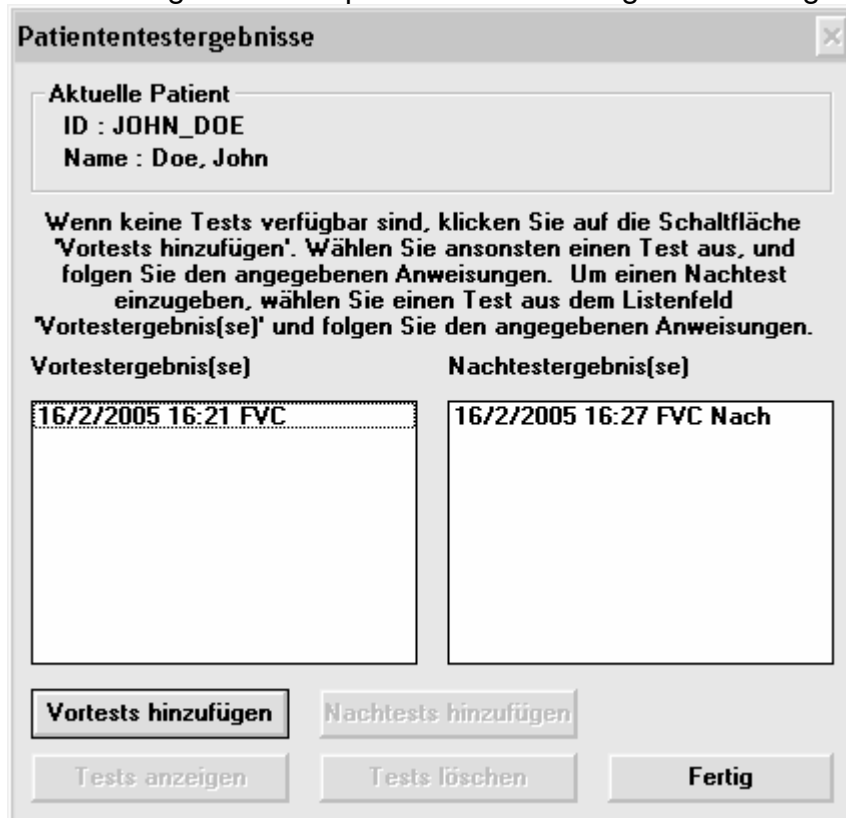

19. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vortests hinzufügen**.

Testparameter

FVC

SVC	<input type="text"/>	FEF25	<input type="text"/>	FIF75	<input type="text"/>
FVC	<input type="text"/>	FEF50	<input type="text"/>	FET	<input type="text"/>
FEV1	<input type="text"/>	FEF75	<input type="text"/>	FMFT	<input type="text"/>
FEV6	<input type="text"/>	FVC	<input type="text"/>	Vext	<input type="text"/>
PEF L/s	<input type="text"/>	FIV1	<input type="text"/>	TPEF	<input type="text"/>
FEF25-75	<input type="text"/>	PIF L/s	<input type="text"/>		
FEF75-85	<input type="text"/>	FIF25	<input type="text"/>		
FEF.2-1.2	<input type="text"/>	FIF50	<input type="text"/>		

Meßergebnisse

Größe cm.

Gewicht kg.

Initialien der Bedienungsperson

Besuchsreferenz

Testreferenz

Anstrengungseinschätzung

Schlecht Durchschnittlich Gut

Datum des Tests

Tag Monat Jahr

Zeitpunkt des Tests

Mehr... Abbrechen OK

Das Parameterfeld ist das einzige Feld in diesem Dialogfeld, in dem ein Eintrag erfolgen muss.

20. Geben Sie die Ergebnisse in die Parameterfelder ein.
21. Geben Sie die Größe des Patienten zum Zeitpunkt des Tests in das Feld **Größe** ein.
22. Geben Sie das Gewicht des Patienten zum Zeitpunkt des Tests in das Feld **Gewicht** ein.
23. Klicken Sie auf das Optionsfeld **Schlecht** bzw. **Gut** im Bereich **Anstrengungsbewertung**, falls **Durchschnittlich** nicht zutrifft.
24. Geben Sie in das Feld **Datum des Tests** ein Datum im Format MMTTJJ oder TTMMJJ ein, je nach der Konfiguration der **Ländereinstellungen** in der Windows-Systemsteuerung.
25. Geben Sie in das Feld **Zeitpunkt des Tests** eine Zeit im Format hhmm ein, z. B.. 0930 für 9:30.
26. Geben Sie in das Feld **Besuchsreferenz** eine Besuchsreferenznummer ein.
27. Geben Sie in das Feld **Testreferenz** eine Testreferenznummer ein.

28. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Ein dem folgenden Beispiel ähnliches Dialogfeld wird angezeigt, in dem der vom Benutzer eingegebene Test aufgeführt ist.

The screenshot shows a dialog box titled "Patiententestergebnisse" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a section for "Aktuelle Patient" with the following details: ID : JOHN_DOE and Name : Doe, John. Below this, there is a block of instructional text: "Wenn keine Tests verfügbar sind, klicken Sie auf die Schaltfläche 'Vortests hinzufügen'. Wählen Sie ansonsten einen Test aus, und folgen Sie den angegebenen Anweisungen. Um einen Nachtest einzugeben, wählen Sie einen Test aus dem Listenfeld 'Vortestergebnis(se)' und folgen Sie den angegebenen Anweisungen." Below the text are two columns: "Vortestergebnis(se)" and "Nachtestergebnis(se)". The "Vortestergebnis(se)" column contains a list box with one entry: "16/2/2005 16:21 FVC". The "Nachtestergebnis(se)" column contains a list box with one entry: "16/2/2005 16:27 FVC Nach". At the bottom of the dialog, there are five buttons: "Vortests hinzufügen" (highlighted with a black border), "Nachtests hinzufügen", "Tests anzeigen", "Tests löschen", and "Fertig".

29. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vortests hinzufügen** um die Ergebnisse von anderen Tests hinzuzufügen oder wählen Sie einen Vortest aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Post-Tests hinzufügen** um einen Post-Test hinzuzufügen, der mit diesem Vortest verknüpft werden soll.
30. Wiederholen Sie die Schritte 17 bis 29, bis alle Testergebnisse des Patienten eingegeben sind.
31. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig**, wenn Sie die Arbeit beendet haben.

Daten zu einem bestehenden Patienten eingeben

1. Wählen Sie eine Datenbank aus, wie im Abschnitt Daten zu einem neuen Patienten eingeben beschrieben.
2. Geben Sie den Namen des Patienten ein oder wählen Sie ihn aus der Liste aus.
3. Wählen Sie das Menü **Patient** und wählen Sie die Option **Patient bearbeiten** um Daten zu diesem Patienten zu ändern.

Ein dem folgenden Beispiel ähnliches Dialogfeld wird angezeigt.

Patientendetails ändern

Name
Nachname: Doe Vorname: John Zweiter: J

Patienten-ID: JOHN_DOE

Geburtsdatum
Tag: 1 Monat: 1 Jahr: 1970

Geschlecht
 Männlich
 Weiblich

Meßergebnisse
Größe: 180 cm.
Gewicht: 80 kg.

Bevölkerungsgruppe: Europäische

Mehr... Abbrechen Speichern

Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Lesen Sie bei Bedarf in dem Abschnitt Daten zu einem neuen Patienten eingeben nach. Beachten Sie, dass das Feld **Patienten-ID** nicht geändert werden kann.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, wenn Sie alle Änderungen eingegeben haben.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Tests anzeigen**. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

Testtyp

Testtyp
 FVC IV CCS
 SVC IVC MVV

OK

5. Wählen Sie den gewünschten Test im Bereich **Testtyp** aus.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

The screenshot shows a window titled "Patiententestergebnisse" with a close button in the top right corner. Inside the window, there is a section for "Aktuelle Patient" with the following details: ID : JOHN_DOE and Name : Doe, John. Below this, there is a block of instructional text: "Wenn keine Tests verfügbar sind, klicken Sie auf die Schaltfläche 'Vortests hinzufügen'. Wählen Sie ansonsten einen Test aus, und folgen Sie den angegebenen Anweisungen. Um einen Nachtest einzugeben, wählen Sie einen Test aus dem Listenfeld 'Vortestergebnis(se)' und folgen Sie den angegebenen Anweisungen." Below the text are two columns: "Vortestergebnis(se)" and "Nachtestergebnis(se)". The "Vortestergebnis(se)" column contains a list box with the text "16/2/2005 16:21 FVC". The "Nachtestergebnis(se)" column contains a list box with the text "16/2/2005 16:27 FVC Nach". At the bottom of the window, there are five buttons: "Vortests hinzufügen", "Nachtests hinzufügen", "Tests anzeigen", "Tests löschen", and "Fertig".

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vortests hinzufügen**.
8. Weitere Informationen zum Eingeben von Testergebnissen finden Sie im Abschnitt Daten zu einem neuen Patienten eingeben.

Einen Patienten löschen

1. Wählen Sie eine Datenbank aus, wie im Abschnitt Daten zu einem neuen Patienten eingeben beschrieben.
2. Geben Sie den Namen des Patienten ein, der gelöscht werden soll oder wählen Sie ihn aus der Liste aus.
3. Wählen Sie das Menü **Patient** aus und wählen Sie die Option **Patienten löschen**.

Ein Dialogfeld mit den Patientendaten wird angezeigt.

Patientendetails löschen

Name

Nachname: Doe Vorname: John Zweiter: J

Patienten-ID: JOHN_DOE

Geburtsdatum

Tag: 1 Monat: 1 Jahr: 1970

Geschlecht

Männlich
 Weiblich

Meßergebnisse

Größe: 180 cm
Gewicht: 80 kg


Bevölkerungsgruppe: Europäische

Mehr.. Abbrechen Löschen

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Löschen**.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK** um den Löschvorgang zu bestätigen.

Testergebnisse hinzufügen, löschen und anzeigen

1. Wählen Sie eine Datenbank aus, wie im Abschnitt Daten zu einem neuen Patienten eingeben beschrieben.
2. Geben Sie den Namen des Patienten ein oder wählen Sie ihn aus der Liste aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Tests anzeigen**. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

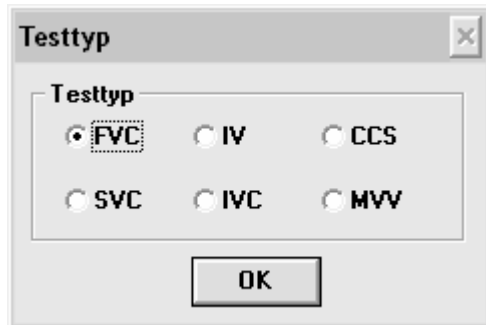

Testtyp


Testtyp

FVC IV CCS

SVC IVC MVV

OK

4. Wählen Sie den gewünschten Test im Bereich **Testtyp** aus.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

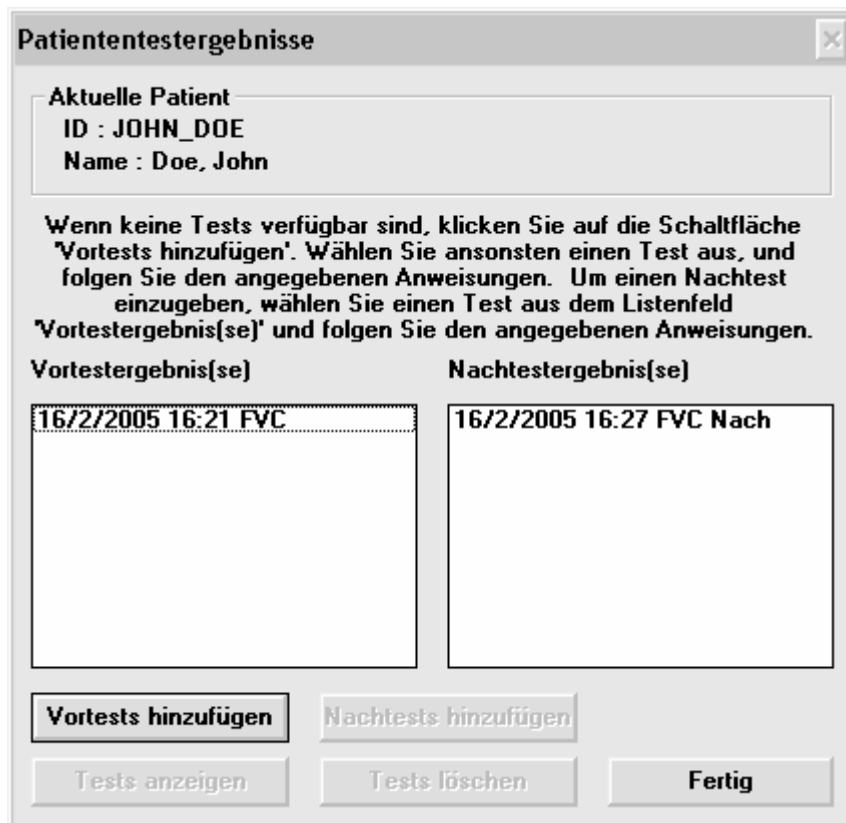

Patiententestergebnisse

Aktuelle Patient
ID : JOHN_DOE
Name : Doe, John

Wenn keine Tests verfügbar sind, klicken Sie auf die Schaltfläche 'Vortests hinzufügen'. Wählen Sie ansonsten einen Test aus, und folgen Sie den angegebenen Anweisungen. Um einen Nachttest einzugeben, wählen Sie einen Test aus dem Listenfeld 'Vortestergebnis(se)' und folgen Sie den angegebenen Anweisungen.

Vortestergebnis(se) Nachttestergebnis(se)

16/2/2005 16:21 FVC 16/2/2005 16:27 FVC Nach

Vortests hinzufügen Nachttests hinzufügen

Tests anzeigen Tests löschen Fertig

6. Wählen Sie den gewünschten Test aus, der angezeigt werden soll und klicken Sie auf die Schaltfläche **Tests anzeigen**.

Testparameter

FVC

SVC	<input type="text"/>	FEF25	<input type="text"/>	FIF75	<input type="text"/>
FVC	<input type="text"/>	FEF50	<input type="text"/>	FET	<input type="text"/>
FEV1	<input type="text"/>	FEF75	<input type="text"/>	FMFT	<input type="text"/>
FEV6	<input type="text"/>	FIVC	<input type="text"/>	Vext	<input type="text"/>
PEF L/s	<input type="text"/>	FIV1	<input type="text"/>	TPEF	<input type="text"/>
FEF25-75	<input type="text"/>	PIF L/s	<input type="text"/>		
FEF75-85	<input type="text"/>	FIF25	<input type="text"/>		
FEF.2-1.2	<input type="text"/>	FIF50	<input type="text"/>		

Meßergebnisse

Größe cm.

Gewicht kg.

Initialien der Bedienungsperson

Besuchsreferenz

Testreferenz

Anstrengungseinschätzung

Schlecht Durchschnittlich Gut

Datum des Tests

Tag Monat Jahr

Zeitpunkt des Tests

Mehr... Abbrechen OK

7. Um Testergebnisse hinzuzufügen, lesen Sie im Abschnitt Daten zu einem bestehenden Patienten hinzufügen nach.
8. Befolgen Sie diese Schritte um Ergebnisse zu löschen.
- Wählen Sie die Ergebnisse aus, die gelöscht werden sollen.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Tests löschen**. Das Dialogfeld **Testergebnisse löschen** wird angezeigt.
 - Vergewissern Sie sich, dass diese Ergebnisse gelöscht werden sollen und klicken Sie auf die Schaltfläche **Löschen**.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK** um den Löschvorgang zu bestätigen.
9. Befolgen Sie diese Schritte um Ergebnisse anzuzeigen.
- Wählen Sie die Ergebnisse aus, die angezeigt werden sollen.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Tests anzeigen**. Das Dialogfeld **Patiententestergebnisse** wird angezeigt.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, wenn Sie die Testergebnisse eingesehen haben.

ANWEISUNGEN ZUM REINIGEN UND DESINFIZIEREN

Vitalograph Pneumotrac

Auseinandernehmen des Pneumotrac-Messkopfes zum Reinigen, Sterilisieren und Desinfizieren

Befolgen Sie diese Schritte um den Messkopf auseinanderzunehmen.

1. Ziehen Sie Konus und Deckel vom Messkopf ab.
2. Entfernen Sie die Filtergitter aus Konus und Deckel und reinigen Sie sie oder werfen Sie sie weg.
3. Nehmen Sie das Messkopfgehäuse in die eine Hand und den herausragenden Teil des Fleischelementes in die andere. Entfernen Sie das Fleischelement durch Drehen und Ziehen ganz aus dem Gehäuse.
4. Sie können nun die Messkopfteile wie in der unten stehenden Tabelle beschrieben reinigen und desinfizieren.

Teil	Material	Reinigung	Desinfektion
Gehäuse- Außenwand	ABS-Kunststoff	Mit flusenfreiem feuchten Tuch abwischen. Helipur. Keine Lösungsmittel verwenden.	Mit mildem Desinfektionsmittel abwischen.
Messkopf-konus	TPX-Kunststoff	Mildes Reinigungsmittel. Mit sauberem Wasser abspülen. Abgelagerte Feststoffe abbürsten. Gründlich trocknen.	Mildes Desinfektionsmittel. Mit sauberem Wasser abspülen. Gründlich trocknen. Autoklavieren (15 Min. bei 134°C)
Messkopf-Gitter	Azetal und Polyester	Ein-Weg	Ein-Weg
Deckel	TPX-Kunststoff	Mildes Reinigungsmittel. Mit sauberem Wasser abspülen. Abgelagerte Feststoffe abbürsten. Gründlich trocknen.	Mildes Desinfektionsmittel. Mit sauberem Wasser abspülen. Gründlich trocknen. Autoklavieren (15 Min. bei 134°C)
Fleischelement -Satz	Eloxiertes Aluminium Edelstahl	Mildes Reinigungsmittel. Mit sauberem Wasser abspülen. Abgelagerte Feststoffe abbürsten. Gründlich trocknen.	In Desinfektionsmittel nach Herstelleranweisung einlegen. Autoklavieren (15 Min. bei 134°C). Dichtungen nach je 50 Behandlungen auswechseln.
Verbindungsschlauch	Silikon Gummi	Mildes Reinigungsmittel. Mit sauberem Wasser abspülen. Gründlich trocknen.	Mildes Reinigungsmittel. Mit sauberem Wasser abspülen. Gründlich trocknen.
Messkopf-Filter	Technostat	Auswechseln	Auswechseln

Zusammensetzen des Fleisch-Messkopfes

1. Stellen Sie sicher, dass nach Reinigung des Messkopfes in den Öffnungen, Rillen und Druckanschlüssen des Fleischelementsatzes kein Wasser zurückbleibt.
2. Falls Sie die Dichtungsringe auswechseln, überprüfen Sie sie auf eventuelle Beschädigungen und fetten Sie jeden Ring leicht ein, bevor Sie ihn wieder in die Gehäuserillen legen. (Empfohlen wird das Silikonfett Molycote 55 oder ein entsprechendes anderes Fett).

Vergewissern Sie sich, dass keine Fettrückstände zurückbleiben, da dies zu einer teilweisen Blockierung der Öffnungen und damit zu falschen Messwerten führen kann.

3. Legen Sie die gereinigten bzw. neuen Filtergitter in Konus und Deckel ein.
4. Nachdem der Messkopf wieder zusammengesetzt wurde, muss eine Genauigkeitsprüfung durchgeführt werden.

Vitalograph 2120 und Vitalograph Gold Standard Plus

Reinigungsinformationen für den Vitalograph 2120 und Gold Standard Plus finden Sie in den entsprechenden Benutzerhandbüchern.

Fleisch-Messkopf

Auseinandernehmen des Fleisch-Messkopfes 68000 zum Reinigen, Sterilisieren und Desinfizieren

1. Entfernen Sie die Schläuche vom Messkopf.
2. Nehmen Sie das Fleisch-Element in eine Hand und ziehen Sie den Konus mit der anderen Hand ab.
3. Entfernen Sie das Filtergitterhäuse auf die gleiche Weise vom anderen Ende.
4. Um den Messkopf aus dem Fleischelement zu entfernen, stellen Sie dieses so auf eine harte Oberfläche, dass der größere Durchmesser nach oben zeigt. Drücken Sie mit Daumen und Zeigefinger auf den Messkopf, bis dieser auf dem Tisch zu liegen kommt.
5. Trennen Sie die Teile, indem Sie die gegeneinander drehen und dabei auseinanderziehen.
6. Reinigen Sie ein verschmutztes Filtergitter oder werfen Sie es weg.
7. Folgen Sie beim Reinigen den untenstehenden Anweisungen.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass in den Öffnungen, Rillen und Anschlüssen des Messkopfes kein Wasser zurückbleibt und dass kein Wasser in die Druckschläuche gelangt.

Teil	Material	Reinigung	Desinfektion	Sterilisierung
Oberes Gehäuse des Messkopfhalters	Polystyrol-Schaum hoher Dichte mit Epoxidfarbe.	Mit flusenfreiem feuchten Tuch abwischen. Keine Lösungsmittel verwenden.	Mit einer milden Desinfektionslösung abwischen	entfällt
Messkopfkonus	Azetal	Mildes Reinigungsmittel. Mit sauberem Wasser abspülen. Gründlich trocknen.	Mildes Desinfektionsmittel. Mit sauberem Wasser abspülen. Gründlich trocknen	Kaltflüssigkeit empfohlen
Messkopfgittergehäuse	Eloxiertes Aluminium	Mildes Reinigungsmittel. Mit sauberem Wasser abspülen. Gründlich trocknen	Mildes Desinfektionsmittel. Mit sauberem Wasser abspülen. Gründlich trocknen.	Kaltflüssigkeit empfohlen. Autoklavieren oder Gas (Ethylenoxid)
Messkopfgitter	Azetal und Polyester	Wegwerfen bzw. mildes Reinigungsmittel benutzen. Mit sauberem Wasser abspülen. Gründlich trocknen.	Wegwerfen bzw. mildes Reinigungsmittel benutzen. Mit sauberem Wasser abspülen. Gründlich trocknen.	Wegwerfen bzw. Kaltflüssigkeit benutzen.
Messkopfelementeinheit	Eloxiertes Aluminium, Edelstahl	Mildes Reinigungsmittel. Mit sauberem Wasser	In Desinfektionsmittel nach Herstelleranweisung	Kaltflüssigkeit, Autoklavieren oder Gas (Ethylenoxid)

Messkopf	Eloxiertes Aluminium Azetal	abspülen. Gründlich trocknen Mit einer milden Desinfektions-lösung abwischen	einlegen. Mildes Desinfektionsmittel. Abwischen. Gründlich trocknen.	Kaltflüssigkeit, Autoklavieren oder Gas (Ethylenoxid). Dichtungsringe entfernen.
Messkopfschläuche	Silikongummi	Mit flusenfreiem feuchten Tuch abwischen. Keine Lösungsmittel verwenden.	Mit mildem Desinfektionsmittel abwischen. Gründlich trocknen und sicherstellen, dass keine Flüssigkeit in die Schläuche gelangt.	entfällt

Zusammensetzen des Fleisch-Messkopfes

1. Überprüfen Sie nach der Reinigung des Messkopfes die Dichtungsringe auf eventuelle Beschädigungen und fetten Sie jeden Ring leicht ein, bevor Sie ihn wieder in die Gehäuserillen legen. (Empfohlen wird das Silikonfett Molycote 55 oder ein entsprechendes anderes Fett). Außerdem sollten Sie das Messkopfgehäuse leicht einfetten.

Die korrekte Position der Dichtungsringe können Sie der obigen Abbildung der verschiedenen Messkopfteile entnehmen.

Vergewissern Sie sich, dass keine Fettrückstände zurückbleiben, da dies zu einer teilweisen Blockierung der der Öffnungen und damit zu falschen Messwerten führen kann.

2. Führen Sie beim Zusammensetzen das Element durch die Seite des Gehäuses ein, die sich dem blauen Anschlusszapfen am nächsten befindet.
3. Setzen Sie neue Filtergitter in den Messkopf und das Messkopfgittergehäuse ein.
4. Drücken Sie den Messkopfkonus auf die kleinere Öffnung des Elements und drücken Sie das Messkopfgittergehäuse auf die größere Öffnung.
5. Achten Sie beim Anbringen der Messkopfschläuche darauf, dass die farblich gleich kodierten Anschlusszapfen am Messkopf und am Spirometer miteinander verbunden werden.

Anweisungen zum Reinigen und Desinfizieren - Volumetrisches S-Modell-Spirometer

Folgen Sie den Anweisungen im Vitalograph-S-Servicehandbuch zur Reinigung und Sterilisierung des Atemschlauches und des Keilbalgs des S-Modells.

Mundstücke und andere Zubehörteile, allgemein

Kat.- Nr.	Beschreibung
20242	Sicherheitsmundstücke (200 Stück)
28200	Bakterien-Viren-Filter (50 Stück)
20303	Nasenklammern (10 Stück)
42084	Gitterfilter (10 Stück)
20408	1-Liter-Präzisionspumpe
76050	Packung Messkopffilter

Ersatzteile für Vitalograph Pneumotrac

Kat.- Nr.	Beschreibung
31297SPR	Netzkabel, Großbritannien
31375SPR	Netzkabel, USA
31376SPR	Netzkabel, Schuko
21001204	Netzteil
62019SPR	Messkopf-Konus
62006SPR	Messkopf-Deckel
76062	serielles Kabel 9-polig / 9-polig
61030	Vollständiger Messkopf
42029SPR	Verbindungsschlauch

Ersatzteile für 68000

Kat.- Nr.	Beschreibung
42019 SPR	Vollständiger Messkopfkonus
42021 SPR	Messkopfkonusteil
42028 SPR	Gummihalterband
42029 SPR	Messkopf-Verbindungsschlauch
42046 SPR	Vollständiger Messkopf
42055 SPR	Element-Einheit
42078 SPR	Messkopfgittergehäuse
42079 SPR	Pneumotach-Widerstandselement
42082 SPR	Satz Messkopfdichtungsringe
68087 SPR	Computer-Schnittstellenkabel
68015 SPR	Software-Aktualisierungssatz
68040 SPR	Messkopfhalterungseinheit

Informationen zu anderen Ersatzteilen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Benutzerhandbüchern.

FEHLERBESEITIGUNG BEI SOFTWARE-PROBLEMEN

- Problem:** Meldung - TESTS UNTERHALB VON 17 NICHT EMPFOHLEN
- Behebung:** Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem Gerät und dem Computer.
Oder
Setzen Sie die Temperatur auf dem Spirometer 2120 bzw. Gold Standard Plus auf Raumtemperatur zurück .
- Problem:** Ein Test wird durchgeführt, es erscheint jedoch keine Bildschirmanzeige
- Behebung:** Überprüfen Sie, ob das richtige Gerät im Menü **Optionen** ausgewählt wurde. Überprüfen Sie, ob die Messkopfschläuche an beiden Enden jeweils mit dem entsprechend farbig kodierten Anschlusszapfen verbunden sind.
- Problem:** Inspiratorischer Atemstrom erscheint nicht auf dem Bildschirm
- Behebung:** Überprüfen Sie, ob unter Parameter im Menü **Optionen** die Einatmungsparameter ausgewählt wurden.
- Problem:** Die Fluss- und Volumen-Zeitkurven sind zu klein oder zu groß
- Behebung:** Ändern Sie die Größe der Diagramme mit Hilfe der entsprechenden Schaltfläche oben rechts auf dem Testbildschirm
- Problem:** Der Bericht druckt die ausgewählten Parameter oder Diagramme nicht aus.
- Behebung:** Überprüfen Sie, ob im Menü Berichte der korrekte Bericht ausgewählt wurde.
- Problem:** Der Ausdruck oder das Diagramm passt nicht auf die Seite.
- Behebung:** Überprüfen Sie den im Menü **Optionen** ausgewählten Zeitmaßstab.

FEHLERBESEITIGUNG BEI HARDWARE-PROBLEMEN – VITALOGRAPH PNEUMOTRAC

- Problem:** PP3-Batterie fast leer
Symptome: Gebläse funktioniert nicht
Behebung: Wechseln Sie die PP3-Batterie aus
- Problem:** Verbindungsschlauch ist falsch angeschlossen
Symptome: Atemstrom wird nicht gemessen
Behebung: Vergewissern Sie sich, dass die geriffelte Seite des Schlauches mit der geriffelten Seite des Geräteanschlusses und dem blauen Anschlusszapfen am Messkopf verbunden ist.
- Problem:** Kabel nicht korrekt angeschlossen
Symptome: Falsche oder keine Messwerte (Volumen oder Temperatur)
Behebung: Vergewissern Sie sich, dass die Stecker nicht verschmutzt oder anderweitig beeinträchtigt sind und vollständig eingesteckt wurden.
- Problem:** Messkopf defekt
Symptome: Falsche oder keine Messwerte (Volumen oder Temperatur)
Übermäßige Kalibrierungsabweichung
Behebung: Wenden Sie sich an den nächstgelegenen Fachhändler um Ersatz anzufordern.
- Problem:** Geknickter oder gedrückter Schlauch
Symptome: Niedrige oder keine Volumenmesswerte
Behebung: Entfernen Sie die Ursache.
- Problem:** Verschmutzter Messkopf
Symptome: Falsche oder keine Messwerte (Volumen oder Temperatur)
Übermäßige Kalibrierungsabweichung
Behebung: Reinigen Sie den Messkopf gründlich.

FEHLERBESEITIGUNG BEI HARDWARE-PROBLEMEN DER SPIROMETER 68000/69000

Problem: Platinen-E/A-Adressenkonflikt

Symptome: Die Spirotrac-Software erkennt keine Hardware.
Karten in Konflikt mit der Software funktionieren ebenfalls nicht.
Ein völliger Absturz des Systems ist möglich.

Behebung: Es gibt drei empfohlenen Schaltereinstellungen für die Karte

Werksvorgaben: E/A-Address 330h->337h	1 2 3 4 5 6
	1 0 0 1 1 X
	1 2 3 4 5 6
Option A: E/A-Address 340h->347h	1 1 1 0 1 X
	1 2 3 4 5 6
Option B: E/A-Address 338h->33Fh	0 0 0 1 1 X

Überprüfen Sie, ob die Standardeinstellungen mit irgendetwas anderen Schnittstellenkarten in Konflikt stehen. Stellen Sie die Schalter nach Möglichkeit auf die Einstellungen von Option A oder B ein, wenn dies zu keinen Konflikten führt und versuchen Sie diese Einstellungen zu verwenden. Wenn sämtliche dieser Adressbereiche bereits belegt sind, wenden Sie sich an den nächstgelegenen Händler.

Problem: Karte nicht korrekt eingesteckt

Symptome: Die Spirotrac-Software erkennt keine Hardware
Ein Absturz des Systems ist möglich

Behebung: Vergewissern Sie sich, dass der Steckkontakt nicht verschmutzt oder anderweitig beeinträchtigt ist und dass die Karte vollständig eingesteckt wurde.

Problem: Fehlerhafte Karte

Symptome: Die Spirotrac-Software erkennt keine Hardware
Ein völliger Absturz des Systems ist möglich.
Falsche Messwerte (Volumen oder Temperatur)

Behebung: Wenden Sie sich an den nächstgelegenen Fachhändler um Ersatz anzufordern.

Problem: Kabel nicht korrekt angeschlossen

Symptome: Falsche oder keine Messwerte (Volumen oder Temperatur)

Behebung: Vergewissern Sie sich, dass die Stecker nicht verschmutzt oder anderweitig beeinträchtigt sind und vollständig eingesteckt wurden.

Problem: Fehlerhaftes Kabel

Symptome: Falsche oder keine Messwerte (Volumen oder Temperatur)

Behebung: Wenden Sie sich an den nächstgelegenen Fachhändler um Ersatz anzufordern.

Problem: Defekter Messkopfstand

Symptome: Falsche oder keine Messwerte (Volumen oder Temperatur)
Übermäßige Kalibrierungsabweichung

Behebung: Wenden Sie sich an den nächstgelegenen Fachhändler um Ersatz anzufordern.

Problem: Schläuche falsch verbunden

Symptome: Umgekehrte oder keine Volumenmesswerte

Behebung: Orientieren Sie sich anhand der gerippten und glatten Beschaffenheit der Schläuche und stellen Sie sicher, dass der blaue bzw. silberne Zapfen am Stand mit dem entsprechenden Zapfen des Messkopfes verbunden ist.

Problem: Geknickter oder gedrückter Schlauch

Symptome: Niedrige oder keine Volumenmesswerte

Behebung: Entfernen Sie die Ursache.

Problem: Verschmutzter Messkopf

Symptome: Falsche oder keine Messwerte (Volumen oder Temperatur)
Übermäßige Kalibrierungsabweichung

Behebung: Reinigen Sie den Messkopf gründlich.

Fehlerbeseitigungshinweise für den Vitalograph 2120 und Gold Standard Plus finden Sie in den entsprechenden Benutzerhandbüchern.

TECHNISCHE DATEN

Vitalograph Pneumotrac

Flussmessprinzip	Fleisch-Pneumotachometer
Rückdruck	0,1 kPa/Liter/Sekunde, entspricht oder übertrifft ATS-Standards.
Volumenmessung	Flussintegration
Flussrate (max.)	±14 Liter/Sekunde
Volumen (max.)	>8 Liter
Genauigkeit	Besser als ±3% oder ±0,05 Liter Volumen: je nachdem, welcher Wert größer ist und ±5% Fluss (inspiratorisch: ±5% Volumen, ±8% Fluss)
Betriebstemperatur	15-40°C
Sicherheitsstandards	Entspricht EN60601-1, EN60601-1-2
Spirometrie-Standards	ATS und ERS
Maße, brutto	170mm x 163mm x 45mm
Gewicht, brutto (ohne Messkopf)	345g
Lagerungstemperatur:	0-50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% - 95%

Vitalograph 2120 und Gold Standard Plus

Technische Daten zu den Spirometern 2120 und Gold Standard Plus finden Sie in den entsprechenden Benutzerhandbüchern.

68000 Spirometer

Flussmessprinzip	Fleisch-Pneumotachometer
Flussmessbereich	0 bis 18 Ltr/Sek
Flusswiderstand	< 1,2 cm H ₂ O @ 12 Ltr/Sek
Volumenbereich	0 - 8 Liter
Volumengenauigkeit	± 3 % oder 50 ml
Flussgenauigkeit	± 3%
Messfrequenz	>100 Hz
Betriebsspannung	12 - 15 Volt GS @ 15 mA Gewicht
Gewicht	1,36 Kg
Größe (L x B x H)	230 x 127 x 89 mm
Lagerung	Temperatur: 0 - 50 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10% - 95%

Spirometer 69000

Messsystem	Linearisierter Trockenkeilbalg
Volumenkapazität	7,8 Ltr BTPS @ 20o C
Volumetrische Genauigkeit	Zertifiziert für ± 50 ml oder 0,5 %
Volumetrische Linearität	Zertifiziert für $\pm 0,5$ % von f.s.d. (± 35 ml/Ltr)
Volumetrische Akkumulation	Statisch - unendlich Dynamisch - 12 Sekunden (6 Sekunden optional)
Rückdruck	Statisch - maximal 0,235 kPa Dynamisch - 0,013 kPa/Ltr/Sek @ 12 Ltr/Sek
Aktivierungsvolumen	0,04 Ltr (bei Kalibrierung berücksichtigt)
Aufzeichnungssystem	30 mm/Sekunde - $\pm 0,0234$ %
Messfrequenz	100 Hz
Größe (L x B x H)	480 x 440 x 300 mm
Gewicht (netto)	10,5 kg
Vitalogram® Karten	Schmierfester beschichteter Karton
Lebensdauer der Karten	Mehr als 30 Jahre
Betriebsspannung	110 - 250 Volt ~/50 oder 60 Hz
Lagerung	Temperatur: 0 - 50° C Relative Luftfeuchtigkeit: 10% - 95%

KUNDENDIENST

Die Namen und Anschriften von anerkanntem Vitalograph-Kundendienstpersonal können Sie bei einer der folgenden Niederlassungen oder vom nächstgelegenen Vitalograph-Fachhändler erfragen.

Vitalograph Ltd., Maids Moreton, Buckingham, MK18 1SW, England
Telefon: (01280) 827110 Fax: (01280) 823302
E-Mail: sales@vitalograph.co.uk Internet: www.vitalograph.co.uk

Vitalograph GmbH, Jacobsenweg 12, 22525 Hamburg, Germany
Telefon: (040) 54 73 91-0 Fax: (040) 54 73 91-40
E-Mail: info@vitalograph.de Internet: www.vitalograph.de

Vitalograph Inc., 13310 West 99th Street, Lenexa, Kansas 66215, U.S.A.
Telefon: (913) 888-4221 Fax: (913) 888-4259
E-Mail: vitcs@vitalograph.com Internet: www.vitalograph.com

Vitalograph (Ireland) Ltd., Ennis Industrial Estate, Gort Road, Ennis, Co. Clare, Irland
Telefon: (065) 6864100 Fax: (065) 6829289
E-Mail: sales@vitalograph.ie Internet: www.vitalograph.ie

GARANTIE

Garantiebedingungen

Unter den im folgenden angegebenen Voraussetzungen garantiert Vitalograph Ltd. und die mit dem Unternehmen verbundenen Firmen (im folgenden als „das Unternehmen“ bezeichnet) Teile, die nach Ansicht des Unternehmens defekt sind oder aufgrund schlechter Verarbeitung oder wegen Materialfehlern den Anforderungen nicht genügen, nach seinem Ermessen zu reparieren oder teilweise zu ersetzen.

Die Bedingungen dieser Garantie lauten im einzelnen:

1. Diese Garantie erstreckt sich, sofern keine anderweitige schriftliche Vereinbarung existiert, nur auf Hardware-Fehler, von denen das Unternehmen oder einer seiner anerkannten Vertreter innerhalb eines Jahrs nach dem Kaufdatum des Gerätes in Kenntnis gesetzt werden.
2. Die Garantiefrist für Software (womit Computer-Software oder vom Benutzer installierbare Module gemeint sind) beträgt 90 Tage nach dem Kaufdatum.
3. Das Unternehmen garantiert, dass die korrekt installierte Software, sofern sie in Verbindung mit der Hardware verwendet wird, funktioniert wie dies in den Dokumentationsmaterialien des Unternehmens und den Benutzerhandbüchern beschrieben ist. Das Unternehmen verpflichtet sich, Software-Fehler innerhalb des oben genannten Zeitraumes kostenfrei zu beheben, sofern der Fehler reproduziert werden kann und die Software entsprechend den Anweisungen des Benutzerhandbuches installiert wurde. Ungeachtet dieser Bedingung wird nicht garantiert, dass die Software keine Fehler aufweist.
4. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Fehler, die durch Unfälle, falsche Bedienung, Vernachlässigung, Herumhantieren mit dem Gerät, Verwendung von nicht durch das Unternehmen anerkanntem Zubehör oder Ersatzteilen oder dadurch verursacht worden sind, dass jemand, der kein anerkannter Vertreter des Unternehmens ist, versucht hat, das Gerät einzustellen oder zu reparieren. Diese Garantie erstreckt sich außerdem nicht auf die Korrektur von Konfigurationsänderungen, die durch die Installation irgendeiner Software verursacht wurden.
5. Sollte ein Defekt auftreten, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Das Unternehmen autorisiert niemanden, ihm in Verbindung mit Vitalograph®-Geräten weitere Verpflichtungen oder Haftungen entstehen zu lassen.
6. Diese Garantie ist nicht übertragbar und keine Einzelperson, keine Firma und kein Unternehmen kann die Bedingungen dieser Garantie verändern.
7. Das Unternehmen akzeptiert im gesetzlich zulässigen Höchstmaß keine Haftung für Folgeschäden, die aus der Verwendung von Vitalograph®-Geräten bzw. aus der Unfähigkeit zu deren Verwendung resultieren.
8. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Kunden und berührt diese Rechte in keinsten Weise.